



Dynamiske luftmadrasser

Invacare **SoftAIR** madrasserne giver effektiv og komfortabel aflastning til patienter med høj risiko for at udvikle tryksår, og **SoftAIR** madrasserne understøtter behandling af tryksår til og med kategori 4. Serien omfatter **SoftAIR Super** og **SoftAIR Excellence**.

SoftAIR Serien



Invacare **SoftAIR Super**

SoftAir Super er en helmadrass, der er opbygget af 21 celler (cell-in-cell), der inkluderer 3 statiske celler i hoved sektionen. Luften i cellerne tilpasses nænsomt henover faser af 12 min., ud fra et 2 op 1 ned princip. Betrækket er strækbart og åndbart og alle sømme er svejste.



Invacare **SoftAIR Excellence**

SoftAir Excellence er en helmadrass, der er opbygget af 19 celler (cell-in-cell), der inkluderer 3 statiske celler i hoved sektionen samt stabiliserende luft i siderne, der sikrer tryk ind- og udstigning for patienten. De stabiliserende luftfyldte sider yder endvidere en effektiv beskyttelse for patienten i forbindelse med transport i sengen. **SoftAIR Excellence** tilbyder endvidere en selvstændig hælzone, bestående af 5 mikro celler med lavt tryk, til individuel aflastning af dette sensitive område.



Invacare **SoftAIR Pumpe**


Trykket i **SoftAir** madrassen indstilles automatisk til et korrekt niveau, der sikrer at borgeren ikke ligger madrassen igennem. Hvis der bliver behov for at justere komfort niveauet, kan dette ske ved hjælp af **SoftAir Pumpens** betjeningspanel, der er forsynet med letbetjente taster, integreret i panelet. Pumpen kan indstilles til statisk eller vekslende tryk funktion. Desuden har pumpen indbygget audiovisuel alarm, der aktiveres i tilfælde af for lavt eller for højt tryk, fejl ved alternering eller ved strømsvigt.

Egenskaber og fordele



Celler med vekslende lufttryk

Det tredelte vekseltryk (2 op 1 ned) gennemføres over en 12 minutters cyklus, således at sæt af 3 celler regelmæssigt har vekslende tryk. Dette sker mhp. at skabe optimale forhold for vævsceller samt for at optimere blodcirkulationen. For at øge brugerkomforten holdes cellerne i hovedenden statiske. En enkel tilgang til cellerne gør udskiftning af cellerne til en nem opgave.

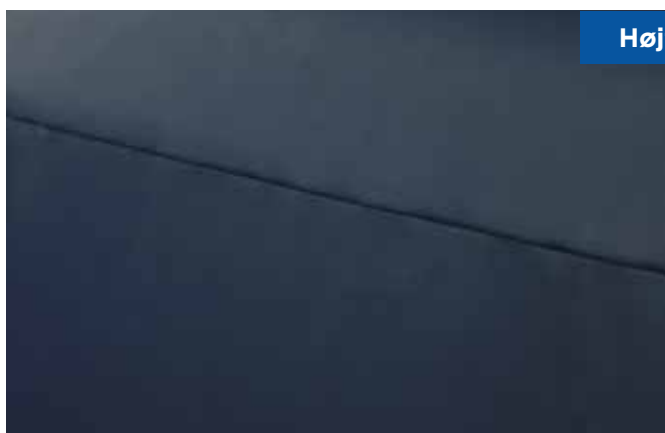

Højfrekvens svejste sømme og 2 vejs strækbart betræk

Sømme er højfrekvens svejste, og lynlåse har overfald for at sikre mod væskeindtrængen og for at sikre en konstant høj hygiejnisk standard. Betræk er udført i smidigt Polyurethan materiale, der er 2-vejs strækbart samt vanddampgennemtrængeligt mhp. at yde bedst mulig komfort og minimere risiko for tryk som følge af shear og friktionskræfter. Betrækket er forsynet med "quick release" lynlås som gør det muligt at fjerne toppen af betrækket hurtigt. Således tages der maksimal hensyn til kontamineringsrisiko. Betrækket er vaskbart ved 95° C.

Opdateret CPR ventil fra juli 2015



CPR Strop (Dansk HLR: Hjerte-lunge-redning)

I tilfælde af at en situation opstår, hvor HLR er påkrævet, skal der trækkes i den gule strop mærket CPR. Luften lukkes øjeblikkeligt ud af madrassen.



Bæretaske

SoftAIR madrasserne kan rulles sammen, opbevares og transporteres i bæretasken der leveres sammen med hver enkelt madras. Bæretasken er forsynet med en sidelomme, i hvilken det er muligt at opbevare **SoftAIR** pumpen. Bæretasken er forsynet med hjul i den ene ende - således foregår transport af madras og pumpe ekstremt enkelt.

Egenskaber og fordele



"Quick release" lynlås

En "quick release" lynlås sikrer, at man med et enkelt tag, kan fjerne hele betrækket under hensyntagen til kontamineringsrisiko.



Håndtag

Robuste håndtag er placeret på begge sider af madrassen.



Lagen stropper

Sikrer løs fastgørelse af lagen i hjørnerne samtidig med at der er fri adgang til HLR stroppen.



Bevægelig åbning ved ryg

Designet mhp. at modvirke luftcellers naturlige fremadskridning ved elevering af ryg samt mhp. forebyggelse af shear og friktion. (Findes alene på **SoftAIR Excellence**)



Transport

I luftslangens "quick release" håndtag kan indsættes en adaptor, der sikrer at madrassen holder luft i op til 72 timer, når denne er frakoblet pumpen. Adaptor er vedhæftet luftslangens udtag.



Sikkerhedsstropper

Sikkerhedsstropper til fastgørelse af madras til liggeflade er placeret langs madrassens underkant.

Tekniske data



Model	Størrelse (mm)	Vægt (kg)	Max. vægt (kg)	Min. vægt (kg)	Temperatur (°C)	Bariatrisk
SoftAIR Super	Smal model	9,2	Max: 200	Min. 30	95	Bariatrisk
	Bred model	10,5				
SoftAIR Excellence	2000 x 830 x 200 mm	9,5	Max: 200	Min. 30	95	Bariatrisk
	Bred model	10,8				
	2000 x 880 x 250 mm					

Produceret efter Europæiske standarder:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, BS7177: 1996 Crib Source 5

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Softair - DK - 06/2016