



Invacare[®] | **Carebed**

Trykaflastning baseret på
statisk luft

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Carebed** sørger for effektiv trykaflastning både ved forebyggelse og behandling af tryksår. Madrassen kan tilpasses individuelt og er meget enkel i brug, hvilket sikrer en korrekt og enkel håndtering for plejepersonalet. Madrassen følger sengens indstillinger og er meget stabil og komfortabel. **Carebed** kan endvidere, med fordel anvendes som helmadrass sammen med strækbart inkontinensbetræk med lomme til 50 mm undermadrass. Dette øger komforten og håndteringen af madrassen som helhed. **Carebed** er anerkendt og klinisk dokumenteret af Department of Health i England. Carebed operationsmadrass er testet i Danmark med et fint resultat. **Carebed** leveres i børnestørrelser og som siddepuden Caresit.

Trykaflastning med statisk luft

En afgørende faktor for udvikling af tryksår er underlagets modtryk. Normale puder og madrasser giver ofte et højere modtryk end kapillærtrykket. Ved immobilitet over tid, stoppes blodgennemstrømningen på udsatte steder og forårsager tryksår. Ved anvendelsen af *Invacare Carebed* reduceres modtrykket. **Carebed** lader kroppen synke ned i underlaget - trykket fordeles på en større flade og kapillærtrykket opretholdes.

Funktion

Carebed består af mere end 300 celler fyldt med luft. Luften fordeles mellem cellerne og tilpasser sig brugerens form og vægt. Madrassen er enkel at fylde. Luft pumpes ind i ca. 1 minut og ventilen lukker sig ved den rigtige luftmængde. **Carebed** kan leveres med en vedligeholdelsespumpe som automatisk sikrer korrekt luft i madrassen, når trykket bliver for lavt f.eks. pga stikhuller eller lignende mhp optimal sikkerhed.

Features and Options



Andre anvendelser

Konceptet anvendes ligeledes til børnemadrasser og til operationslejer.

Carebed som helmadrass

Carebed kan anvendes med undermadrass og betræk og således fungere som helmadrass. Leveres med strækbart, inkontinensbetræk med lomme til 50 mm skumundermadrass.

Vedligeholdelsespumpe


Carebed kan leveres med en vedligeholdelsespumpe, der sikrer at trykket i madrassen holdes på korrekt niveau.

Fyldningspumpe

Carebed fyldes med tempereret luft (27°).

Caresit

Konceptet med luft findes ligeledes i **Caresit** siddepuderne. Kan anvendes i kørestole, lænestole samt på bilsæder.

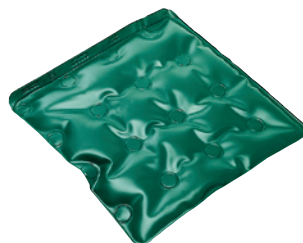

Technical data

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product's user manual, please see your local Invacare website.

	Width	Length	Vægt	Maks. brugervægt
Størrelse Std	850-880 mm	2000 mm	3,8 kg	150 kg
Operationsmadrass	480 mm	1030/1700/2000mm	1,3 - 2,3 kg	150 kg
Børnemadrass	700 mm	1600 mm	-	150 kg
Pumpe	-	-	1,6 kg	150 kg
Caresit	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	0,3 - 0,8 kg	150 kg

Garanti

Garanti pumpe: Livstid
 Garanti madrass/pude: 2 år
 Folie: PVC uden tungmetaller og syntetisk gummi.
 Madrassen kan recirkuleres. Elektrisk tilkobling: 220 V

For info om Carebed børnemadrass henvendelse i Invacares kundeservice.

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
 denmark@invacare.com
 www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark

