

UROX kop		M L XL	Sikker opsamling af urin. Huden holdes tør. Let at tage af og på.
UROX 600 ml Gamache		M L XL	Behagelig anatomisk. Diskret udløb. Udløbshane sikret imod uheld og dryp.
UROX Underbukser		M L XL	Underbukser med special-gylp til ekstra sikkerhed og komfort ved styring af kop og slange. Ingen generende syninger bagpå.
UROX Skyllemiddel		250 ml 500 ml	Plejemiddel til kontrol af bakterier og lugt.

UROX

Urinopsamling på en ny måde




UROX kan købes i E-butikken på www.UROX.com eller hos Danpleje OneMed A/S, tlf. 86 109 109

UROX produceres af:
Urologic ApS, Vroldvej 192, 8660 Skanderborg,
info@urox.com. 60710161

www.UROX.com

Hvad er UROX?

UROX er et helt nyt system til urinopsamling for mænd. UROX gør det muligt at opretholde en aktiv og udadvendt livsstil på trods af hyppige toiletbesøg eller inkontinens.

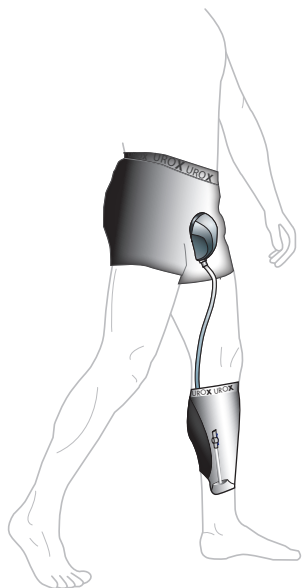

Systemet består af tre dele:

- En blød kop, der sidder omkring penis.
- Et par underbukser, der holder koppen på plads.
- En stræk-gamache med indsyet benpose til urin.

Systemet rengøres efter brug med et specialudviklet plejemiddel.

Hvem kan bruge UROX?

- Mænd, som generes af hyppig vandladning f.eks. pga. forstørret prostata, medicin eller slap blære.
- Mænd, som har et job eller en hobby, hvor det er svært at komme til toilettet, f.eks. buschauffører, svæveflyvere, kampvognsbesætninger, skolelærere og alle andre, der i perioder risikerer at skulle holde sig længere, end behageligt.
- Mænd med inkontinens: f.eks. sclerose-patienter, rygmarvsskadede, prostata-opererede, RIK-brugere, og kørestolsbrugere.

Billigt i brug

Systemet er så robust, at det kan holde til daglig brug, og så diskret, at det kan bruges sammen med ganske almindeligt tøj, uden at man kan se det. Det kan tåle at blive brugt igen og igen, hvis det rengøres efter brug. Til rengøringen har vi udviklet et plejemiddel der, uden at beskadige de tynde pakninger og ventiler, hæmmer bakterievækst og lugtgener.

UROX systemet

Man tisser i koppen. De første gange føles det lidt mærkeligt, men man vænner sig meget hurtigt til det. Fra koppen løber urinen gennem en slange ned i gamachen, hvor den opsamles i den indsyede urinpose. Herfra kan man senere tømme urinen ud gennem en lille slange, når det er belejligt.



Koppen anbringes i skridtet, nærmest som de skridtbeskyttere, der kendes fra sportens verden. Den er fremstillet i et blødt plastmateriale og

designet, så den følger kroppens form, men med så meget luft omkring penis, at huden holdes tør.

På den side, der vender ind mod kroppen, sidder en tynd og elastisk silikone membran. Et hul i membranen slutter tæt om penis uden at trykke.

Koppen holdes på plads af UROX underbukserne, der også sikrer at slangen til gamachen føres ud i den rigtige vinkel, så man f.eks. kan tisse, medens man sidder ned, uden at urinen løber tilbage.

Gamachen sidder på venstre ben. Den er syet i strækstof i en helt ny form, der giver en enestående pasform. Urinposen er anbragt udenpå skinnebenet, hvor den generer mindst muligt.

Udløbshanen, der sidder i bunden af posen, kan bukes op, så man ikke kan se den under buksekanten. Den sættes fast i en lille holder når den ikke er i brug, så hanen ikke åbnes ved et uheld.

Kop, gamache og underbukser fås i forskellige størrelser. Ved at vælge den rigtige størrelse sikres den bedst mulige komfort og sikkerhed.