



KONTAKTINFORMATION

Adresse

Astrid Leisner & Søn
Korsvangcentret
5610 Assens

Telefon

Hovednummer: (+45) 6371 3050
Fax: (+45) 6371 3051

Åbningstider

Mandag - Torsdag 8.30-16.30
Fredag 8.30-13.00

Internet

E-mail: info@leisner.dk
Hjemmeside: www.leisner.dk



Careousel GSM

Pilleæske med SMS og e-mail funktion



ASTRID LEISNER & SØN ApS



Careousel GSM med sms og e-mail funktion

Pilleæsken har indbygget sim-kort som kan sende SMS og e-mail alarm til pårørende, plejepersonale eller brugeren selv, hvis medicinen ikke tages.

GSM - sikker, fleksibel og let at anvende

Careousel GSM er en automatisk pilleæske som gennem lyd eller blinkende lys påminder brugeren når det er tid til at tage medicin. Dispenseren er udformet som en karrusel med 28 aflukkede og aflåste rum. Medicinbrugeren eller plejepersonalet fylder dispenseren med den rette medicin og indstiller nemt uret og alarmen, hvorefter pilleæsken er klar til brug.

Careousel GSM har en sikkerhedsfunktion, som mindsker risikoen for fejldosering.

Privat og offentligt

Fordelene ved dispenseren er mange. På det personlige plan kan den for mange ældre betyde forskellen på at kunne bo hjemme og at skulle flytte på plejehjem. Den kan også fremskynde hjemsendelsen fra sygehuset.

Økonomisk kan det især for hjemmeplejen være en stor besparelse, at benytte sig af dispenseren, f.eks. hvor hjemmeplejebesøgene udelukkende drejer sig om, at hjælpe borgeren med at tage sin medicin rettidigt.

Boenheder og døgninstitutioner vil også med fordel kunne benytte sig af dispenseren.



Den rette dosis bliver tilgængelig til den rette tid

Pilleæsken alarmerer brugeren med lys og lyd, og man kan selv indstille hvor lang tid brugeren skal have til at tage sin medicin. Overskrides denne tid, afsendes der en sms eller e-mail.



Den kan også rapportere diverse fejlmeldinger, f.eks. når den ligger på hovedet, når op til 4 doser ikke er blevet taget eller når der er lav batterikapacitet. Det maksimale antal af daglige påmindelser er 28 gange.

Når pilleæsken skal afgive alarm, roterer medicin kasseten, og gør den næste dosis tilgængelig under en åbning i låget. Man tager medicinen ved at vende Careouselen på hovedet, så pillerne falder ud. Når man vender den, stopper alarmen og lyssignalet.

Pilleæsken kan indstilles enten manuelt på pilleæsken eller via et administrationspanel på hjemmeside.

Dispenseren har mange gode egenskaber:

- Aflåselig låg
- Der kan ikke tages overdosis, når karrusellen fyldes korrekt
- Forhindrer fejlmedicinering, når karrusellen fyldes korrekt
- Log der registrerer, hvornår medicinen bliver taget ud
- 24-timers ur. Stiller automatisk om til sommer-/vintertid
- Op til 28 daglige alarmer.
- Regulerbar alarmtype og -længde
- Batterialarm - gør opmærksom når batteriet skal skiftes

