

LASAL



Maj 2018

**Sid godt
.... med støtte fra LASAL**

SÆKKESTOL



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø

E-mail: info@lasal.dk ☎ +45 8696 6666 🇩🇰 www.lasal.dk

CVR Nr. DK 1437 8677



Sækkestol, barn 3200.

Brug sækkestolen i siddende stilling ved at stille den på den sekskantede bund. Form et hul til brugeren at sidde i og sørg for at brugeren placeres dybt ind og ned i materialet således at hele kroppen er støttet. Herved kan brugere placeres så opret som muligt og med fødderne placeret på gulvet. Personen kan således følge med i, hvad der foregår i rummet og ligeså føle vibrationer op igennem fødderne. Afhængig af siddestillingen kan der være behov for ekstra støtte til hovedet/nakken og evt. arme og underben.



Sækkestol, junior 4200.

Placeres sækkestolen en anelse mere skævt på bunden, kan personen vinkles i en mere afslappende stilling.

Hvis man lægger den kegleformede sækkestol ned, vil man få en stor kile, som kan udnyttes på flere måder. Personen kan ligge på maven med armene ud over den høje del. Denne stilling kan bruges i forbindelse med øvelser af ryggen.

Man kan også bare ligge behageligt i sækkestolen på ryggen eller på siden eller i en såkaldt havfruestilling, hvor hoftevinklen er minimeret.

Anvendelsesmulighederne er mange og det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

Sækkestolen findes i tre størrelser, er fremstillet i et praktisk materiale, der er uigennemtrængeligt for væsker og leveres desuden med et aftageligt bomuldsbetræk.



Sækkestol, voksen 5200.

Sækkestol anvendt i en træningsituation



Sækkestol til afslapning



Materiale

Yderbetræk: 100% ÖKO TEX certificeret bomuld.
Inderbetræk: PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil.
Fyld: Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).

Rengøring og vedligeholdelse

Yderbetrækket kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme. Polyesterbetrækket kan aftørres med sprit, éngangsklude med klor (max. 1000 ppm) eller almindelige rengøringsprodukter og med vand. Selve puden tåler ikke kemisk rensning og må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse opløsningsmidler kan opløse polystyrenkuglerne.

Bortskaffelse

Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Trods høj brugerkomfort og maximal trykfordeling er puderne ikke antidecubitus produkter.

Specifikationer


Varenr.	Produkt	Farve på yderbetræk	Diameter	Højde	Vægt	HMI-nr.
3200	Sækkestol, barn	Rød/pink/turkis	72 cm	48 cm	6,6 kg	29373
4200	Sækkestol, junior	Grøn/turkis	81 cm	51 cm	10,5 kg	29213
5200	Sækkestol, voksen	Blå/marine	110 cm	55 cm	18,0 kg	29372

Ekstra betræk kan bestilles separat.



VIGTIGT

Undgå skarpe kanter og spidse genstande mod puderne.

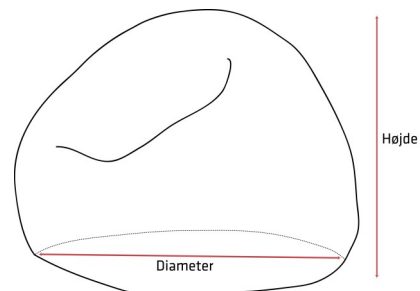

LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø

E-mail: info@lasal.dk



+45 8696 6666



www.lasal.dk

CVR Nr. DK 1437 8677