

Huka City er standart udstyret med:

- Parkeringsbremse
- Bag tromlebremse
- En stort set lukket moderne kædeskærm
- Sikkerhedslås (AXA solid)

Huka City kan leveres med:

- Hjælpe motor fra Bafang
- Kan leveres i to størrelser

Tekniske specifikationer	City, størrelse M	City, størrelse L
Længde i mm	1675	1675
Bredde i mm	785	785
Vægt i kg	25	26
Krank længde i mm	170	170
Skridtlængde i mm	660 - 880	790 - 980
Indstignings ramme i mm	570	570
Indstigningshøjde i mm	190	190
Max belastning i kg	130	130
Dækstørrelse front i tommer / ETRTO	24 x 1,75 (47 - 507)	24 x 1,75 (47 - 507)
Dækstørrelse bag i tommer / ETRTO	20 x 1,75 (47 - 406)	20 x 1,75 (47 - 406)

FAABORG REHAB



Huka CITY

EN LETVÆGT CYKEL MED STABILITET

City Tricykel har et ny moderne look fra hollandsk design, med endnu mere cykelkomfort . Cyklen er udviklet til brugere, der har brug for mere stabilitet og ekstra sikkerhed. Den lave indstigningshøjde sikrer, at du nemt kan komme af og på. Tricyklen kan også tilpasses dine ønsker og behov, der er et stort tilbehørs katalog så du får cyklen til at opfylde dine behov. Huka City gør dig mere mobil og uafhængig!


FAABORG REHAB TECHNIC

+45 70 20 55 53
www.faaborg-rehab.dk



Ladning:

- Det er en fordel at lade batteriet så ofte som det er muligt.
- Hvis cyklen bruges dagligt, sæt cyklen til ladning efter endt brug.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 uge, anbefales det at tage laderen fra 24 timer efter endt ladning.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 måned skal den oplades i 24 timer 1 gang om måneden.

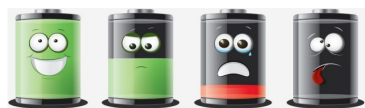

- Den bedste temperatur er ca. 20°.
- Laderen slår automatisk fra ved 0°.

Pleje af cyklen

Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionssikkerheden, og for at cyklen ser pæn ud. Derfor bør følgende punkter overholdes:

- Regelmæssig vedligeholdelse udført af en fagmand gør, cyklen bevarer sin værdi. Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader:
- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller svamp. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøringen, da det kan beskadige lejer, lak eller finish.
- Brug ikke skræppe rengøringsmidler.
- Lakskader skal udbedres straks.
- Dele, der er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et egnet konserverings- og plejemiddel, særligt op til og i vinterperioden.
- Lad ikke cyklen stå udenfor uden at være overdækket, Faaborg Rehab Technic ApS frasi-ger sig ethvert ansvar for misligholdelse af cyklen.
- Tjek altid om der er luft nok i dækket før du køre en tur. For lidt luft kan gøre cyklens træk evne svag og bruge mere strøm end nødvendigt.

Bemærk:

Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget ændringer/reparationer af personer, som ikke er godkendt eller anvist af Faaborg Rehab Technic ApS

Garantien dækker ikke almene sliddele.

Garantien dækker ikke hvis det første service efter 6 mdr. ikke overholdes. Det er dit ansvar at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS, når det er tid til service.

Du har også mulighed for at lave en service aftale med os, også kontakter vi dig når det er ved at være tid.. Prisen for et almindeligt service, uden reparationer, er typisk 1200,- + moms.

Hvis du efter læsning af denne brugervejledning savner svar på yderlige spørgsmål vedrørende din nye cykel, er du altid meget velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS

Politikken for Faaborg Rehab Technic ApS er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.

- 1 Batteri Kapacitet
- 2 Menu
- 3 Service
- 4 Digital hastigheds display
- 5 Hastighedstilstand, Max Hastighed (MAXS) , Gennemsnitlig hastighed (AVG)
- 6 Kilometer tal, Daglige kilometer (TRIP), Total kørte kilometer (TOTAL)
- 7 Data: Display dater, viser nuværende afstand
- 8 Gåhjælp
- 9 USB opladningsindikator, ikonet vises hvis en ekstern USB-enhed er tilsluttet
- 10 Bluetooth indikator
- 11 Displayet viser ikonet hvis lyset er tændt
- 12 Fejl indikator
- 13 Fejl kode indikator
- 14 Hastighedsenhed
- 15 Enhedsindikator
- 16 Resterende distance (RANGE)
- 17 Hjælpeniveau

