



Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

Madras

5,2 kg | 85x200x12 cm
HMI nr.: 101081
Varenr.: MDYF1078

Elektricitet

AC230V
50/60 Hz, 0,07A

Pumpe (inkl.)

2,3 kg | 29x20x11 cm
Cyklus tid:
10/15/20/25 min.

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

ProCare 3

Dynamisk trykaflastende topmadras

Den trykaflastende topmadras ProCare 3 består af 17 enkelte luftceller, der hver er 12 cm høje, og en integreret lomme til en skum-sikkerhedsmadras. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2 og 3.

Individuel tilpaning af cykustid

Trykket i madrassen indstiller man efter brugerens vægt og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket. Mulighed for indstilling til 15, 20 og 25 min.

Pumpefunktioner

Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Autofirm og statisk slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Hygiejnisk betræk

Betrækket er strækbart, det fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

| | |
|-----------------------------|---|
| Brugervægt | 40-180 kg |
| Madras-sammensætning | 17 single celler 12 cm høje |
| Materiale | Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt Celler: Nylon/PU, blå Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt |
| Funktion | Integreret ledningsholder. |
| Vedligeholdelse | Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og evt. reparation. |
| Pumpe | Lydsvag 10 komfortniveauer Dynamisk/statisk maxfirm seat inflate Audiovisuel alarm Panellås |