

# On Off


MANUEL ELLER ELEKTRONISK  
UNIKKE HJÆLPEMIDLER TIL PÅ- OG AFTAGNING  
AF KOMPRESSIONSSTRØMPER



Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

[www.bjorn-nielsen.dk](http://www.bjorn-nielsen.dk)

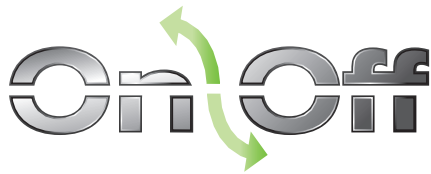

## **ON & OFF STOCKING SYSTEM**

er et unikt produktkoncept, som har sat nye standarder.

## **ON & OFF STOCKING SYSTEM**

består af 3 individuelle produkter/hjælpemidler.

**ON & OFF AKKU** kan endvidere anvendes i sengeleje.

### **1) ON & OFF MANUEL**

Produktet henvender sig til selvhjulpne brugere med mindre eller uden væsentlige funktionsnedsættelser.

On & Off manuel bruges til både på- og aftagning.

Anvendes primært til kompressionsstrømper str. medium & large, samt kompressionsstrømper 1 & 2.

Varenr.: B6601

HMI-Nr.: 77065

### **2) ON & OFF AKKU (MED/UDEN BRUG AF ON & OFF MANUEL)**

En benstøtte med hjælpende hænder. Kan anvendes ved påtagning i kombination med ON & OFF MANUEL. Vær opmærksom på størrelse og kompressionsklasse.

Brugergruppen er typisk personer med mindre funktionsnedsættelser, men hvor hjælp er påkrævet. Men også i høj grad for hjælperne i de forskellige arbejdsmiljøer (private hjem, hospitaler, ældrecentre, institutioner osv.).

Varenr.: (Akku & manuel) B6603

HMI-Nr.: 84788

### **VED BRUG UDEN ON & OFF MANUEL**

Benstøtten med de "hjælpende hænder", aflaster i særlig grad plejepersonalet, og giver samtidig brugeren en kontrolleret blid på- og aftagning. ON & OFF AKKU anvendes til alle typer af strømper og størrelser af ben, men er særligt til voluminøse og sarte ben. ON & OFF AKKU bruges sammen med traditionel glidestrømpe/stof, glidecreme, handsker etc.

Brugere med énhåndsfunktion o. lign, kan selvstændigt udføre aftagningen med ON & OFF AKKU. ON & OFF AKKU bruges fra hhv. stol og i sengeleje

Varenr.: B6602

HMI-Nr.: 84839

### **3) TAKE OFF ( MANUEL AFTAGNING )**

Et simpelt og enkelt hjælpemiddel der i et snuptag trækker strømpen af.

Bruges af en hjælper, det kan bl.a. være ægtefællen i hjemmet, eller af sundhedspersonalet.

Undgå opslidende arbejdssituationer for fingre, hænder og skuldre m.v.

Varenr.: B6605

HMI-Nr.: 101106



### ON & OFF MANUEL PÅ- & AFTAGNING

Logisk og simpelt at anvende. Hurtigt at pakke sammen i medfølgende taske. Vejer kun 1.100 gram. Har en god ergonomi, der letter anvendelsen og tager højde for eventuelle flekteringer i fod, hofte osv. Anvendes til str. medium & large/kompression 1 & 2



### ON & OFF AKKU AFTAGNING FRA STOL

On & Off opstilles enkelt, støttefoden vippes ud, sædepladen placeres på stolen. Strømpelåsene sættes på og den akkudrevne motor trækker langsomt og blidt strømpen af. Den kan betjenes af brugere med bl.a. enhåndsfunktion.



### TAKE OFF MANUEL AFTAGNING

Placer benet i god højde for bruger og hjælper, eks. på en fodskammel. Sæt strømpelåsene på strømpen, og hjælperen trækker let og hurtigt strømpen af ved blot at tage et skridt væk.



### ON & OFF AKKU PÅTAGNING FRA STOL

Ved str. medium & large, og max. kompressionsklasse 1 & 2 kan strømpebasen fra On & Off manuel anvendes, som monteres let på benstøtten, og den akkudrevne motor trækker blidt og kontrolleret strømpen på benet. Ved brug uden strømpebasen; placeres benet på benstøtten, der anvendes evt. glidestof eller creme, monteres på strømpen, og motoren fungerer som "hjælpende hænder" ved påtagningen. Skaber samtidig optimalt arbejdsmiljø for hjælperne.



### ON & OFF AKKU I SENGELEJE

Støttefoden vippes fremad og anvendes som støtte på den bløde madras. Benstøtten lægges op i sengen, og den benyttes herefter på samme måde som på- & aftagning fra stol.



### STIL DEN I SKABET - ELLER HA' DEN I TASKEN

Let og hurtigt at adskille og samle. Giver stor fleksibilitet for både brugere og hjælpere, kan pakkes sammen i medfølgende taske. Kan medbringes over alt. Hurtigt at gemme af vejen, kan placeres stående i skabet. Kan pakkes klar til brug næste gang.





### **LIVSKVALITET & VÆRDIGHED**

ON & OFF bidrager i særlig grad brugere med mindre eller ingen funktionsnedsættelser, til større livskvalitet igennem uafhængighed og fleksibilitet i hverdagen. Ligesom brugerne, som behøver helt eller delvist hjælp, også vil opleve en større etisk værdighed og ikke mindst, en kontrolleret blid på- og aftagning af kompressionsstrømper.



### **FRA ARBEJDSMAND TIL SUPERVISOR**

On & Off STOCKING SYSTEM vil i væsentlig omfang aflaste hjælperne i de dårlige og nedslidende arbejdssituationer, fordi processen foregår ved en benstøtte til aflastning, og elektronisk motorhjælp til på- og aftagningen.



### **FORVENTET ØKONOMISK EFFEKT**

Produktet skaber en meget stor samfundsmæssig ressource og økonomisk besparelse af hjemmebesøg, ved samtidig at en stor gruppe af disse brugere bliver helt eller delvist selvhjulpne. Hjælperne vil opleve et langt bedre arbejdsmiljø, med mindre sygefravær og nedslidning.

 Björn Nielsen  
Rehab & Hospitalsartikler A/S

**Björn Nielsen Rehab &  
Hospitalsartikler A/S**

Sønderbyen 7  
DK-9510 Arden  
Tel. +45 8692 7955  
Fax +45 8692 7027

mail@bjorn-nielsen.dk  
www.bjorn-nielsen.dk