



riftonTRAM



- ✓ FORFLYTNING
- ✓ GANGTRÆNING
- ✓ SIDDE TIL STÅ

Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

www.bjorn-nielsen.dk

TRAM FUNKTIONER

NYHED



KROPSSTØTTESYSTEM

Rifton TRAM har et innovativt støttesystem, der sikrer brugeren med et enkelt spænde. Denne enkelthed giver plejeren mulighed for at klargøre brugeren til en hurtig og sikker forflytning.




TRAM MED LAVT CHASSIS

Med 7,6 cm hjul-diameter og et lavere chassis kan den lave model alt det, som Rifton TRAM kan – og så kan den køres under senge med en frihøjde på kun 10,5 cm.



TILVALGT VÆGT

Med en tilvalgt vægt kan plejeren nemt og hurtigt veje brugeren under en forflytning, ligesom vægtbæringsniveauet og denne udvikling, kan måles under støttet gang.

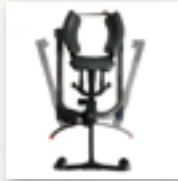

BENFORLÆNGERE

TRAM er kompakt med lav profil og kan nemt passere en døråbning på 76 cm. Forflytning til og fra nye og brede kørestole gøres nemmere ved at dreje benforlængerne. Låsbare forhjul for TRAM mobil og alligevel sikker.



FARVEKODEDE CLIPS

Hjælperen kan hurtigt montere metalringe i de fire clips. Clipsene er farvekodede for hurtig identifikation svarende til den skrevne journal/protokol for den enkelte bruger.



TRETRINS HÆVER

Den omhyggeligt konstruerede teleskoplift-søjle giver TRAM en lav profil, der giver brugerer sikkerhed og værdighed ved at give frit udsyn til hjælperen og omgivelserne. TRAM kan hæves højt nok til at støtte en gående bruger på 193 cm, for derefter at sænkes til 110 cm for kompakt opmagasinerung.



INDBYGGET OP/NED-KONTAKT

Hæv og sænk TRAM ved hjælp af en enkelt knap indbygget i det højre styrehåndtag. NB. TRAM er ikke beregnet til at løfte en bruger fra gulvet. Til dette benyttes SoloLift.



FORFLYTNING

Den mest citerede grund til at indføre hjælpemidler i hjemmet er vanskeligheder med toiletbesøg. TRAM gør forflytning til toilettet sikker og hurtig for hjælperen eller ægtefællen. Ydermere gør TRAMs alsidighed den til den perfekte sidde-til-stå løsning for brugeren, som behøver hjælp for at komme op og/eller støtte til at gå. TRAM er kompakt og fleksibel og dermed det ideelle hjælpemiddel i hjemmet.

GANGTRÆNING

TRAM er udstyret med en behagelig gå-sadel og yder sikker støtte ved gang uden at bruge mere plads eller mere personale. Sadelen fjerner brugerens frygt for at falde, hvilket giver brugeren øget fokus på essentielle opgaver, imens han/hun vedligeholder eller genvinder evnen til at gå. Uanset om det er til daglig træning eller mere krævende genoptræning, så gør TRAMs kombinerede sidde-til-stå funktion og støttede gangfunktion den til et vigtigt redskab i hjemmet og på institutionen.

SIDDE TIL STÅ

Evnen til at skifte mellem siddende og stående stilling er kritisk for brugerens uafhængighed og helbred. TRAMs gå-sadel gør det nemt for hjælperen at hjælpe en bruger med denne bevægelse – uanset hjælperens og brugerens størrelse. Med TRAM er skiftet fra siddende til stående og tilbage igen både sikker og enkel.

TILBEHØR TIL TRAM



riftonTRAM



Tilvalg af TRAM-vægten tillader hjælperen nemt at veje brugeren under en rutineforflytning uden at skulle lave en ekstra forflytning med henblik på vejning. Vægten kan desuden under støttet gang måle, hvor megen vægt brugeren bærer. Dette giver mulighed for at følge brugerens udvikling på dette felt. NB. Vægten skal tilvælges straks ved køb af TRAM. Den kan ikke monteres efterfølgende.



Retningslås af hjulene gør det muligt at køre TRAM gennem en gang uden træk til siden. Låsene kan monteres på hvilket som helst hjul, flere hjul eller alle hjul. To låse anses for tilstrækkelig til kørsel i ret linje. Låsen kan slås til og fra, så manøvrering på trang plads stadig er mulig.



Underarmsstøtter giver ekstra støtte ved løft af brugere, som har lav tonus eller som skal have deres arme fastspændt. Støtterne kan justeres i alle retninger og vinkler for at imødekomme alle brugeres behov.

Dimensioner	K305 small	K315 large
Padded surface area	11 x 18 cm	13 x 22 cm
Justeringsinterval (albue til knyttet hånd)	20-32 cm	27-41 cm



Gå-sadlen fås i tre størrelser og er beregnet til side-til-stå forflytninger og støttet gang. Hurtig montering ved at fæstne ringene til clipsene så farvekoderne passer. Bemærk, at gå-sadlen bedst passer brugeren hvis selerne er krydset som på foto.

Brugermål	
Nøglemål for bruger: Halv lårets omkreds	
K306 small	10-20 cm
K316 medium	20-36 cm
K326 large	25-46 cm



Lårsele benyttes til siddende forflytning. De er maskinvaskbare for optimal hygiejne, og der følger et sæt med hver TRAM. Ekstra sæt kan tilkøbes, hvis der er et behov i forbindelse med vaske rutiner eller lignende. Selerne er fremstillet af vandafvisende coated nylon og er farvekodede for nem og fejlfri montering.

SÅDAN BESTILLER MAN RIFTON TRAM

1) Vælg model (standard eller lav model)

Vælg derefter med eller uden vægt. Med hver TRAM følger to lårseler, et batteri, en batterilader, en brugervejledning og en tilbehørstaske.

2) Vælg yderligere tilbehør efter behov



Brugermål (cm) K310 STD K320 LAV

Omkreds: 56-152 56-152

Brugers mål: Omkreds

Vigtigt: brugers vægt eller højde må ikke overstige henholdsvis 160 kg og 193 cm

Tram mål (cm) K310 STD K320 LAV

Længde total: 116 samme

Bredde total: 70-102 samme

Højde total: 110-147 samme

TRAM vægt: 32 samme

Vendediameter: 127 samme

Gulv til top af chassis (passage under møbler): 17,5 10,5

Min. højde til brugers armhuler (gående/stående): 77 samme

Max. brugerhøjde (gående/stående): 193 samme

Max. arbejdsvægt: 160 Samme

K310 Standard **NY! K320 Lav**

HMI-nr. 84816 HMI-nr. 84896

PÅKREVEDE DELE			K310 Standard	NY! K320 Lav	
	VÆLG	Tram inkluderer to lårseler, et batteri, batterilader og Rifton tilbehørstaske	<input type="checkbox"/> K301	<input type="checkbox"/> K321	
		Tram med vægt	<input type="checkbox"/> K302	<input type="checkbox"/> K322	
	VÆLG	El-kabel til batterilader	US standard Ej DK	<input type="checkbox"/> K303	
			Europæisk standard	<input type="checkbox"/> K304	
	VÆLG	Underarmsstøtte (sæt)	Small	<input type="checkbox"/> K305	
			Large	<input type="checkbox"/> K315	
	VÆLG	Gå-saddel (anbefales til gang og stand)	Small	<input type="checkbox"/> K306	
			Medium	<input type="checkbox"/> K316	
			Large	<input type="checkbox"/> K326	
		Ekstra batteri (anbefales til institutionelt brug)	<input type="checkbox"/> K307	<input type="checkbox"/> K307	
		Ekstra lårseler	Enkelt	<input type="checkbox"/> K318	<input type="checkbox"/> K318
	VÆLG	Retningslås	Par	<input type="checkbox"/> K308	<input type="checkbox"/> K308
			Enkelt	<input type="checkbox"/> K309	<input type="checkbox"/> K323
	VÆLG		Par	<input type="checkbox"/> K319	<input type="checkbox"/> K324
			Enkelt	<input type="checkbox"/> K309	<input type="checkbox"/> K323

Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S

Sønderbyen 7

DK-9510 Arden

Tel. +45 8692 7955

Fax +45 8692 7027

mail@bjorn-nielsen.dk

www.bjorn-nielsen.dk