

PENISPUMPE

TIL REJSNINGSPROBLEMER



**HVER
ANDEN**

mand over 40 år
oplever rejsnings-
problemer

6LIV
med
ELSE O

PENISPUMPE

En penispumpe, erektionspumpe og vakuumpumpe er det samme. Hos sexolog ElseOshop.dk forhandles nogle af de bedste pumper på markedet. Der virker til det, de skal - at skabe en rejkning. Ved hjælp af vakuum, suges blod ud i svulmelegemerne og der skabes en rejkning, som bevarer med en penisring. En penispumpe virker uanset årsagen til rejkningsproblemerne - også selvom der er skader i nerver i blodkar. Pumperne er CE-godkendte og godkendte som seksuelle hjælpemidler.

AUTOMATISK *Penispumpe*



MANUEL *Penispumpe*



De viste penispuimper kan købes på www.ElseOshop.dk.

FORBERED PENISPUMPEN



- 1 Saml penispuimper trin for trin. Brugsvejledning medfølger.



- 2 Påsæt en penisring. Du er klar til at bruge penispuimper.

BRUG AF PENISPUMPEN

Der medfølger brugsvejledning på dansk. Du er også altid velkommen til at kontakte mig eller se mere på min Youtube kanal eller på min hjemmeside www.erektionspumpe.dk.



- 1** Start altid med at påføre en glidecreme.



- 2** Pres pumpen tæt ind mod kroppen og begynd at pumpe.



- 3** Der skabes vakuum i cylinderen, og penis bliver erigeret.



- 4** Glid ringen af pumpen og ned over roden af penis.



- 5** Penisringen sørger for at holde rejstningen. Max 30 minutter.



- 6** Efter brug fjernes penisringen. Brug glidecreme til dette.



ELSE O

Indehaver af www.ElseOshop.dk

Uddannet sexolog og sygeplejerske
Ekspert i seksuelle hjælpemidler
Specialist i sexologisk rådgivning (DACS)
Parterapeut
Eksamineret psykoterapeut MPF

Kontakt: mail elseo@elseo.dk eller tlf.: 40 44 02 37

WWW.ELSEOSHOP.DK

