



Zibo Athene

...gør en forskel

Tekniske data

Madras

7,5 kg | 85x200x20 cm
HMI-nr.: 88096
Varenr.: MDYF1140

Pumpe (inkl.)

2,2 kg | 29x20x11 cm
Cyklus tid:
10/15/20/25 min.

Elektricitet

AC230V
50/60 Hz, 0,07A

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra



ProCare 4

Dynamisk trykaflastende helmadras til højrisko

Den dynamiske helmadras ProCare 4 består af 20 enkelte luftceller, der hver er 20 cm høje. Denne patenterede opdeling kaldes 'Cell-on-Cell'. 9 af cellerne har LOW-AIR-LOSS funktion, som bortleder både fugt og varme og på den måde holder brugerens hud tør.

Madrasen anvendes forebyggende og behandlende ved kategori 1, 2, 3 og 4.

Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller man efter brugerens vægt og pumpen kan køre i en cyklus med et tidsinterval på 10 til 25 min., som skiftevis øger og letter trykket.

Betræk med glidefunktion

Betrækket er 2-lags oversize med indbygget "glidefunktion", der forbygger shear og friktions kræfter. Kan leveres med guillettet, åndbart betræk. Betrækket fastgøres med lynlås på alle sider af madrassen og er semi-permeabelt, så huden kan ånde igennem.

Pumpefunktioner

Pumpen kan desuden indstille trykket til at være statisk eller til siddefunktion. Hvis trykket er for lavt, går en alarm i gang. Autofirm-funktionen gør madrassen fast ved pleje og slår automatisk fra efter 20 min.

Hælaflastning

De 5 celler i fodenden kan afkobles uden brug af propper. De lukker automatisk.

Rengøring

Madrasen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Brugervægt	40-200 kg
Madras	20 cell-on-cell luftceller
Materiale	Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt Celler: PU, klare/lyseblå Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt
Pumpe	Lydsvag 10 komfortniveauer Dynamisk/statisk Audiovisuel alarm Panellås
CPR-funktion	Drejeknap
Praktisk anvendelse	Med ledningsophæng