

CareCube™ Sårpleje System


Oppustelig Pude til Løft og Understøtning af Ben i Forbindelse med Sårpleje



- Let at placere, da CareCube bliver helt flad, når den suges tom for luft.
- Løfter og holder benet under behandling
- 3 Forskellige løftehøjder og dimensioner → Passer til alle behandlingssituationer
- Fås også i "mini-udgave", som er ideel ved sårpleje i sengen.
- Fyldes eller tømmes på bare 20 sekunder.
- Vejer kun 3,2 kg alt inklusive → Let at transportere
- Let at rengøre / desinficere
- Kan "erstatte" sygeplejerske nr. 2 f.eks. ved skift af kompressionsforbindinger
- Så billig, at hver patient kan tildeles en CareCube så længe behandling pågår. Herved elimineres risiko for smitte med MRSA fra borger til borger
- CareCube er også ideel ved påsætning og aftagning af kompressionsstrømper
- **Max løftevægt: 100 kg**

CareCube™ er et nyt epokegørende hjælpemiddel, som gør det muligt at gennemføre pleje af ben- og fodsår uden nogen form for belastning af sygeplejersken, hverken i forbindelse med løft af patientens ben til den ønskede arbejdsposition eller i forbindelse med understøttelse af benet under behandling. Slut med akavede manuelle løft og belastning, når benet skal bibeholdes i den rette position under plejen.

CareCubes unikke design gør det **altid** muligt at løfte patientens ben til den rette og mest komfortable højde – uanset om patienten behandles siddende, liggende på ryggen eller liggende på siden. Målene på CareCubes sider passer til den gennemsnitlige længe på henholdsvis femur, tibia og pelvis, hvorfor såvel høje som små patienter kan behandles med et og samme hjælpemiddel i de 3 typiske behandlingsstillinger.

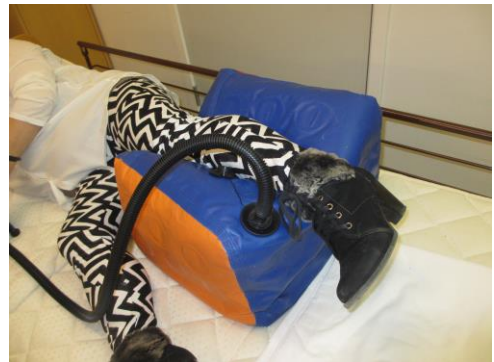

CareCube er også stabil, når den kun er delvist oppustet. Det betyder, at man altid kan få præcis den ønskede løfte- & behandlingshøjde.

Afhængigt af, hvordan CareCube vendes, er der altid ideel adgang til de behandlingskrævende område – uanset om det er ved fodsål, tæer, hæl eller på skinneben.

Teknisk Data:

Materialer:

Pude:	Ftalat-fri PVC & Polypropylen
Kompressor:	PP + elektronik
IP beskyttelse, pude:	IPX6
IP beskyttelse, kompressor:	IPX1
Maksimal kontinuerlig drift:	10 minutter
Maximalt støjniveau:	80 DB
Net kabels længde:	3 meter
Strømforsyning:	230V~50Hz
Styrke:	400W
Max lufttryk:	150mbar / 2,2 PSI
Max luftstrøm:	950 l/Min

Rengøring:

CareCube:

- Til daglig rengøring anbefaler vi aftørring af puden med wet-wipes enten med anti-bakterielle ingredienser eller med alkohol. Dette gøres lettest, når puden er oppustet.
- Det er også muligt at vaske CareCube Pudene i automatiske vaskeanlæg eller med mættet vanddamp i op til 1 minut ved 90° Celsius, op til 5 minutter ved 85° Celsius eller op til 10 minutter ved 80° Celsius.

Kompressor:

- Til daglig rengøring anbefaler vi aftørring af kompressor, net ledning og luftslange med en hårdt opvredet klud med almindeligt rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud.

Mål & Vægt:

CareCube2 Pude:

Højde, oppustet:	30 cm
Bredde, oppustet:	40 cm
Længde, oppustet:	48 cm
Vægt:	1,1 kg

CareCube Mini Pude:

Højde, oppustet:	20 cm
Bredde, oppustet:	28 cm
Længde, oppustet:	34 cm
Vægt:	0,6 kg

CareCube Kompressor:

Højde:	15 cm
Bredde:	12 cm
Længde:	15 cm
Vægt:	0,9 kg

Vægt komplet i rygsæk: 3,2 kg

Max belastning (SWL): 100 kg

CareCube2 Sårplejesystem:

Ordre Nr.:	CC 12C92
HMI-Nr.:	88501

CareCube Mini Sårplejesystem:

Ordre Nr.:	CC 12C94
HMI-Nr.:	88515

CareCube er CE-mærket i henhold til ISO/EN 12182:2012

CareCube er patentanmeldt. CareCube er et varemærke (™) som tilhører producenten.



WINNOCARE
N o r d i c