



Anatomic
SITTTM
- Få balance i kroppen



Siddesystem til børn/unge/voksne

Zitzi

DELFI PRO



Zitzi

SHARKY PRO





Dynamisk siddestilling


Trin 1. Bækken- & benpositionering

Kombinationen af, korrekt indstillet siddesystem, optimal sædebrønd, effektivt hoftebælte og en velstøttet sacrum giver forudsætningerne for at mindske shear og fremadskridning, hvilket understøtter aktivitet og postural kontrol. Sædedelen er trinløs justerbar i sædedybde og abduktion/adduktion hvilket muliggør optimal individuel siddestilling og samtidigt lader brugeren vokse med siddesystemet.




Trin 2. Hoftebæltets placering

Et korrekt indjusteret positioneringsbælte giver forudsætning for at positionere bækkenet og mindske risikoen for fremadskridning/bagud kippet bækken. Vi tilbyder positioneringsbæltter i flere forskellige materialer, modeller og størrelser.

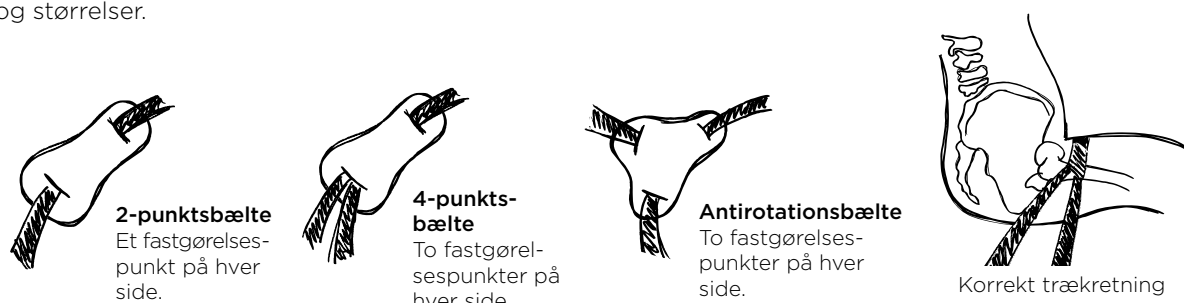

Trin 3. Trepunkts-positionering

Justerbare kropsstøtter sammen med eksempelvis hoftestøtte skaber en god forudsætning for at positionere overkroppen hvilket mindsker risikoen for fejlstilling. God postural kontrol leder til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har hermed muligheden for både at korrigere samt bibeholde positioneringen af overkroppen.

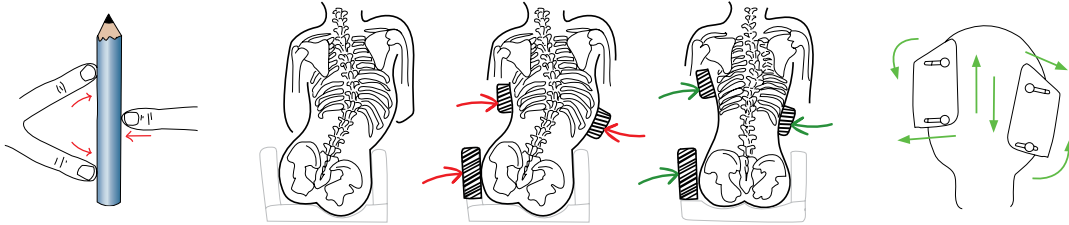


Positioneringsseler

Sammen med hoftebæltet giver sternumstøtten eller H-selen en god støtte til at positionere overkroppen, hvilket giver forudsætninger for bedre hovedkontrol.



Sternumstøtte


- Koncentreret støtte over sternum
- Modvirker fremadfald

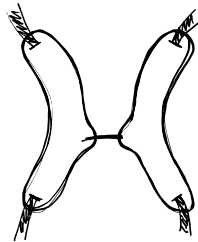

H-sele

- Holder skulderpartiet på plads samt modvirker rotation
- Passer godt til eksempelvis dem, som bruger sonde

Trin 4. Flex-funktion/Hoftevinkeljustering

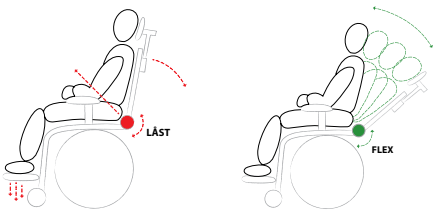

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation samt kan give en beroligende effekt ved extensions-spasticitet. Ryggen er stilbar i hoftevinkel og siddesystemet er udstyret med et flex-led, hvilket gør ryglænet fleksibel. I stedet for at brugeren presser imod en fast ryg og bækkenet glider frem, opnår man den fordel med flexryggen, at ryggen på stolen bevæger sig bagud med brugeren og brugeren "kommer af" med sin spasticitet.

Trin 5. Hovedpositionering/Eksempel



Aktivt pandebånd



HeadActive



Heads Up



Pro Serie



Zitzi Delfi Pro/Sharky Pro

Siddesystem for børn/unge/voksne

Siddesystemet er specielt udviklet til brugere med siddestillingsproblematikker.

Tilbydes i 7 størrelser og har mange muligheder for at kunne tilpasses til en bred målgruppe, også til dem, som er smalle og lange.

Siddesystemet vokser med brugeren.

Delfi Pro findes i 5 størrelser og passer brugere i højden ca. 60-170 cm

Sharky Pro tilbydes i 2 størrelser og passer brugere i højden ca. 150-195 cm.

- Stort udvalg af tilbehør.
- Store justeringsmuligheder, vokser med brugeren.
- Er både til indendørs- og udendørs brug.
- Brugervenlig.
- Crachtestet og godkendt.
- Værktøj til justering af bl.a. fodstøtte, kropstøtte og armlæn, er integreret i ryggen og dermed altid lige ved hånden.



Alle vores betræk er vaskbare på 60°

OBS!

Vælg forstærket ryg, når brugeren har høj tonus.



Zitzi Delfi Pro

| | |
|------------------|----------|
| Størrelser | 5 str. |
| Abduktion | -9/+18° |
| Max brugerlængde | 170 cm |
| Max brugervægt | 90 kg |
| Axilhøjde | 17-40 cm |
| Kropsbredde | 14-31 cm |
| Sædebredde | 24-38 cm |
| Sædedybde | 14-45 cm |




Zitzi Sharky Pro


| | |
|-----------------|------------|
| Størrelser | 2 str. |
| Abduktion | 18° |
| Brugerlængde | 150-195 cm |
| Max brugervægt | 130 kg |
| Kropsbredde | 27-38 cm |
| Brystkassedybde | 21-25 cm |
| Sædebredde | 36-49 cm |
| Sædedybde | 37-55 cm |




Tilbehør Zitzi Delfi Pro

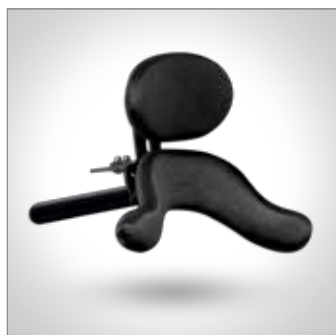


ProSerie enkel nedre

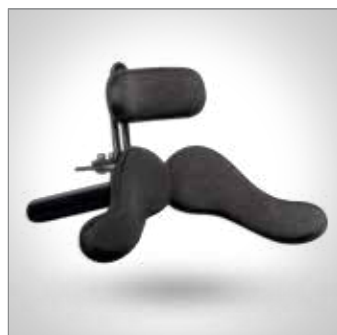


ProSerie Junior

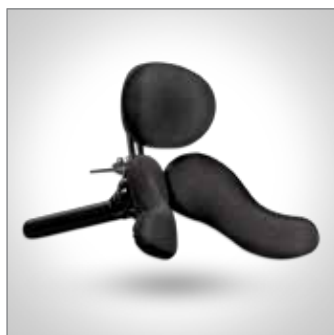

ProSerie Voksen

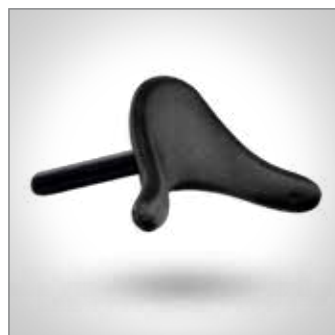


ProSerie Mini

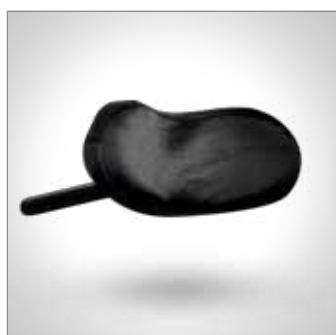

ProSerie Plush




Standard hovedstøtte

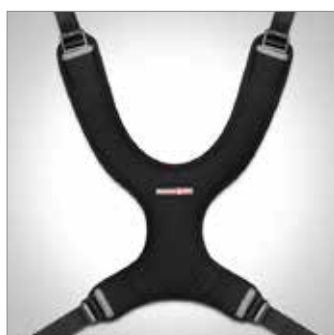


Sternumstøtte Pro



H-Sele Pro

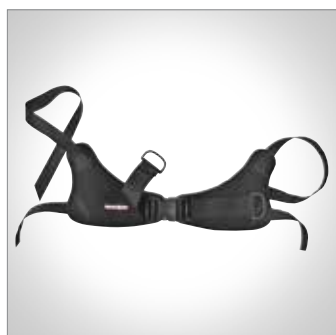

Antirotationsbælte

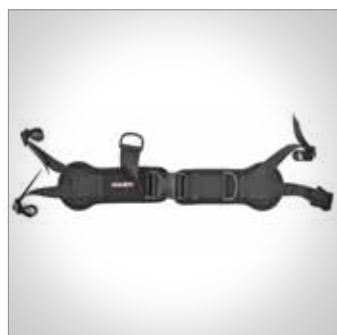

Hoftebælte




Bord




Dæklade til bord



Albuestop

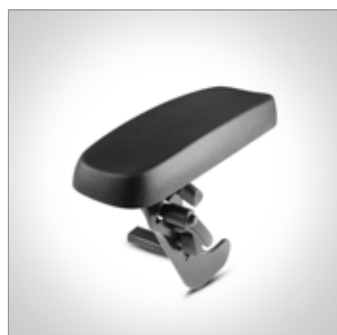

Armlæn

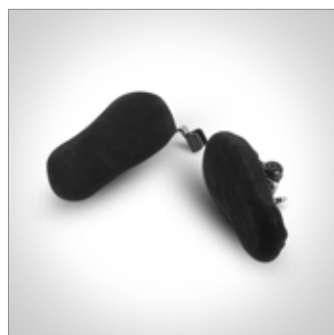

Bækkenstøtte



Hoftestøtte



Fodstøtte




Delt fodstøtte



Justerbar fodstøtte



Delt justerbar fodstøtte

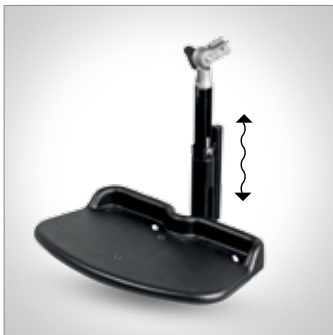

Flex fodstøtte



Fodstøttespolstring



Lægplader



Fodkasse




Lægpladespolstring




Ankelbespænding



Fodrem

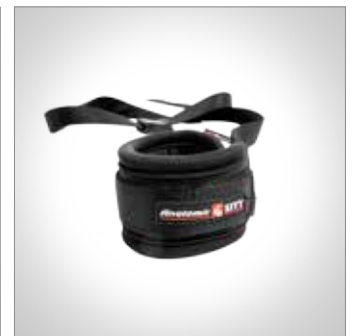

Armbind

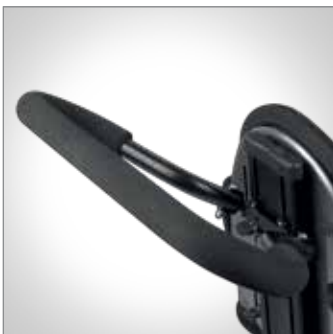

Kørebøjle



Adapterplade



Fæsteplade



Legebøjle

Tilbehør Zitzi Sharky Pro



Sternumstøtte Pro



H-sele Pro




Antirotationsbælte



Hoftebælte



Justerbar ryg

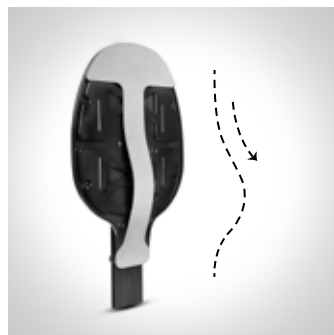

Integreret lændestøtte



Armlæn, monteret på sædedel




Armlæn, monteret på ryg



Vipbare armlæn,
monteret på stel



Albuestop

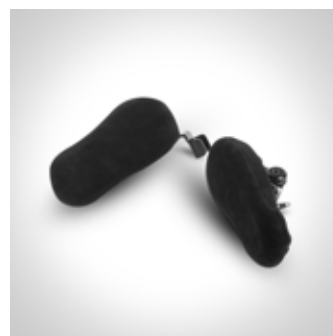

Bækkenstøtte



Fodstøtte delt opklappelig



Fodstøttespolstring



Lægplade




Polstring (grå/brun)



Alcantara polstring (sort)




Hovedstøtte

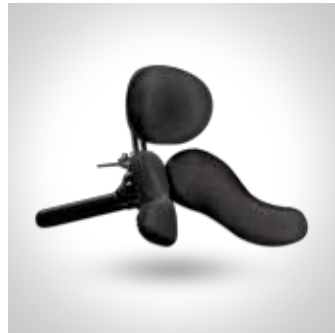

ProSerie Voksen




ProSerie Plush

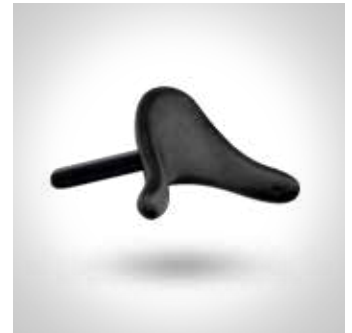

ProSerie Mini



Pandebånd

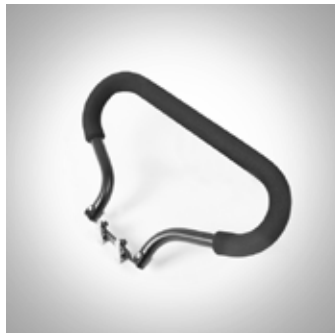

Kørebøjle



Kaleche



Adaptersystem



Bord



Opklappelig bord



Bord, forstærket



Fodrem



Hoftestøtte



Regnslag



Armstøttesplade special

Målguide

Delfi Pro

Hvilken størrelse på siddesystem, bør jeg vælge?

Delfi Pro str. 0 - ca. 14-20 cm i sædedybde / længde ca. 60-80 cm

Delfi Pro str. 1 - ca. 17-27 cm i sædedybde / længde ca. 70-100 cm

Delfi Pro str. 2 - ca. 23-33 cm i sædedybde / længde ca. 90-130 cm

Delfi Pro str. 3 - ca. 30-40 cm i sædedybde / længde ca. 120-160 cm

Delfi Pro str. 4 - ca. 35-45 cm i sædedybde / længde ca. 140-170 cm

Hvilken størrelse på kørestolsstel, bør jeg vælge?

Delfi Pro str. 0 - Flipper Pro str. 1 / Guppy str. 1

Delfi Pro str. 1 - Flipper Pro str. 1 / Guppy str. 1

Delfi Pro str. 2 - Flipper Pro str. 2 / Snapper / Guppy str. 1

Delfi Pro str. 3 - Flipper Pro str. 3 / Snapper / Guppy str. 1

Delfi Pro str. 4 - Flipper Pro str. 3 / Snapper / Guppy str. 2 / Seabass str. 1

Sharky Pro

Hvilken størrelse på siddesystem, bør jeg vælge?

Sharky Pro str. 1 - ca. 45-55 cm i sædedybde / længde ca. 150-180 cm

Sharky Pro str. 2 - ca. 50-60 cm i sædedybde / længde ca. 170-195 cm

Hvilken størrelse på kørestolsstel, bør jeg vælge?

Sharky Pro str. 1 - Flipper Pro str. 3 / Snapper / Seabass str. 2

Sharky Pro str. 2 - Flipper Pro str. 3 / Snapper / Seabass str. 3





Zitzi **PENGY**

Pengyvognen har en indbygget affjedring, som gør at den ruller jævnt, selv på ujævne overflader. Udstyret med terrænhjul, hvilket er en stor fordel om vinteren eller på skovturen. Pengyvognen kan med et snuptag klappes sammen og låses i denne position. Hermed lettes transport i bil og opbevaring.

| | |
|------------------------|---------------|
| Størrelser | 1 stk. |
| Crashtestet | Godkendt |
| Farve | Sort |
| Vægt | 12 kg |
| Belastningsvægt | 50 kg |
| Tilt | -23° til +40° |
| Sædehøjde | 54 cm |
| Hjul, svingbare | 7", 12" |



ZITZI GUPPY

Zitzi Guppy er udviklet til at passe til de fleste siddesystemer, heriblandt formstøbte sæder.

Forskellige hjul tilbydes, for at imødekomme forskellige behov.

| | |
|------------------------|--------------------|
| Størrelser | 2 stk. |
| Hjul | 16", 20", 22", 24" |
| Belastningsvægt | 70 kg |
| Tilt | 0-32° |
| Sædehøjde | 46 cm |
| Farve | Sort |
| Vægt | 14 kg |
| Crashtestet | Godkendt |



Zitzi **SEABASS PRO**

Velbalanceret kørestolsstel som passer med flere forskellige siddesystemer inkl. formstøbte sæder.

Samtlige drivhjul har quick-release funktion og tilbydes både som luft og massive.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Størrelser | 3 stk. |
| Hjul | 12", 16", 20", 22", 24" |
| Belastningsvægt | 135 kg |
| Tilt | 35° |
| Sædehøjde | 41/46 cm |
| Farve | Sort |
| Vægt | 20 kg |
| Crashtestet | Godkendt |



Zitzi **FLIPPER PRO FLEX**

Flipper Pro Flex er både til indendørs- og udendørsbrug. Vælg mellem 12" eller 16" hjul. Kørestolsstellet har også tilt, ved hjælp af gaspatron.

Tilbydes i en elektrisk eller en manuel udgave. Tilt in space forbedrer vægtfordelingen.

| | |
|------------------------|-----------|
| Størrelser | 1 stk. |
| Modeller | 2 stk. |
| Belastningsvægt | 95 kg |
| Tilt | 30° |
| Højdejustering | 29-65 cm* |
| Totalbredde | 63 cm |
| Totallængde | 81 cm |
| Vægt | 31 kg |

* Målene angiver stelhøjden og ændres alt efter hvad du vælger af siddesystem.



Zitzi **FLIPPER PRO**

Kørestolsstellet har 125 mm hjul for enkelt at kunne rulle over tæppekanter, dørtrin og andre forhindringer.

Stellet tilbydes i to varianter mht. hæve- og sænkemekanisme, nemlig som elektrisk eller manuel. Tilt in space forbedrer vægtfordelingen.

| | |
|------------------------|--------|
| Størrelser | 3 stk. |
| Belastningsvægt | 75 kg |
| Tilt | 30° |
| Højdejusterbar | Ja |
| Sædehøjde (min) | 21 cm* |
| Sædehøjde (max) | 61 cm* |
| Hjul, standard | 125 mm |

* Målene angiver stelhøjden og ændres alt efter hvad du vælger af siddesystem.



SNAPPER

Kørestolsstellet har 100 mm hjul for enkelt at kunne rulle over tæppekanter, dørtrin og andre forhindringer. Desuden er hjulene udstyret med retningsholdere. Tilt in space forbedrer vægtfordelingen.

| | |
|------------------------|----------|
| Størrelser | 1 stk. |
| Belastningsvægt | 50-75 kg |
| Tilt | +3/-22° |
| Højdejusterbar | Ja |
| Sædehøjde (min) | 46 cm* |
| Sædehøjde (max) | 62 cm* |
| Hjul, standard | 100 mm |

* Målene angiver stelhøjden og ændres alt efter hvad du vælger af siddesystem.



Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov
Telefon 86 17 01 74
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomicsitt.dk