

VICAIR®

Vicair® Adjuster O2



Vaskbar Vicair pude med optimal trykaflastning og justeringsmuligheder



Vicair® Adjuster O2

Vicair Adjuster O2 er en ny og forbedret *Vicair* pude med 5 kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering.


Vicair Adjuster O2 har optimale justeringsmuligheder ved komplekse positioneringsbehov for fx asymmetrisk benlængde eller bækkenstilling, fremadskridning og shear.



Let vedligeholdelse

Vicair puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **Smartcells™**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens former og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Når **Vicair Adjuster O2** skal rengøres lægges hele puden inklusiv celler i vaskemaskinen ved 60°C, og puden lufttørres fx natten over.

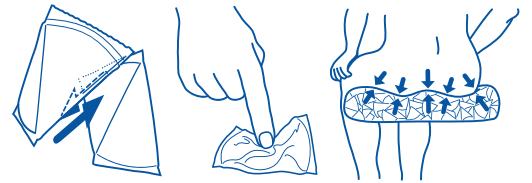

Betræk

Standard betrækket er åndbart, komfortabelt og strækbart og fås i sæt med 2 stk, så der altid er et rent betræk. Standard betrækket trækkes ud over puden.

Inkontinensbetrækket er ligeledes åndbart og strækbart - lukkes omkring puden med lynlås.

Begge betræk er forsynet med en lille åbning bagtil, som den blå strop kan trækkes igennem. Når den blå strop er synlig, ved man, at puden ligger korrekt i betrækket.



Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Størrelser	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af pude inkl. betræk	Rengøring af betræk	BARIATRIC SOLUTIONS
Vicair Adjuster O2 se skema nedenfor	0,5 - 0,85 kg	250 kg	60°	90°	

Størrelser, mm (b x d)		Størrelser, mm (b x d)		Størrelser, mm (h)
350 x 400	x	450 x 450	x	60/100
400 x 400	x	400 x 500	x	
400 x 450	x	450 x 500	x	
430 x 430	x	500 x 450	x	
450 x 400	x	500 x 500	x	

Vicair Adjuster O2 puder leveres i en række specialstørrelser.

Kontakt Invacare for bestilling.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37,
2605 Brøndby
Denmark

Betræk

Sort

