



Knud Bremses stol varenr. 500-401

Knud Bremses stol er udviklet til rehab med fokus på sikkerhed, ergonomi, kvalitet og funktion. Bruger vægt max 160 kg.

Af sikkerhedsmæssige årsager, er stolen automatisk låst. For at køre med stolen, holder man let i et håndtag under sædet. Når håndtaget slippes, er stolen atter låst.

Betræk: Fås i ægte læder, stof eller inkontinens betræk med færre syninger. Betrækket er Dolce som også tåler afspritning.



Fås med høj eller lav ryg. På billedet er det høj ryg. Det lave ryg, har en indbygget lændestøtte. Sædet er formstøbt og giver en god støtte og har afrundet forkant, så der ikke er noget der låser for blodomløbet. Sædet måler 45 cm i bredden og 42 cm i dybden. Stolen fås i flere størrelser målt fra gulv til underkant af sæde. 32-39 cm, 41-53 cm og 42-57 cm.

Funktion:

Under sædet har du 4 håndtag. Der er 3 håndtag der er ens, og så er der et der er kortere og bredere. Den er enten sort eller rød. Dette er bremsehåndtag.

Højdejustering: Håndtag i venstre side. Hold håndtaget oppe, mens du enten letter dig eller lægger vægt i, for at ændre højden på stolen.

Sædeklip: Forreste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, er sædet låst op og kan tippe frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse den ønskede position. Kan du ikke få den til det, skyldes det at ryglænet er for langt fremme. Stå evt. af stolen, og tip det med hænderne, og lås så ved at tage håndtaget ned.

Ryglæn: Bagerste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, følger ryglænet dig frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse i ønsket position. Bagpå stolen, sidder der en håndskrue, til højdejustering af ryglænet.

Bremse: Det er sort eller rødt og sidder i højre eller venstre side. Hold håndtaget oppe, for at køre, samt dreje med stolen. Når du slipper håndtaget, er stolen låst. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager. Stolen er automatisk låst, når du ikke røre håndtaget.

Vi giver 5 års garanti på stolen.