

FLOW

Brugervejledning



 **access**
Business Development Division

A Division of ThyssenKrupp Access Ltd.

© 2014 ThyssenKrupp Accessibility BV

Version 2.0

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne og illustrationerne kan blive ændret uden forudgående varsel. ThyssenKrupp Accessibility BV påtager sig intet ansvar for ændringer eller tastefejl.

Med forbehold for de undtagelser, der er fastlagt ved lov, må dette dokument og/eller dets indhold hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres og/eller offentliggøres på tryk, ved fotokopiering, på mikrofilm, elektronisk eller på anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra ThyssenKrupp Accessibility BV.

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	5
1.1	Vejledningen	5
1.2	Symboler	5
1.3	Tilsluttet brug	5
2	Sikkerhed	6
2.1	Sikkerhedsadvarsler	6
2.1.1	Brugeren	6
2.1.2	Trapper og stolelift	6
2.1.3	Vedligeholdelse	7
3	Beskrivelse	8
3.1	Stolelift	8
3.2	Betjeningsselementer	8
3.2.1	Betjeningspanel på armlænet	8
3.2.2	Tilkald-og-stop-stationer	9
3.2.3	Elektronisk sænkeanordning/hovedafbryder	10
3.3	Ekstraudstyr	12
3.3.1	Betjeningspanel til plejeren	12
3.3.2	Drejesæde	13
3.3.2.1	Manuelt drejesæde	13
3.3.2.2	Automatisk drejesæde	13
3.3.3	Bensele til handicappede	14
4	Brug	15
4.1	Sådan klapper man sædet ned og sætter sig	15
4.2	Bevægelse af stolelift	16
4.3	Nødstop	16
4.4	Sådan står man op og klapper sædet sammen	17
4.5	Nulstilling af stolelift	17
5	Vedligeholdelse	18
5.1	Rengøring af stolelift	18
5.2	Udskiftning af batterierne	18
5.2.1	Betjeningspanel på armlænet (kun RF-modeller)	18
5.2.2	Tilkald-og-stop-stationer	19
5.3	Vedligeholdelsestimer	20

6	Signaler	21
6.1	Signaler på motorhuset	21
6.2	Signaler på betjeningspanelet på armlænet.....	21
6.3	Signaler på tilkald-og-stop-stationer.....	22
7	Tekniske data	23
8	EF-overensstemmelseserklæring.....	24
9	Kontaktoplysninger.....	25

1. Indledning

1.1 Vejledningen




Denne vejledning indeholder en beskrivelse af alt det udstyr, der fås til Flow2-stoleliftten. Alle funktioner er muligvis ikke tilgængelige til den model, du har installeret derhjemme.

Betegnelserne "venstre", "højre", "front" og "bag" bruges til at identificere bestemte dele af stoleliftten.

Udgangspunktet er altid din placering som bruger, når du sidder i stoleliftten.

Betegnelserne "stoppested" og "ladested", henviser normalt til det samme sted. Når der henvises til parkering, anvendes betegnelsen "parkeringssted". Når der henvises til opladning, anvendes betegnelsen "ladested".

1.2 Symboler

	ADVARSLER	"ADVARSEL" vil sige, at der er risiko for kvæstelser eller dødsfald, hvis anvisningerne ikke følges.
	FORSIGTIG	"FORSIGTIG" vil sige, at der er risiko for skader på udstyret, hvis anvisningerne ikke følges.
	BEMÆRK	"BEMÆRK" anvendes i forbindelse med supplerende oplysninger.

1.3 Tilsigtet brug

Stoleliftten er beregnet til at transportere én bevægelseshæmmet person op og ned ad trappen. Stoleliftten kan bruges til lige trapper og til buede trapper. Stoleliftten er kun beregnet til indendørs brug.

Stoleliftten kører på en elektrisk motor, som drives af genopladelige batterier, der er placeret i motorhuset. Batterierne oplades på ladestederne ved toppen og bunden af trappen eller på mellemliggende etager. Som alternativ kan batterierne også oplades ved et ekstra ladested.



BEMÆRK

Kun RF-modeller: Betjeningspanelet på armlænet bruger 2 C/R14-batterier, som skal udskiftes fra tid til anden. . Se afsnit 5.2 "Udskiftning af batterierne".

Stoleliftten kan betjenes på to måder:

- Brug betjeningspanelet på et af armlænenene, mens du sidder i stoleliftten.
- Hvis stoleliftten ikke er på det ønskede sted, kan du bruge tilkald-og-stop-stationer ved toppen og bunden af trappen.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsadvarsler

ThyssenKrupp Accessibility BV bærer ikke ansvaret for kvæstelser eller skader, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne i denne vejledning.

2.1.1 Brugeren

- Læs vejledningen grundigt igennem, inden du bruger stoleliften. Brug kun stoleliften, hvis du er fortrolig med sikkerhedsadvarslerne og brugsanvisningen.
- En autoriseret tekniker demonstrerer, hvordan man betjener stoleliften. Du er velkommen til at stille teknikeren alle dine spørgsmål. Sørg for, at du forstår alle procedurer, inden du bruger stoleliften.
- Opbevar vejledningen i nærheden af stoleliften, så du kan bruge den som reference. Gem telefonnummeret til servicecentret i eller i nærheden af din telefon.
- Stoleliften er kun beregnet til at blive brugt af voksne, som har læst og forstået hele vejledningen.
- Børn og brugere med nedsatte mentale evner må kun bruge stoleliften under opsyn.
- Hold børn væk fra stoleliften. Lad ikke børn lege med stoleliften.
- Brug ikke stoleliften til at transportere mere end én person ad gangen.
- Brug ikke stoleliften, hvis du vejer mere end den maksimalt tilladte vægt: 125 kg (275 lbs).

2.1.2 Trapper og stolelift

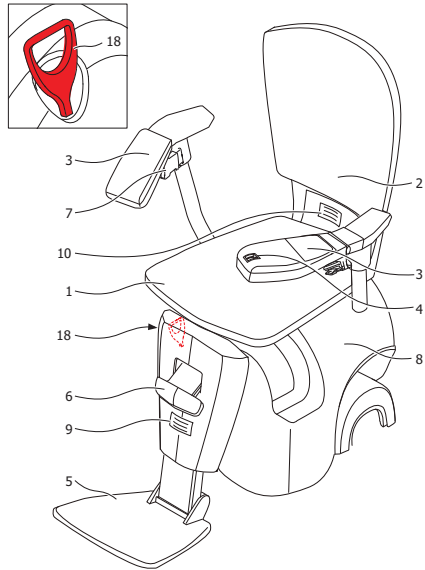
- Brug ikke stoleliften i tilfælde af ildebrand eller i nærheden af eksplosionsfarlige materialer.
- Hold vand og fugt væk fra stoleliften.
- Brug ikke stoleliften til transport af dyr. Hold dyr væk fra trappen og stoleliften.
- Brug ikke stoleliften til transport af ting. Hold ting væk fra trappen og stoleliften.
- Kontrollér trappen og stoleliften forud for brug. Brug kun stoleliften, hvis trappen er fri for forhindringer. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer på gelænderet.
- Sørg for, at løse beklædningsgenstande ikke kan komme til at hænge fast i stoleliftens bevægelige dele.
- Stå aldrig, men sid altid på stoleliften.
- Brug altid sikkerhedsselen.
- Forbliv siddende opret, mens stoleliften er i bevægelse. Læn dig ikke frem eller tilbage. Undgå unødvendige bevægelser.
- Lad dine arme og hænder hvile på armlænet.
- Lad dine fødder hvile på fodstøtten. Lad ikke dine fødder rage ud over fodstøtten.
- Stå ikke ud af stoleliften på trappen. Heller ikke hvis den går i stå. Stå kun ud af stoleliften ved stoppestederne.
- Klap forsigtigt stoleliftens dele ind eller ud.
- Forsøg ikke at sætte stoleliften i bevægelse med magt.
- Parkér stoleliften ved et stoppested for at sikre, at batterierne forbliver opladede. Stoleliften standser, når den ankommer til et stoppested. Hvis du ikke parkerer stoleliften ved et stoppested, indikerer en kontinuerlig lyd, at batterierne muligvis aflades.
- Indberet omgående unormale lyde eller vibrationer til din forhandler.
- Joysticket er også en nødanordning: Fjern joysticket fra betjeningspanelet på armlænet i en nødsituation. Stoleliften kan ikke bruges, når joysticket er fjernet fra betjeningspanelet på armlænet.
- Lad el-ledningen sidde i stikkontakten for at sikre, at batterierne forbliver opladede, så stoleliften er klar til brug.

2.1.3 Vedligeholdelse

- Udfør kun den vedligeholdelse, der er beskrevet i vejledningen.
- Se kapitel 5 "Vedligeholdelse".
- En autoriseret tekniker skal udføre vedligeholdelse og reparationer, som ikke er beskrevet i vejledningen.
- Gør ikke forsøg på selv at skille stoleliften ad eller reparere den. Lad en autoriseret tekniker reparere og udskifte stoleliftens dele.
- Stoleliften må ikke ændres på nogen måde.
- Undlad at fjerne mærkater, etiketter, typeskilte og advarsskilte fra stoleliften.
- Hvis du mener, at stoleliften er defekt og derfor kan forårsage kvæstelser eller dødsfald, må du ikke bruge stoleliften. Kontakt omgående ThyssenKrupp Accessibility BV.
- Nordamerika: Udfør regelmæssige test og eftersyn i henhold til "ASME A18.1 - 2005: Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts".

3 Beskrivelse

3.1 Stolelift

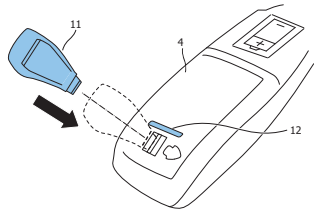
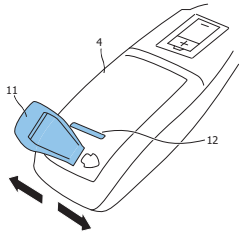
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sæde 2 Ryglæn 3 Armlæn 4 Betjeningspanel på armlænet 5 Fodstøtte 6 Håndtag til fodstøtte 7 Sikkerhedssele 8 Motorhus 9 Typeskilt 10 Advarselsskilt <p>18 Elektronisk sænkeanordning/ hovedafbryder (se afsnit 3.2.3 "Elektronisk sænkeanordning/hovedafbryder")</p>
---	--

3.2 Betjeningselementer

3.2.1 Betjeningspanel på armlænet

Brug betjeningspanelet på armlænet til at bevæge stoleliften, mens du sidder i stolen.

Betjeningspanelet på armlænet er monteret i det armlæn, der er tættest på bunden af trappen.

	<p>11 Joystick</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sæt joysticket i betjeningspanelet i armlænet. 2. Tryk joysticket mod højre eller mod venstre, og hold det der, for at bevæge stoleliften. 3. Slip joysticket for at standse stoleliften.
	<p>12 Statusindikator</p>	<p>Statusindikatoren viser stoleliftens status. Se kapitel 6 "Signaler".</p> <p>⚠ BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug kun det store joystick i betjeningspanelet på armlænet. Brug ikke de små joystick i betjeningspanelet på armlænet. • Stoleliften kan kun bevæges, når joysticket er aktiveret i betjeningspanelet på armlænet. • Betjeningspanelet i armlænet har højere prioritet end tilkald-og-stop-stationerne (hvis joysticket er sat i betjeningspanelet i armlænet).

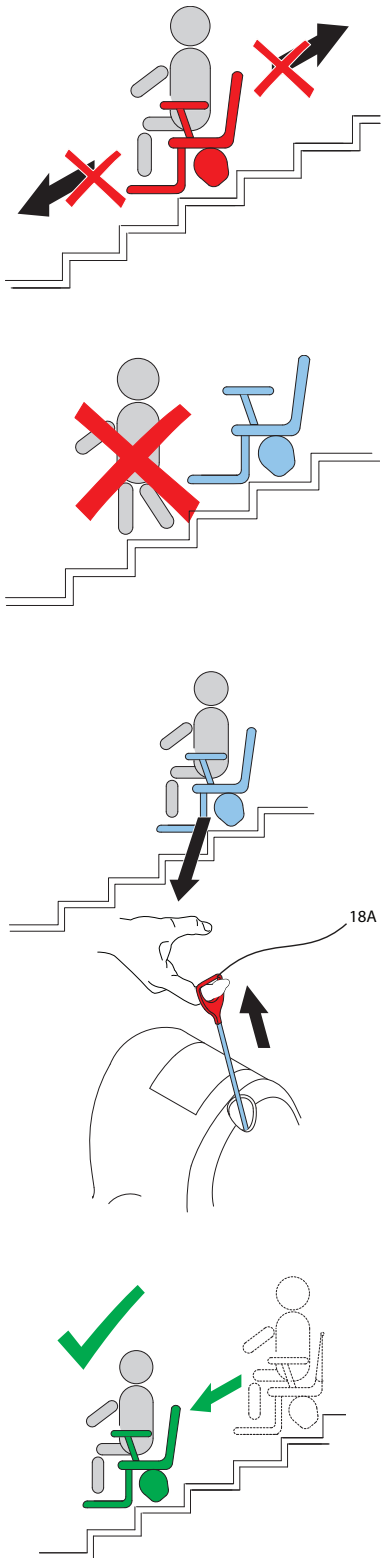

3.2.2 Tilkald-og-stop-stationer

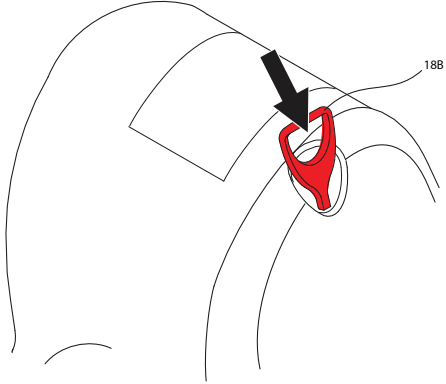

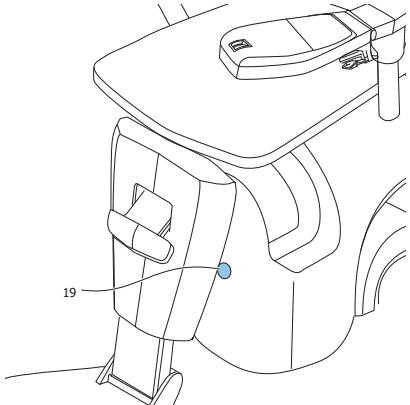

Brug tilkald-og-stop-stationerne til at bevæge stoleliften, når du ikke sidder i stolen. Tilkald-og-stop-stationerne er placeret ved toppen og bunden af trappen. Som ekstraudstyr kan der også være placeret tilkald-og-stop-stationer på mellemliggende etager med et stoppested.

	13	Tilkald-og-stop-station	
	14	Nøgle	Sæt nøglen i tilkald-og-stop-stationen.
	15	Tilkaldsknap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på knappen, og hold den nede, for at bevæge stoleliften hen mod dig. 2. Slip knappen, når stoleliften standser.
	16	Parkeringsknap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på knappen, og hold den nede, for at bevæge stoleliften hen til det nærmeste stoppested. 2. Slip knappen, når stoleliften standser.
	17	Statusindikator	Statusindikatoren viser stoleliftens status. Se kapitel 6 "Signaler".
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoleliften kan kun bevæges, når nøglen er sat i tilkald-og-stop-stationen. • Betjeningspanelet i armlænet har højere prioritet end tilkald-og-stop-stationerne (hvis joysticket er sat i betjeningspanelet i armlænet). </div> </div>			

3.2.3 Elektronisk sænkeanordning/hovedafbryder

Den elektroniske sænkeanordning og hovedafbryderen er den samme enhed med to forskellige funktioner.

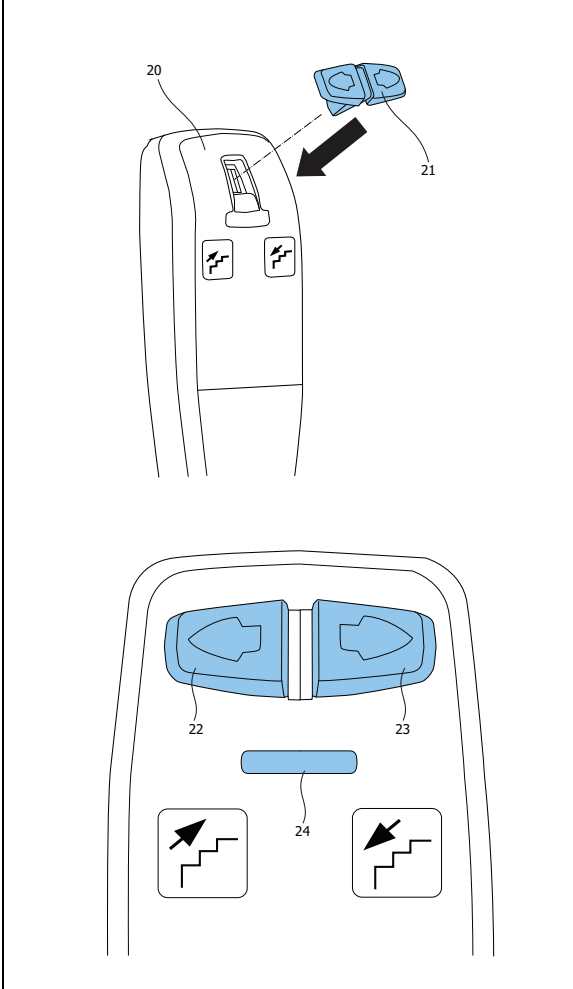
	18 A	Elektronisk-sænkeanordning	<p>Brug den elektroniske sænkeanordning til at lade stoleliften køre ned, hvis der opstår en fejl, og stoleliften stopper halvvejs på gelænderet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Træk i den elektroniske sænkeanordning, og hold den fast, for at aktivere nedkøringssystemet.2. Hold fast i den elektroniske sænkeanordning, indtil stoleliften er kommet frem til stoppestedet.3. Slip den elektroniske sænkeanordning for at standse stoleliften. <p> FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none">• Brug ikke for megen kraft, når du trækker i den elektroniske sænkeanordning.• Hold fast i den elektroniske sænkeanordning, indtil den er helt inde i motorhuset.
--	---------	----------------------------	---

	<p>18 B</p> <p>Hovedafbryder</p>	<p>Brug hovedafbryderen til at slukke for stoleliften, hvis den ikke skal bruges i to uger.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på hovedafbryderen for at slukke for stoleliften. 2. Træk i hovedafbryderen for at tænde for stoleliften. <p> FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug ikke for megen kraft, når du trykker på eller trækker i hovedafbryderen. • Brug kun hovedafbryderen til at tænde eller slukke for stoleliften. Træk ikke stikket ud af stikkontakten.
	<p>19</p> <p>Statusindikator</p>	<p>Statusindikatoren viser stoleliftens status. Se kapitel 6 "Signaler".</p> <p> FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug kun den elektroniske sænkeanordning i nødstilfælde (f.eks. hvis batterierne i betjeningspanelet i armlænet er tomme).

3.3 Ekstraudstyr

3.3.1 Betjeningspanel til plejeren

Plejerens betjeningspanel kan bruge til at lade en plejer bevæge stoleliften, mens brugeren sidder i stolen.

	20	Betjeningspanel til plejeren	
	21	Nøgle	Tryk på knapperne, og hold dem nede, for at køre liften op eller ned, mens brugeren sidder i stolen.
	22	Hæveknop	Tryk på knapperne, og hold dem nede, for at køre liften op, mens brugeren sidder i stolen.
	23	Sænkeknop	Tryk på knapperne, og hold dem nede, for at køre liften op eller ned, mens brugeren sidder i stolen.
	24	Statusindikator	Statusindikatoren viser stoleliftens status. Se kapitel 6 "Signaler".

3.3.2 Drejesæde

For at gøre det nemmere at sætte sig ned og rejse sig op, kan der monteres et manuelt eller et automatisk drejesæde på stoleliften.

3.3.2.1 Manuelt drejesæde

Inden du sætter dig ned eller rejser dig op, kan du dreje stolen, så den vender hen mod trappeafsatsen på den øverste etage. Med det manuelle drejesæde kan du dreje stolen 70°, når stoleliften er ved en trappeafsats. Du kan ikke bevæge stoleliften, før stolen er i driftspositionen igen (dvs. i en vinkel på 90° i forhold til trappen).



ADVARSLER

Lås drejesædet fast, inden du sætter dig ned eller rejser dig op.

	25	Manuelt drejesæde	<ol style="list-style-type: none">1. Træk håndtaget opad for at frigøre sædet.2. Drej sædet, så det vender hen mod trappeafsatsen på den øverste etage.3. Tryk håndtaget nedad for at fastlåse sædet.
--	----	-------------------	---

3.3.2.2 Automatisk drejesæde

Stoleliften er udstyret med patenteret ASL-teknologi. "ASL", som står for "Advanced Swivel and Levelling", får stolen til at dreje rundt, mens den kører op og ned ad trappen. Denne teknologi sørger for den størst mulige komfort. Stolens drejeled er programmeret særskilt, således at brugeren altid befinder sig i den bedst mulige siddeposition. Den samtidige bevægelse af dreje- og nivelleringsmodulet sørger for at stolen altid er vandret, uafhængigt af om gelænderet er vinklet opad eller nedad. Yderligere stop og drejebewægelser under driften undgås. Stolens drejning ved bunden eller toppen af trappen gør det nemmere at sætte sig i eller rejse sig op fra stoleliften. Med ASL-teknologi kan stoleliften installeres på små og smalle trapper, således at andre personer stadigvæk har plads til at gå på trappen. Ombygning af trappen er ikke nødvendigt.

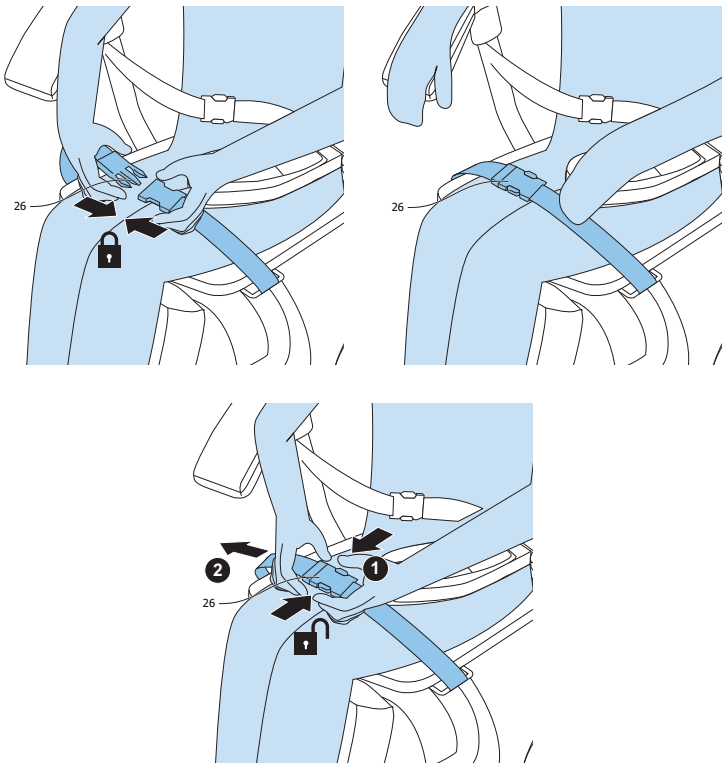
Stolen drejer automatisk i den ønskede retning, inden du sætter dig ned eller rejser dig op, når du styrer stoleliften med betjeningspanelet på armlænet eller tilkald-og-stop-stationen. Stolen kan også vende bagud, mens du kører op ad trappen, og fremad mens du kører ned ad trappen.

Eksempler:

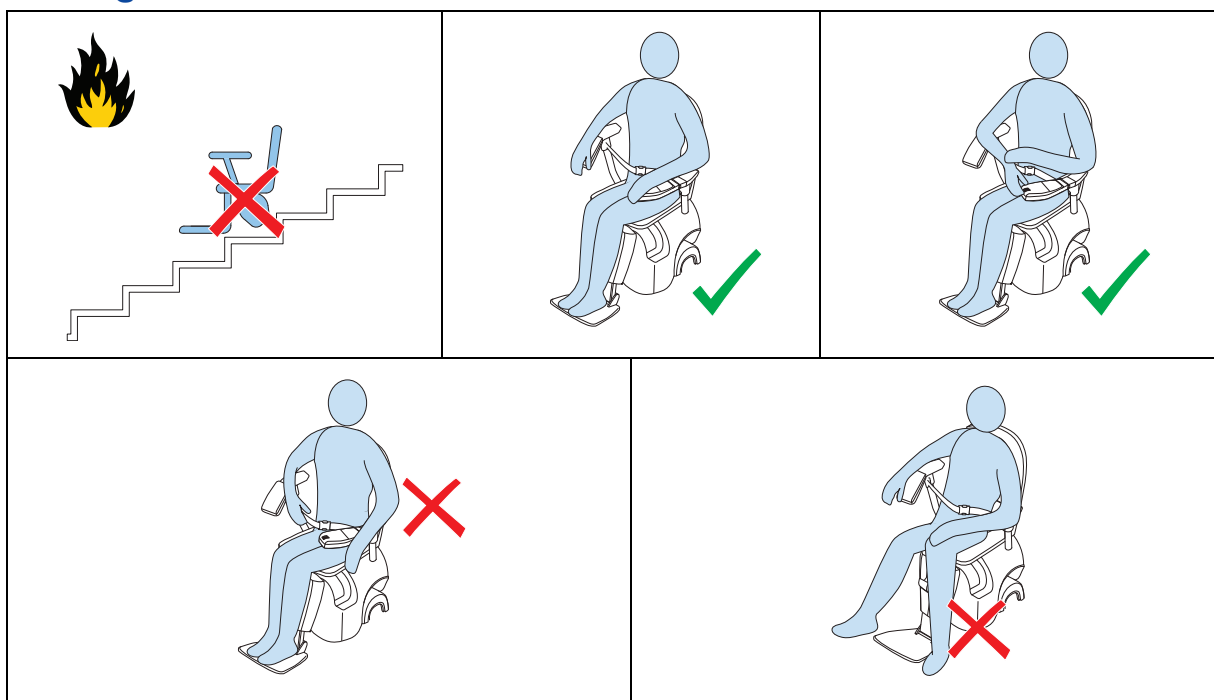
Når du sætter dig ned	<ol style="list-style-type: none">1. Tryk på tilkaldsknappen på tilkald-og-stop-stationen for at parkere stoleliften og dreje stolen til den ønskede position.2. Klap sædet ud.3. Sæt dig ned på sædet.4. Spænd sikkerhedsselen.5. Tryk joysticket på betjeningspanelet på armlænet mod højre eller mod venstre, og hold det der, for at bevæge stoleliften. Stolen vender tilbage til driftspositionen og sætter sig i bevægelse.
Når du kommer frem til toppen eller bunden af trappen	<ol style="list-style-type: none">1. Tryk joysticket på betjeningspanelet på armlænet mod højre eller mod venstre, indtil du når frem til toppen eller bunden af trappen. Stolen drejer automatisk.2. Når du hører et lydssignal, skal du slippe joysticket på betjeningspanelet på armlænet.3. Spænd sikkerhedsselen op.4. Rejs dig op fra sædet.5. Klap sædet sammen.6. Tryk på parkeringsknappen på tilkald-og-stop-stationen for at parkere stoleliften ved et stoppested.

3.3.3 Bensele til handicappede

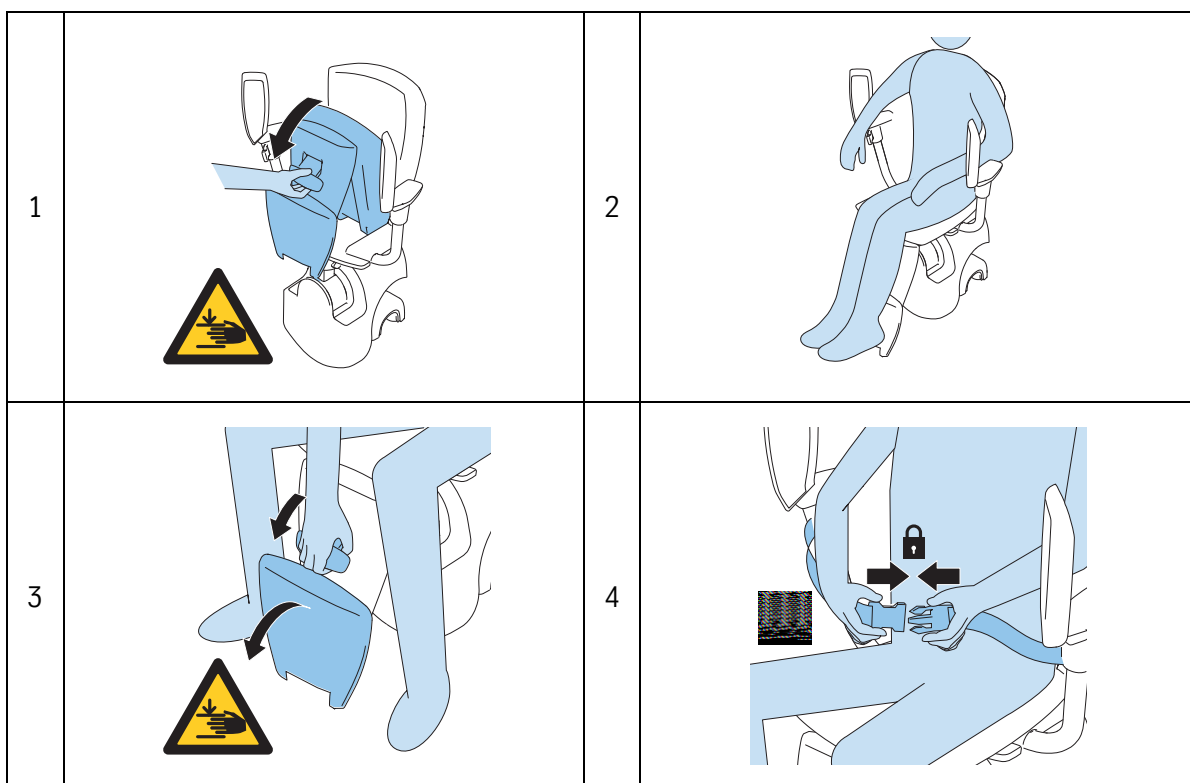
Stoleliften kan udstyres med en bensele til handicappede.

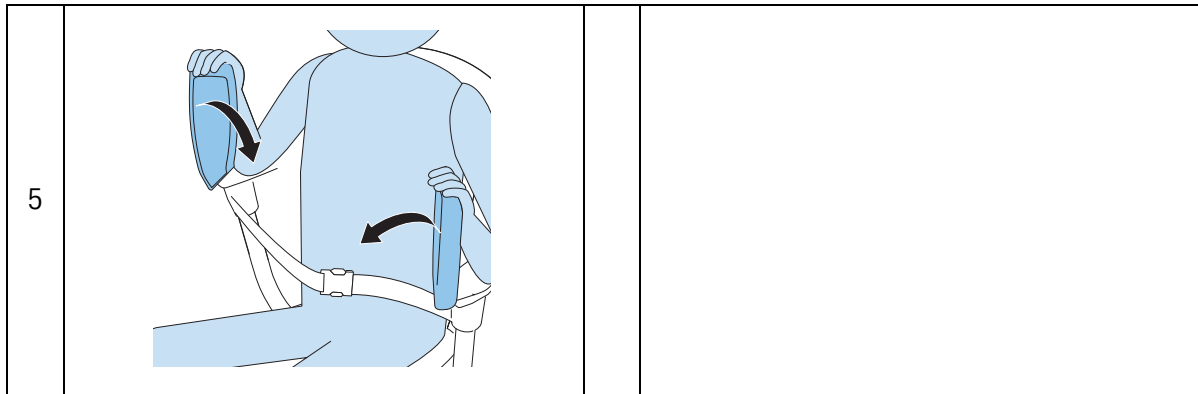
	26	Bensele til handicappede
---	----	--------------------------

4 Brug



4.1 Sådan klapper man sædet ned og sætter sig





4.2 Bevægelse af stoleliften



FORSIGTIG

Fjern ikke joysticket fra betjeningspanelet i armlænet i forbindelse med normal brug. Fjern kun joysticket fra betjeningspanelet i armlænet i nødsituationer. Stoleliften kan ikke bruges, når joysticket er fjernet fra betjeningspanelet på armlænet.

1. Tryk joysticket på betjeningspanelet på armlænet mod højre eller mod venstre, og hold det der, for at bevæge stoleliften.

Statusindikatoren på betjeningspanelet i armlænet viser stoleliftens status.

Se kapitel 6 "Signaler"



BEMÆRK

Stoleliften standser med det samme, når du slipper joysticket. Statusindikatoren på betjeningspanelet i armlænet slukker. Du kan først starte stoleliften igen efter en kort ventetid.

2. Stoleliften standser ved alle parkeringssteder. Når du vil sætte i gang igen, skal du slippe joysticket, og derefter trykke det mod højre eller mod venstre, og holde det der, for at bevæge stoleliften.
3. Slip joysticket for at standse stoleliften.

4.3 Nødstop



ADVARSLER

Stå ikke ud af stoleliften på trappen. Heller ikke hvis den går i stå. Stå kun ud af stoleliften ved stoppestederne.

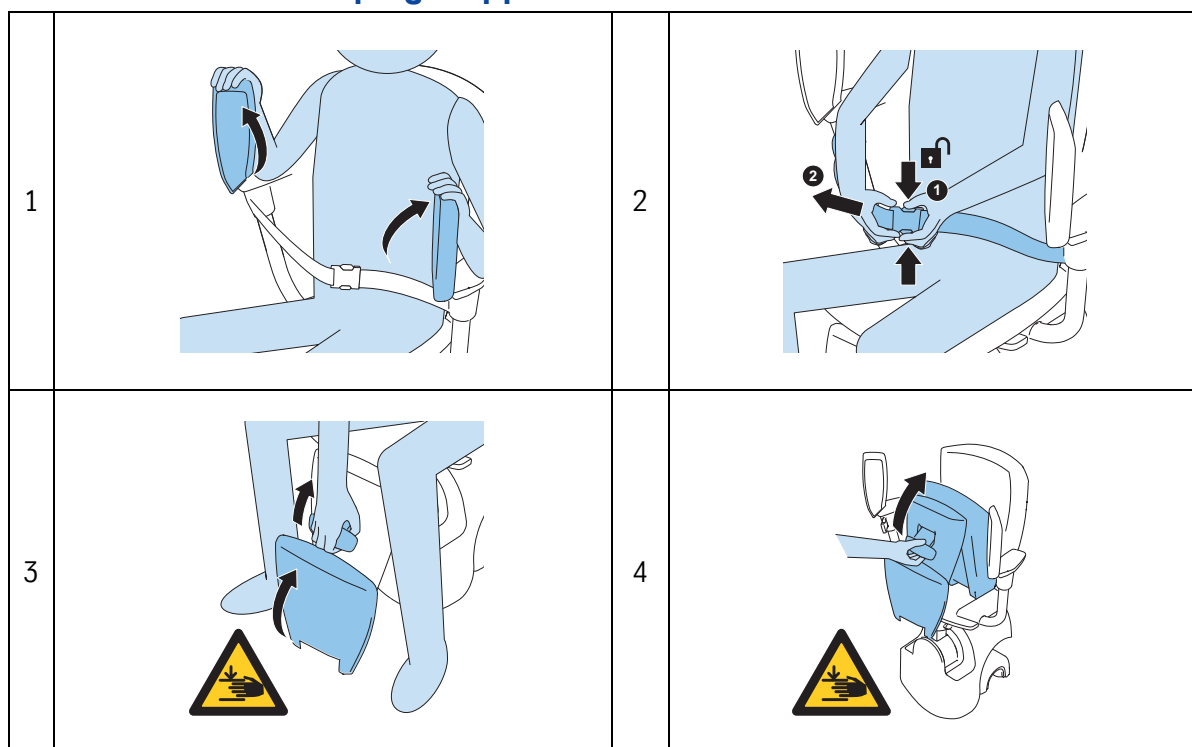


FORSIGTIG

Fjern ikke joysticket fra betjeningspanelet i armlænet i forbindelse med normal brug. Fjern kun joysticket fra betjeningspanelet i armlænet i nødsituationer. Stoleliften kan ikke bruges, når joysticket er fjernet fra betjeningspanelet på armlænet.

- Fjern joysticket fra betjeningspanelet på armlænet for at standse stoleliften i en nødsituation.
- Sæt joysticket tilbage i betjeningspanelet på armlænet for at starte stoleliften igen.

4.4 Sådan står man op og klapper sædet sammen



4.5 Nulstilling af stoleliften

Afhængigt af hvor ofte stoleliften anvendes, skal du nulstille den én gang hver 20. måned. Statusindikatoren på betjeningspanelet i armlænet blinker grønt, når stoleliften skal nulstilles.

- For at nulstille stoleliften skal du fjerne joysticket fra betjeningspanelet i armlænet og sætte det tilbage i betjeningspanelet i armlænet igen.

5 Vedligeholdelse

5.1 Rengøring af stoleliften

- Rengør regelmæssigt stoleliften – sæde, ryglæn, armlæn, fodstøtte, sikkerhedssele, motorhus – med en blød og fugtig klud. Brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel.
- Hold betjeningspanelet i armlænet og tilkald-og-stop-stationerne rene.
- Fjern regelmæssigt støv fra trappen og gelænderet med en støvsuger.

5.2 Udskiftning af batterierne



ADVARSLER

- Udskift batterierne rettidigt for at sikre, at stoleliften ikke standser pludseligt.
- Brug kun de anførte batterier.
- Kontakt om nødvendigt forhandleren for at få batterierne udskiftet.

5.2.1 Betjeningspanel på armlænet (kun RF-modeller)

Betjeningspanelet i armlænet bruger 2 C/R14-batterier. Stoleliften udsender en advarsel om lavt batteriniveau efter cirka 12 måneder (eller før, hvis den bruges mere end gennemsnitligt). Udskift batterierne.

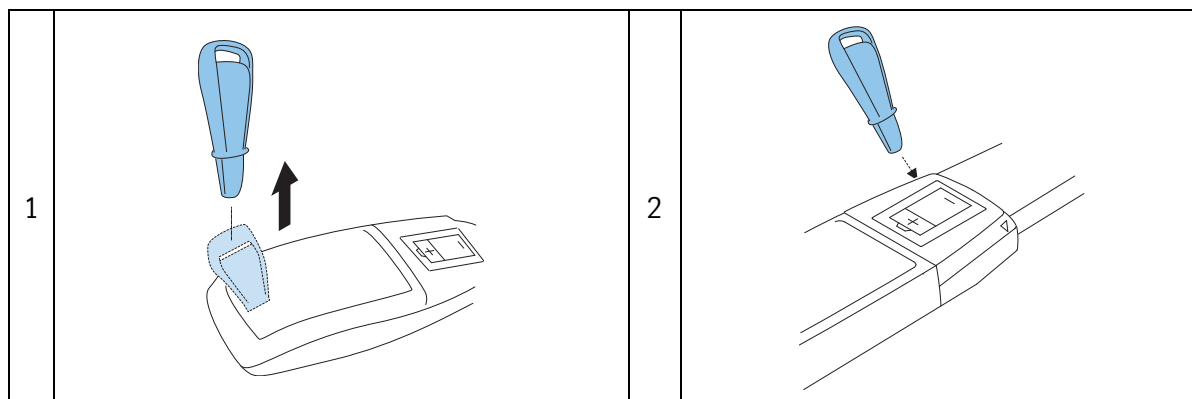
Hvis batteriniveauet er lavt, og du aktiverer joysticket, så blinker statusindikatoren grønt og derefter rødt (med hurtige periodiske bip), og derefter lyser den grønt. Du kan afslutte transporten med stoleliften. Stoleliften standser ved et parkeringssted. Du kan bruge stoleliften, indtil den når frem til det forprogrammerede stoppested.

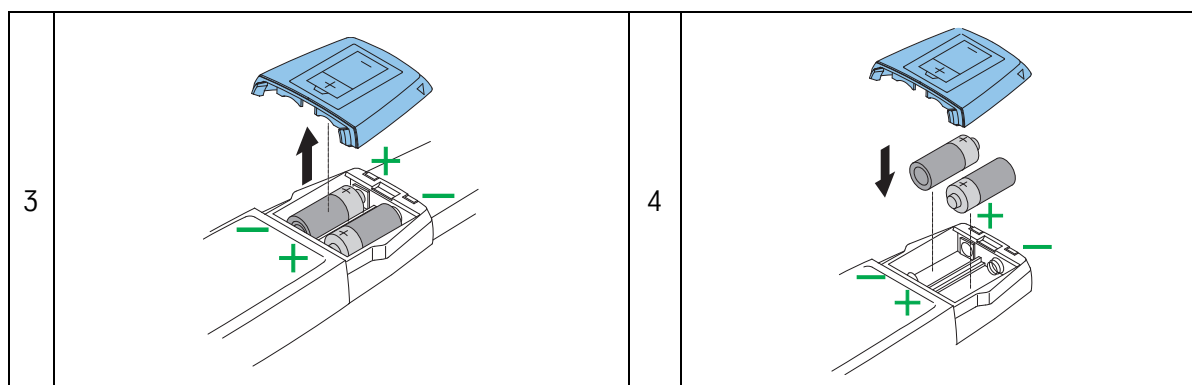
Hvis du aktiverer joysticket, når stoleliften er ved det forprogrammerede stoppested, så blinker statusindikatoren rødt (med hurtige periodiske bip). Du kan ikke længere bruge stoleliften.



ADVARSLER

- Hvis stoleliften standser halvvejs oppe eller nede ad trappen, skal du udskifte batterierne med det samme.
- Der er reservebatterier i armlænet overfor armlænet med betjeningspanelet. Læg nye reservebatterier i rummet til reservebatterier, når du udskifter batterierne.





5.2.2 Tilkald-og-stop-stationer

Tilkald-og-stop-stationerne bruger 2 C/R14-batterier. Udskift batterierne efter cirka 12 måneder.

Hvis batteriniveauet er lavt, og du trykker på en af knapperne, så blinker statusindikatoren grønt og derefter rødt (med hurtige periodiske bip), og derefter lyser den grønt. Du kan afslutte transporten med stoleliften. Stoleliften standser ved et parkeringssted. Du kan bruge stoleliften, indtil batterierne er afladede.

1. Åbn dækslet på batterirummet.
2. Udskift batterierne.
3. Luk dækslet på batterirummet.



ADVARSLER

Hvis batterierne er afladede, og du ikke har nogen reservebatterier, må du ikke rejse dig op fra stoleliften på trappen. Heller ikke hvis den går i stå. Brug altid den elektroniske sænkeanordning.



BEMÆRK

Køb så hurtigt som muligt nye reservebatterier, efter du har udskiftet batterierne.

5.3 Vedligeholdelsestimer

Stoleliften er udstyret med en vedligeholdelsestimer for at sørge for størst mulig sikkerhed. Vedligeholdelsestimeren aktiveres efter cirka 20 måneder (eller før, hvis stoleliften bruges mere end gennemsnitligt).

Hvis du udfører en handling med et af betjeningselementerne, så blinker statusindikatoren grønt og derefter rødt (med hurtige periodiske bip), og derefter lyser den grønt. Stoleliften sætter sig i bevægelse med en forsinkelse på 1 sekund.

1. Fjern joysticket fra betjeningspanelet i armlænet.
2. Vent i mindst 1 sekund.
3. Sæt joysticket tilbage i betjeningspanelet i armlænet.



FORSIGTIG

Hvis du ikke udfører disse trin efter gennemsnitligt cirka 24 måneders brug, udsendes et kontinuerligt bip, og statusindikatoren på det anvendte betjeningselement blinker rødt. Du kan afslutte transporten med stoleliften. Stoleliften standser et sikkert sted.

1. Fjern joysticket fra betjeningspanelet i armlænet.
2. Vent i mindst 1 sekund.
3. Sæt joysticket tilbage i betjeningspanelet i armlænet.

6 Signaler

6.1 Signaler på motorhuset

SIGNAL	BETYDNING	HANDLING
Lyser blå	Stoleliften er tændt.	---
Lyser ikke	Stoleliften er slukket.	Tænd for stoleliften med den elektroniske sænkeanordning.

6.2 Signaler på betjeningspanelet på armlænet

SIGNAL	BETYDNING	HANDLING
Lyser grønt	Joysticket er blevet betjent, og stoleliften bevæger sig eller er ved at sætte sig i bevægelse.	---
Blinker grønt	Den blinkende grønne lampe skifter til at blinke rødt inden for et par sekunder. Batterierne er afladede.	Udskift batterierne i betjeningspanelet i armlænet. Se afsnit 5.2 "Udskiftning af batterierne". Hvis denne situation opstår, mens stoleliften er i bevægelse, skal den køres ned med den elektroniske sænkeanordning.
Lyser rødt	Fejl.	Sluk for stoleliften, og tænd den igen. Kontakt din forhandler, hvis stoleliften ikke reagerer. Hvis denne situation opstår, mens stoleliften er i bevægelse, skal den køres ned med den elektroniske sænkeanordning.
Blinker rødt	Stoleliften er slukket.	Tænd for stoleliften med den elektroniske sænkeanordning.
Blinker rødt + hurtige periodiske bip	Stoleliften er stødt på en forhindring og standset op.	Bevæg stoleliften til et stoppested i den modsatte retning. Sørg for, at trappen er fri for forhindringer, inden du bruger stoleliften.
2-tonede bip i 3 sekunder, som gentages hvert 13. sekund	Stoleliften er ikke ved et ladested.	Bevæg stoleliften til et ladested.
Lyser orange	Radiofrekvensforstyrrelser forårsaget af et eksternt apparat.	Sluk for det apparat, som forårsager radiofrekvensforstyrrelserne, og forsøg at bevæge stoleliften igen.

6.3 Signaler på tilkald-og-stop-stationer

SIGNAL	BETYDNING	HANDLING
Lyser grønt + langsomme bip	Stoleliften er blevet betjent af et andet betjeningselement forinden.	Vent, idet stoleliften vil bevæge sig inden for 10 sekunder.
Blinker rødt	Stoleliften betjenes allerede med et andet betjeningselement.	---

7 Tekniske data

Maksimal tilladt vægt	125 kg (275 lbs)
Transporthastighed (nominel)	0,1 m/s (20 ft/min)
Lydtryksniveau	67 dB(A)
El-system	
Strømforsyning	Klasse 2 Input: 230 VAC, 0,35 A, 50 Hz Output: 35 VDC, 1700 mA Input: 120 VAC, 70 W, 60Hz Output: 35 VDC, 1700 mA
Omgivelsesbetingelser	
Omgivelsestemperatur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Relativ luftfugtighed	20 - 80 %
Batterier (stolelift)	
Batteritype	NP7-12LFR / NP7-12TFR: 12 V
Antal batterier	2
Opladningstid	16 timer
Kapacitet	10 ture (125 kg (275 lbs), 1 etage, lodret start forneden, vandret stop foroven)
Batterier (betjeningspanel i armlænet)	
Batteritype	C/R14: 1,5 V
Antal batterier	2 (+2 batterier i rummet med reservebatterier)
Batterier (tilkald-og-stop-station)	
Batteritype	C/R14: 1,5 V
Antal batterier	2

8 EF-overensstemmelseserklæring

ThyssenKrupp Accessibility BV erklærer, at:

Flow2-stoleliftten (handelsnavn: Swing),
med serienummer 340000 til 999999,

er i overensstemmelse med de gældende EF-direktiver:

- Maskindirektivet 2006/42/EF
- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktivet 2004/108/EF
- Radio- og teleterminaludstyrsdirektivet 1999/5/EF
- RoHS-direktivet 2011/65/EF

Person, der er autoriseret til at udfærdige filen:	W.L.A. van Engelen ThyssenKrupp Accessibility BV
Notificeret organ	Liftinstituut BV Buikslotermeerplein 381 1025 XE Amsterdam (Holland) EF-typeafprøvningsattest NL06-400-1001-061-03 Rev.3
Harmoniseret standard	EN 81-40 2008
Andre standarder og specifikationer	EN 81-1/2A1 2006, EN 300-220-1V2.1.1 2006-04, EN 61001-3-2, EN 61001-3-3 A1 2001, EN 61001-6-1, EN 61001-6-3 A11 2004, EN-IEC 61508-1/7 2001, EN-IEC 60204-1 2006, ISO 9386-2 / ISO 14121-1 (Risikovurdering)

Krimpen aan den IJssel, den 3. juni 2013

Administrerende direktør



H.R. Dreesch

ThyssenKrupp Accessibility BV Van Utrechtweg 99, 2921 LN P.O. Box 754, 2920 CB Krimpen aan den IJssel (Holland)	Telefon: +31 (0)180 530 900 Fax: +31 (0)180 530 901 E-mail: info@tkacc.nl Internet: www.tkacc.nl
Bank: The Royal Bank of Scotland (RBS) Kontonr.: 49.77.69.395	Handelskammernr.: 24324608 Momsnr.: NL8000.57.788.B08
Alle vores tilbud og aftaler er underlagt de generelle vilkår og betingelser for den hollandske sammenslutning af elevator- og rulletrappeingeniører (Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek) i Zoetermeer, i den udgave de sidst er blevet registreret under hos handelskammeret i Den Hague.	

9 Kontaktoplysninger

Kontakt din forhandler, hvis du har brug for oplysninger, der ikke findes i vejledningen.

Telefonnr.:

Hav følgende oplysninger ved hånden, når du kontakter vores serviceafdeling, så vores personale kan hjælpe dig så hurtigt som muligt:

Navnet på brugeren:

Telefonnr.:

Installationsnr.:

Stoleliftens type:

Beskrivelse af problemet:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fabrikant

ThyssenKrupp Accessibility BV
Van Utrechtweg 99, 2921 LN
P.O. Box 754, 2920 CB
Krimpen aan den IJssel
(Holland)

Telefon: +31 (0)180 530 900
Fax: +31 (0)180 530 901
E-mail: info@tkacc.nl
Internet: www.tkacc.nl