



### Tekniske data

**Helmadras**  
80x200x20 cm  
HMI nr.: 119740

**Helmadras**  
85x200x20 cm  
HMI nr.: 119743

**Helmadras**  
90x200x20 cm  
HMI nr.: 119746



## Domus Auto

### Dynamisk trykaflastende helmadras

#### Egenskaber

Den trykaflastende madras består af 20 enkelte luftceller, der hver er 20 cm høje. Cellerne er i designet Cell-on-Cell. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3, og 4.

#### Brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstilles automatisk efter brugerens vægt og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk og der er desuden mulighed for at indstille siddefunktion.

#### Hælfunktion

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves 0-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet, for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

#### Autofirmfunktion

Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Autofirm og statisk slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang.

#### Åndbart og strækbart betræk

Betrækket er strækbart, det fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde. Syninger er svejsede for optimal hygiejne.

# Domus Auto

## Egenskaber

### Topbetjent pumpe

- Terapi: Dynamisk, Statisk, Maxfirm, Seat inflate.
- Lydsvag - under 28 dB(a)
- 6 komfortniveauer
- Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømudfald

**Elektricitet** AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

**Cyklustid** 10 min.

**Dimensioner** H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm

**Pumpe vægt** 2,3 kg

**Rengøring** Desinficeres med gængse rengørings- og desinfektions midler på en opvredet klud.

### Helmadras

- 20 stk. 20 cm høje celler.
- Individuelle celler som kan udskiftes.
- Åndbart, inkontinens og brandhæmmende PU-betræk der er strækbart i alle retninger.
- Integreret ledningsophæng.
- Dækker til og med sårkategori 4 og forebyggelse af meget høj risiko.

**Sårkategori og risikovurdering** Behandling til og med stadie 4 samt forebyggelse til høj risiko.

**Brugervægt** Ca. 0 - 250 kg

**Madrasvægt** 5,6 kg

**Sammensætning** 20 celler

**Materiale**

- Betræk: Nylon/PU, lilla
- Celler: Nylon/PU, lilla
- Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt

**Rengøring** Betræk:  
Vaskbart ved max 90 grader.