

Enterprise 5000X Washable



Infektionskontrol er en topprioritet

Infektionskontrol og nedbringelse af sundhedsrelaterede infektioner på hospitaler er noget, der i stigende grad prioriteres højt på sundhedsområdet. Derfor stiger efterspørgslen på fuldt vaskbare hospitalssenge på alle markeder, og den forventes at fortsætte med at stige længe endnu.

Denne vaskbare seng er en videreudvikling af Enterprise 5000X og omfatter følgende ændringer med henblik på en forbedret modstandsdygtighed over for de skadelige virkninger som vandet og det fugtige miljø i vaskeprocessen medfører:

- Elektroforetisk lakering - metaldelene har fået en elektroforetisk lakering ind- og udvendigt, før de er blevet malet, for at øge korrosionsmodstanden og ridsefastheden
- Korrosionsbestandige fastgørelseselementer - fastgørelseselementerne er udført i rustfrit stål med henblik på øget holdbarhed
- Maskinvaskbart strømkabel med fremragende modstandsdygtige egenskaber
- Beskyttelse imod væskeindtrængen - alle elektriske komponenter har som minimum IPX6-klassificering

Smal bredde

For at imødekomme kompatibilitetskravene til vaskemaskiner og specifikke markedskrav har Enterprise5000X Washable en samlet bredde på 99 cm

Ny farve

For at lette genkendeligheden er metaldelene på IPX6-varianten forsynet med en ny, frisk hvid farve

Specifikationer

Maskinvask

1. Sænk sengen til minimumshøjden.
Maskinvask i 2 minutter i 70 °C varmt vand (pH 5-8, 0,5% rengørings- og desinfektionsmiddelopløsning).
2. Skyl i 20 sekunder i 85 °C varmt vand (pH 5-8, 0,5% rengørings- og desinfektionsmiddelopløsning).
3. Lad afkøle i 10 minutter ved en rumtemperatur på 20 °C.
4. Lad de rengjorte dele få lov til at tørre, inden madrassen anbringes igen.



GENERELLE SENGESPECIFIKATIONER

Sikker arbejdsbelastning	250 kg
Maks. plejemodtagervægt	200 kg
Produktvægt	ca. 144 kg
Hørbar støj	ca. 50 dB

Driftsbetingelser

Temperatur	10 til 40
Relativ luftfugtighed	20-90 % ved 30 °C, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk	700 hPa til 1060 hPa

Elektriske data

Effektforbrug	maks. 3,9 A ved 100-230 V AC, 50/60Hz
Driftscyklus	10 % (2 min. TIL, 18 min. FRA)
Rammekonfiguration	Head off Deck

SIKKERHEDSSTANDARDE

Sikkerhedsstandarder	EN/IEC 60601-1:2005 AMD1:2012 IEC 60601-2-52:2015
Beskyttelse mod elektrisk støj EMC	Klasse I, type B I overensstemmelse med EN/IEC 60601-1-2:2014
Reservebatteri	Li-ion 25,9 V, 2,25 Ah

STØRRELSER OG MÅL*

Samlet bredde	99 cm
Samlet længde (kort)	219 cm
Samlet længde (standard)	230 cm
Samlet længde (udvidet)	242 cm
Hældning, fodende ned	12°
Hældning, hovedende ned	12°
Maksimal ryglænsvinkel	70°
Maksimal lårstøttevinkel	20°
Lægstøttevinkel	16°

* Produktionstolerancer kan forekomme

HØJDE PÅ LIGGEFLADE

Med 150 mm-hjul

BUET LIGGEFLADE

34 cm til 78 cm

LIGGEFLADESTØRRELSE

Smal udgave 85 cm x 200 cm

Beskyttelse imod væskeindtrængen IPX6

Bemærk: Sengen kan også rengøres og desinficeres manuelt i overensstemmelse med standardproceduren, som er beskrevet i afsnittet om produktvedligeholdelse i 746-600 EN 01