

Levetid og garanti:

Ved hjælp vores interne produktion og strenge materialekontrol sikrer vi høj kvalitet og den dermed lange levetid. Levetiden afhænger i høj grad af intensiteten i brugen af vesten. Ifølge vores kunder og vores erfaring er en levetid på 10 år ikke ualmindelig. Vesten skal dog have en regelmæssig kontrol af brugeren eller plejeren.

- Tjek sømenes holdbarhed
- Kontroller om der er huller eller skader.

Vi er overbeviste om vores produkts levetid. Derfor får du 3 års brugs-garanti og en livstidsgaranti på produktionsfejl.

Undtaget fra garantien er:

- Fejl eller skade på grund af overdreven eller ukorrekt brug
- Ingen eller forkert pleje
- Skader eller fejl på grund af forkert eller ukorrekt opbevaring

Opbevaring:

For at sikre en lang levetid, skal du opbevare vores vægt vest varm og tør. Undgå temperaturer over 30 grader.

Rengøring og pleje:

Vi anbefaler at bruge en mikrofiber klud til daglig rengøring. Pletter aftørres med en våd klud.

Grundrengøring:

- Beluga-Tauchsport GmbH anbefaler vask af vest på 40 grader i badekar/vaskebalje eller i en stor håndvask. Tilsæt vaskemiddel til syntetiske stoffer. Luk spænder og velcro bånd før vask. Efterskyl produktet grundigt med rent vand indtil al sæbe er væk.

- Vælger forbrugeren at vaske vesten uanset vægt i vaskemaskinen påtager Beluga-Tauchsport GmbH sig intet ansvar for skader på vaskemaskinen eller vestene. Da der kan forekomme skader på maskinen pga. vægten og sand kan sive ud af vesten og skade maskinens dele.

Må ikke centrifugeres, brug ikke blege middel, må ikke stryges, må ikke tørre tumles.

- Tørring af vesten skal gøres på et varmt sted, maximum 30 grader, på en bøjle, uden direkte sollys. Så tørrer vesten indenfor få timer.

Kvalitet og oprindelse:

Alle produkter er håndlavet med stor omhu. Produktionen er underlagt et selv-pålagt QM-system, hvilket sikrer sikkerhed og ensartet kvalitet. Med vores interne kvalitetsstyring styrer vi ikke kun vores egne produktionsprocesser, men sikrer også, at det anvendte materiale altid opfylder de højeste kvalitetsstandarder.

100% af vores råvarer kommer fra direkte producenter i Tyskland. Alle råmaterialer testes for skadelige stoffer og kan anvendes uden begrænsning for allergikere.

Har du spørgsmål om vores produkter, står vi til din rådighed.

bortskaffelse:

Vores produkter er lavet til at behage dig i lang tid. Men hvis du nogensinde er nødt til at bortskaffe et produkt, skal du adskille sømmene og kassere sandet på genbrugspladsen. Polymer fyldninger og de naturlige tekstiler bortskaffes via affaldsbeholderen.

din kontakt til beluga i Danmark

Oliz®

Bornholmsvej 10
7400 Herning

Mail: th@oliz.dk
Mobil: 60 38 37 00
www.oliz.dk



Anvendelse og brug af vest

Tillykke!

Du har købt et originalt Beluga-produkt. Siden 1985 står vores navn for kvalitetsprodukter fremstillet i Tyskland ved hjælp af højeste kvalitet og teknisk modne materialer. Vores sundhedsplejeprodukter er blevet udviklet af terapeuter og læger og er blevet genfortolket af os med omhu og omtanke for detaljer. Foruden levetiden garanterer vi dig brug af materialer, der er fri for skadelige stoffer og harmløse for helbredet, samt produktionsprocesser, som vi underkaster os vedvarende kontrol på eget initiativ.

Anvendelse og brug af vest:

Beluga vægtvest er udviklet til personer med nedsat følelse. Vestens vægt og ensartede tryk giver følelsen af sikkerhed og gør det muligt for hjernen at registrere nervecellerne og gør at brugeren mærker sig selv. En positiv effekt på motorisk og kognitiv opfattelse, samt en stigning i koncentrationen kan forventes ved brug af vægtvesten. Motorisk og mental rastløshed, dårlig kropsholdning, generel stress, ADHD, autisme, ataksi, trisomi 21, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, slagtilfælde, begyndende eller avanceret demens er de vigtigste anvendelsesområder af vesten.

Vesten kan variere i størrelsen ved hjælp af spænderne forrest. Det gøres ved at stramme stropperne til eller løsne dem. Størrelsen er angivet i centimeter mål om taljen, så er du sikker på at få den rigtige størrelse til brugeren.

Før du bruger vesten, skal du snakke med din læge eller terapeut, der kender til sensorisk integration.

Anbefalet alder:

Fra 1 år.

Den specifikke vægt skal indstilles hos en terapeut eller læge. Vores vægt anbefalinger er udelukkende baseret på egne erfaringer.

Anvendelse og brug af vest:

Hvornår skal vægtvesten ikke bruges?

Før brugen af vores vægtvest skal brugeren snakke med sin læge eller terapeut, der ved noget om sensorisk integration og proprioception der kan vurdere brugerens personlige situation.

Ved brugen af vægtvesten skal der tænkes på ...

- børn under 1 år
- åndedræts- eller åndedrætsproblemer, der kunne forværres ved udvendigt tryk
- kardiovaskulære sygdomme
- Hypertension
- Spina bifida
- Konstant afvisning af produktet
- andre lidelser i hud, muskel/ skelet eller helixer, hvor tryk og vægt bør undgås

Dette er absolut vigtigt at bemærke i brugen af vægtvesten:

- Vægtvest der anvendes til børn under 6 år, og personer med begrænset selvbestemmelsesevne bør overvejes nøje.
- Brug aldrig vægtvesten i nærheden af vand. Der er druknings fare!
- Brug ikke vægtvesten i nærheden af åben ild, gløder eller andre brændbare genstande.

Valg af vægtvest:

Varigheden af brug og vægt afhænger af en terapeut eller læges personlige præferencer og anbefalinger. Hvis man, som bruger/ terapeut ikke har erfaring eller viden om brug af vægtvest, vil vi anbefale at bruge en lettere vægtvest til at starte med. Ved svage muskler bør lettere vægtveste anvendes, ved større muskler skal tungere vægtvest anvendes. Hvis du har fundet den vægtvest til brugeren der passer, er en forøgning af vægten ikke nødvendig.

Anvendelse:

For at vænne sig til følelsen og effekten af vægtvesten starter du med korte brugs perioder (afhængigt af brugerens opførsel), som gentages med jævne mellemrum. Hvis vægtvesten afvises, fordi nye ting ikke accepteres, kan du forsøge at overbevise personen ved forståelse eller kreative spil. En tilstedeværelse af vægtvesten i rummet kan også fremme accept af vægtvesten. Ved et permanent afslag bør brugeren ikke tvinges til at bære vægtveste, men vender brugeren sig til vægtvesten, kan du bruge vægtvesten som følgende:

Prøv at integrere brugs perioderne i hverdagen. Ensartet brug kan bidrage til at øge accepten af vægtvesten. Ofte udvikler brugeren selv en følelse af, hvornår vesten „gør det godt“. Lige så vigtigt som en regelmæssig brug er hvile tiderne også vigtige, hvor hjernen kan lagre de nyligt erhvervede oplevelser og forankre dem i den langvarige hukommelse.

Varigheden af den pågældende tidsperiode afhænger helt af brugerens personlige følelser. Vesten intervenserer i den sædvanlige livscyklus ved at formidle nye stimuli. Folk handler anderledes med denne nye oplevelse. Et eksempel kan være: Et barn, som skal lære at læse og skrive, skal gentage de enkelte øvelser regelmæssigt. Kun efter en vis gentagelseperiode, der består af lærings- og øvelsesfaser, har hjernen opbevaret øvelserne stærkt i den langsigtede hukommelse.

Det er det samme med Beluga vægtvesten den kræver også øvelse at bære så erfaringen med den kan give gode positive resultater på lang tids hukommelsen.

Levetid og garanti:

Ved hjælp vores interne produktion og strenge materialekontrol sikrer vi høj kvalitet og den dermed lange levetid. Levetiden afhænger i høj grad af intensiteten i brugen af vesten. Ifølge vores kunder og vores erfaring er en levetid på 10 år ikke ualmindelig. Vesten skal dog have en regelmæssig kontrol af brugeren eller plejeren.

- Tjek sømenes holdbarhed
- Kontroller om der er huller eller skader.

Vi er overbeviste om vores produkts levetid. Derfor får du 3 års brugs-garanti og en livstidsgaranti på produktionsfejle.