


# TurnAid Transport- og Monteringsvogn

**Varenummer: 6003**  
**Mål: 110 x 100 x 40 cm**  
**Vægt: 28 kg**

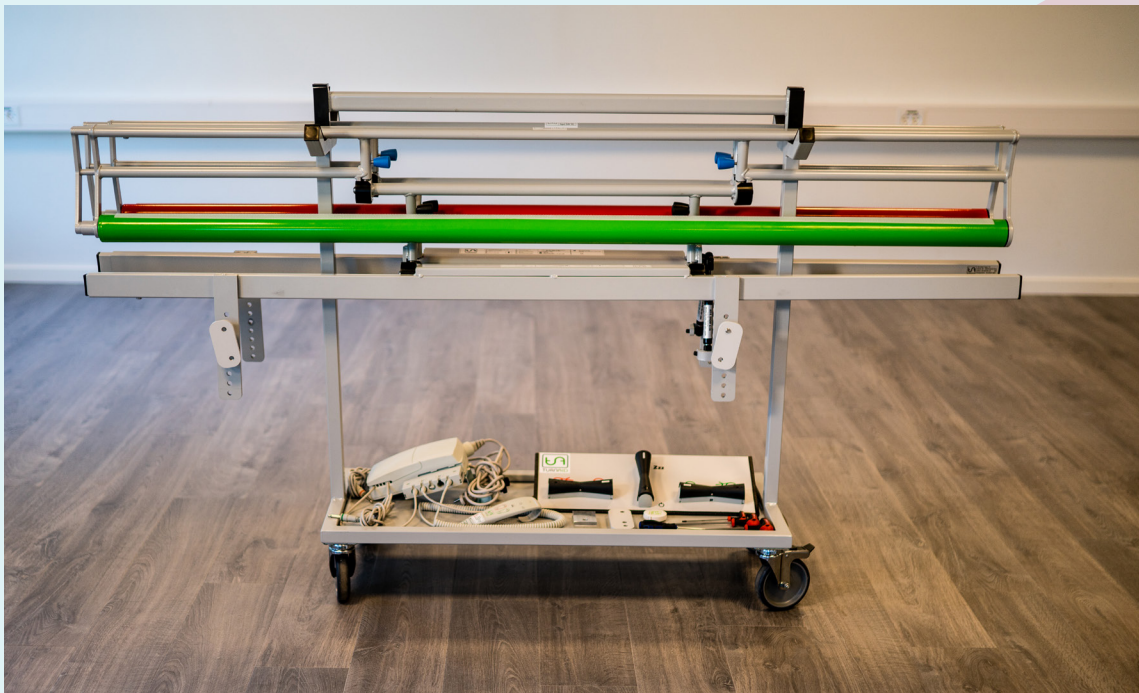

# TurnAid Transport- og Monteringsvogn

Praktisk transportvogn til nem transport af TurnAid vendesystem.

Aflaster montør ved på- og afmontage af TurnAid.

Praktisk designet med en indrammet bundplade til at placere kontrolboksen, fodbetjening, værktøj, tilbehør og reservedele.

Smal nok til at gå igennem enhver dør.

Reducerer løftningen af TurnAid.

## **Montering:**

På hver side af vognen hænges en TurnAid side.

Start med at montere de øverste bolte på TurnAid sidens bagmonteringsplader.

Placer TurnAid- vognen med TurnAid siden så tæt på plejesengen som muligt.

Løft plejesengen så sengerammen kører op i TurnAid beslagene.

Hjælp TurnAid siden fra vognen til plejesengens ramme, og monter beslaget med den nederste bolt på beslaget og bagpladen.

Spænd alle bolte.

