



Kelvin Komfort kørestol

Den ultimative positioneringsløsning

Kelvin Komfort kørestolen er en modulopbygget *tilt in space* kørestol, hvilket giver rig mulighed for at justere og tilpasse stolen. Kørestolens 45° tilt funktion sikrer, at personer med stærk reduceret trunkus stabilitet og deraf nedsat siddende balance får mulighed for at opnå en siddende stilling - ude af sengen. Ligeledes bliver forflytning ind og ud af stolen nemmere, hvilket tilgodeser personalets fysiske arbejdsmiljø.

Individuelt justerbare pudemoduler afhængigt af behovet for trykaflastning

Kørestolen er opbygget af pudemoduler, og modulernes fyldning er en kombination af krøyerkugler og latex skum. Mængden af fyld i hvert modul justeres med udgangspunkt i den enkeltes behov. Derved er det muligt at opbygge stolens moduler, så mennesker med kyfose og eller skoliose får præcis stabil støtte med optimal trykfordeling.

Er der behov for endnu mere trykaflastning kan fyldet udskiftes med NGP kugler. Herved understøttes og vedligeholdes den enkeltes siddestilling bedst muligt, og den enkeltes mulighed for at opretholde eller genvinde et meningsfyldt og aktivt liv øges.

Forskellige positioneringsbælter til forskellige funktionsniveauer

Kelvin Komfort kørestolen leveres nu med en ny fleksibel løsning til montering

af forskellige positioneringsbælter; herved sikres et korrekt træk i positioneringsbæltet. Stolens store fleksibilitet gør det nemt at tilpasse og justere stolen i takt med, at den enkeltes funktionsniveau ændres.

Desuden har kørestolen et rigt tilbehørsprogram, hvor man kan vælge mellem tre forskellige sædeløsninger, tre typer nakkestøtter, to typer betræk, flexarme med og uden tyngde, bord, sidestøtter afhængigt af kropsform, armlæn osv. Herved sikres, at personen får fuldt udbytte af stolens funktioner.

Stor genanvendelighed samt mulighed for gentilpasninger og eftermonteringer

Kelvin Komfort kørestolen har med sin fleksibilitet og rige udvalg af tilbehør en stor genanvendelighed. Make Rehab tilbyder vores kompetencer og service i forbindelse med udførelse af gentilpasning af nye og tidligere indkøbte køre-



stole. For at tilgodese arbejdsmiljøet, er det desuden muligt at eftermontere både el-tilt og hjælperstyret motor på kørestolen. Begge dele skal udføres af Make Rehabs tekniske personale.

Energibalance og øget livskvalitet

Kelvin Komfort kørestolens komfort og unikke tilpasningssystem bidrager med at skabe et afgrænset og trygt miljø for den svækkede person med lavt funktionsniveau. Herved skabes energibalance, hvor personen kan frigøre ressourcer og overskud til eksempelvis at øge eller vedligeholde deltagelse i sociale aktiviteter samt have overskud til at deltage aktivt i spisesituationen. Således kan personen opretholde et meningsfyldt liv, hvilket giver livskvalitet. >

Hvem vil have gavn af en Kelvin Komfort kørestol?


Mennesker som ikke er i stand til at sidde i en almindelig komfortstol. Personer som opholder sig primært i sengen og ikke selvstændigt kan foretage stillingskift. Personer i terminale forløb. Mennesker med smerter, med deformiteter, med risiko for tryksår, med motorisk uro, med respiratoriske udfordringer, med ufrivillige bevægelser, med SI-vanskeligheder og i forbindelse med tidlig mobilisering efter en apopleksi.

I forhold til diagnoser anvendes Kelvin kørestolen ofte til mennesker med demens i de sene stadier, mennesker med Parkinson, mennesker med ALS, mennesker med sklerose, mennesker med Huntington's disease og mennesker med forskellige typer pareser såsom hemiplegi.



Pudeoversigt

- | | |
|-------|------------------------------|
| 1 | Kelvin hovedstøtte |
| 2 | Ryglænsforlænger |
| 3-8 | Rygpuder |
| 10 | Flad sædepude |
| 11 | Sædepude med abduktionsklods |
| 11 A | Kileformet sædepude |
| 12-13 | Ben/underbenspuder |
| 14-15 | Sidepuder |
| 16-17 | Lår sidepuder |
| 18-19 | Underbens sidepuder |
| 20-21 | Flexarm understøtter |
| 22 | Fod-understøttelsespudder |
| 23-24 | Hårde armlæn med pudder |
| 28-29 | Lægstøtter, side |
| 30-31 | Lægpude, posterior |
| 32-33 | Fodpude |

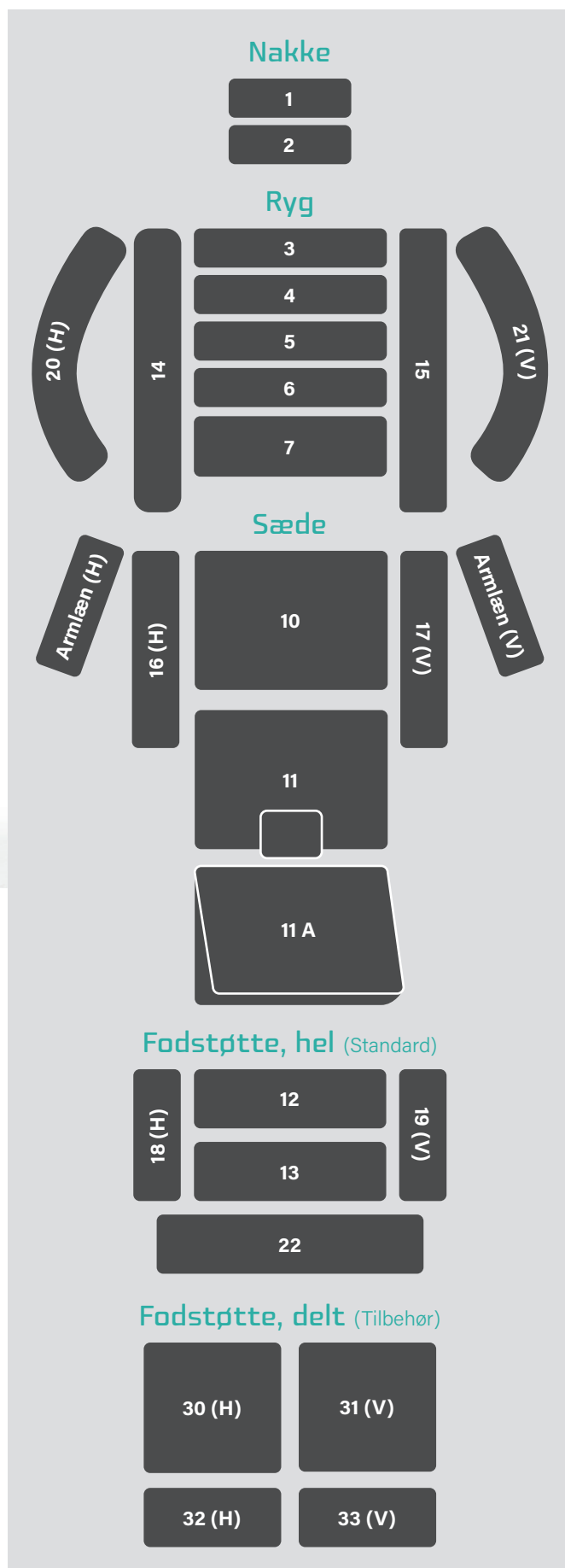



Produktspecifikationer	
Max vægtkapacitet	125 kg
Vægt	Ca. 47 kg
Sædetilt bagud	0 - 45°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Ja
El-tilt kan tilkøbes eller eftermonteres	Kontakt Make Rehab for service og pris
Indstillelige skubbehåndtag	Ja
Indstillelig i hofte-, knæ, og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudedyld	Latex med krøyerkugler. Alternativt NGP kugler

Model – mål i cm	Sæde- bredde	Sæde- dybde	Sæde- højde	Total bredde	Total længde	Ryglæns- højde	Varenr	HMI nr.
Kelvin Komfort kørestol S 40	34-40	40	55	60	130	55	KLV-S40	131505
Kelvin Komfort kørestol S 48	34-40	48	55	60	130	55	KLV-S48	131508
Kelvin Komfort kørestol M 40	40-46	40	55	66	130	55	KLV-M40	131511
Kelvin Komfort kørestol M 48	40-46	48	55	66	130	55	KLV-M48	131514
Kelvin Komfort kørestol M 56	40-46	56	55	66	130	55	KLV-56	131517
Kelvin Komfort kørestol L 48	46-50	48	55	75	130	55	KLV-L48	131520
Kelvin Komfort kørestol L 56	46-50	56	55	75	130	55	KLV-L56	131523

Tilbehør	Varenr	HMI nr.
Nakkestøtte til Kelvin S	KLVR-001	
Nakkestøtte til Kelvin M	KLVR-002	
Nakkestøtte til Kelvin L	KLVR-003	
Edison nakkestøtte til Kelvin	KLVR-004	73686
Edison Junior nakkestøtte til Kelvin	KLVR-164	102246
Flad sædepude nr. 10 (S40) Kelvin	KLVR-076	
Flad sædepude nr. 10 (S48) Kelvin	KLVR-077	
Flad sædepude nr. 10 (M40) Kelvin	KLVR-078	
Flad sædepude nr. 10 (M48) Kelvin	KLVR-079	
Flad sædepude nr. 10 (M56) Kelvin	KLVR-080	
Flad sædepude nr. 10 (L48) Kelvin	KLVR-081	
Flad sædepude nr. 10 (L56) Kelvin	KLVR-082	
Kileformet sædepude Kelvin S40	KLVR-121	
Kileformet sædepude Kelvin S48	KLVR-122	
Kileformet sædepude Kelvin M40	KLVR-123	
Kileformet sædepude Kelvin M48	KLVR-124	
Kileformet sædepude Kelvin M56	KLVR-125	
Kileformet sædepude Kelvin L48	KLVR-126	
Kileformet sædepude Kelvin L56	KLVR-127	
Abduktionssædepude Kelvin S40	KLVR-150	
Abduktionssædepude Kelvin S48	KLVR-151	
Abduktionssædepude Kelvin M40	KLVR-152	
Abduktionssædepude Kelvin M48	KLVR-153	
Abduktionssædepude Kelvin M56	KLVR-154	

Tilbehør	Varenr
Abduktionssædepude Kelvin L48	KLVR-155
Abduktionssædepude Kelvin L56	KLVR-156
Stretch betræk flexarm Kelvin	KLVR-018
Flexarm Kelvin Venstre	KLVR-019
Flexarm Kelvin Højre	KLVR-020
Armlæn højdeindstillelig Kelvin Venstre	KLVR-023
Armlæn højdeindstillelig Kelvin Højre	KLVR-024
Armlæn vinkeljustérbar Kelvin Venstre	KLVR-026
Armlæn vinkeljustérbar Kelvin Højre	KLVR-027
Stretch betræk Kelvin one size	KLVR-015
Inkontinens betræk Kelvin one size	KLVR-166
Bord til Kelvin	KLVR-021
Benstøtter 2-delt sæt Kelvin S	KLVR-031
Benstøtter 2-delt sæt Kelvin M	KLVR-032
Benstøtter 2-delt sæt Kelvin L	KLVR-033
Center benstøtte 90°	KLVR-041
Håndbremse sæt med beslag	KLVR-046
Lændestøttepude kile formet	KLVR-180
Sidestøttepude S	KLVR-181
Sidestøttepude M	KLVR-182
Kropstøttepude 3 cm	KLVR-183
Regnslag til Kelvin S	KLVR-190
Regnslag til Kelvin M	KLVR-191
Regnslag til Kelvin L	KLVR-192

