

## Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande kan være farligt for børn under 3 år.

## Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast og stof efter lokale bestemmelser i de relevante genanvendingsssystemer.

## Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller u hensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

Ordre:            År:            Produkt: Zleep



SRN: DK-MF-000020930- UDI NR. 000020930 Rådets forordning (EF) 2017/745 af 5. april 2017, om medicinsk udstyr, kl. 1. Samt EN12182,

# Oliz®



Oliz® Zleep hvilepose, er en pose som giver tryk og stimulerer muskel-led sansen. Børn kan selv kravle ude og ind af den, og bevæge arme og ben og mærke den modstand det giver. Posen er egnet til børnehave børn.

**Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.**

## Zleep hvilepose

Dansk Design - er produceret i EU - [www.oliz.dk](http://www.oliz.dk)

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

## Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:

Oliz® Zleep hvilepose giver en følelse af et klem/kram på kroppen. Den kan bruges til børn med uro, hvor de har brug for hjælp til at mærke sig selv bedre. Hvileposen giver, særligt børn med nedsat kropsbevidsthed stor gavn af posen. Den kan lynes op nedefra og ved panden har man mulighed for at få et let tryk ved at løfte den øverste del hen over hovedet.

Mål på madras 140x60x8 cm, anbefalet alder fra +2år

<b>Materiale stof:</b>	80% Polyamid 20% Elasthan
Madras:	100% Skum

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

## Pleje instruktioner:

- Må vaskes på 40 grader skånevask
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Betræk lynes af madras og vaskes i maskine. Lyn alle lynlåse ved vask. Hæng Oliz® produktet til tørre på et tørrestativ så der er luft omkring den. Dette giver en hurtig tørring. Vær altid to personer til at påføre betrækket igen.

## Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.

## Vigtige anvisninger:

- Oliz® Zleep hvilepose, bruges til børn i vuggestue og børnehaven. Børnene kan bruge hvileposen, som et sted de kan søge til, når de har brug for at skærme sig selv fra omverdenen. Børnene kan ligge og strække arme og ben mod stoffet, som giver modstand. Dette profiterer børnene af, da de proprioceptive og taktile sanser får stimuli.
- Børn kan altid selv kravle ud af hvileposen hvis de føler ubehag.
- Har man et barn, som er motorisk udfordret, kan man hjælpe barnet ned i hvileposen ved at lukke lynlåsen op i siden og lyne efter barnet er blevet placeret. Hold altid øje med at barnet føler sig tilpas under brug.
- Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet kan give fysiske ubehagelige påvirkninger. Lyn da hvileposen op.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal produktet fjernes. Start evt. med at bruge produktet i korte tidsintervaller, start med 1 min og forøg langsomt over tid, op til den tid der er brug for til barnet, men vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortages sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal barnet tages ud af posen. Der må ikke kastes med produktet, da produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden.

## Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed. Vi anbefaler generelt, at børn, der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- IKKE EGNET TIL ASTMATIKERE!!!