

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Vær 2 personer når produktet flyttes. Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, stof og efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

Ordre: År: Produkt: Lone



SRN: DK-MF-000020930- UDI NR. 000020930 Rådets forordning (EF) 2017/745 af 5. april 2017, om medicinsk udstyr, kl. 1. Samt EN12182, og EN71-1-71-2-71-3

Oliz®



Hvilestolen Lone er specielt designet til personer, der ofte oplever fysisk spænding og rastløshed. Hvilestolen hjælper med til, at give afslapning og lindring i hverdagen. Det som Lone giver, er ro til kroppen og følelsen af, at få en omfavnelse, da de tunge arme ligger hen over barnets krop. Skal bruges til stille stunder og timeout.

Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.

Lone Koala hvilestol

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:

Oliz® hvilestolen er en god støtte ved uro i kroppen og skal bruges i et stille rum i hvileperioder.

Vær for personer til at flytte stolen. Må ikke løftes i armene!

Oliz® hvilestolen er designet til personer fra + 3 år, Max vægt 80 kg.

Størrelse: Længde 1250 mm - Brede 870 mm - Højde 850 mm Vægt: 10 kg

Materiale stof:	100%	Imiteret læder/PU
Materiale indvendig:	100%	EPS kugler
Materiale i bag luffer:	100%	Polyester
Materiale i for luffer:	50%	Polyester/ 50% polyethylene

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes.
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.




Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® hvilestolen kan bruges ved, at placere barnet i stolen, hjælp gerne barnet op hvis den er motorisk udfordret. Stolen hjælper med at føle tryghed og mærker sig selv bedre, da barnet synker lidt ned i stolen og mærker en let omfavelse af kroppen af de store arme.
- Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da stolen ikke må placeres ovenpå barnets krop. Dette kan give forårsage kvælningsfare.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal barnet fjernes derfra. Der kan evt. forsøges med brug af produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale at produktet ikke bliver brugt til dette barn.
- Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.
- **Vigtigt!** Når hvilestolen ikke bruges mere skal den trykkes ovenfra, for at give et nyt barn en god sidde komfort, så kuglerne indeni løsner sig.
- Når hvilestolen skal have mere fyld skal dette gøres i et separat lokale, da kuglerne ikke må spises. Al opfyld foregår gennem lynlås og velcro åbning. Lynlås skal åbnes med en papirclips, ved at stikke clips enden ind i lynlås hovedet og trække i lynlåsen. Se fig.

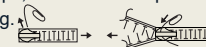

Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at personer, der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.