

# CAREPUR Lejringspuder – HEMI-UNDERARMSPUDE



CAREPUR Hemi-underarmspude er et positioneringshjælpemiddel til de øvre ekstremiteter til både decubitusprofylakse og støtte til decubitusbehandling.

Hemi-underarmspuden er en todelt lejringspude, der ved hjælp af et velcrobånd passer sammen. Lejringspuden anvendes i siddende stilling – specielt i en kørestol – til blød og sikker lejrning af en hemiparetisk arm. Puden kan bruges på både venstre og højre side.

Puden bruges ved at placere den aflange og runde støttebase på højre, venstre eller på begge lår med velcrobåndet opad. Den rektangulære pude med aflange hjørner – som passer anatomisk til kroppen - placeres ovenpå støttebasen med velcrobåndet nedad og trykkes fast i den lejrning, som ønskes. Derved opnås en sikker og stabil trykaflastning.



Når puden anvendes, flytter polystyrenkuglerne inden i puden sig pga. trykbelastningen og tilpasser sig derved patientens anatomiske kropskontur. Den punktelastiske formning understøttes af strækbarheden i pudebetrækkets materiale, hvorved kontaktfladen udvides i de områder, hvor der er risiko for decubitus, hvilket fører til en trykaflastning og trykomfordeling. Dette reducerer risikoen for udvikling af tryksår eller støtter effektivt behandlingen af et eksisterende tryksår.

## Produktspecifikation:

- Pudefyldet består af 100% polystyrenkugler (EPS) med små granulater
- Puden skal desinficeres ved aftørring
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



## CAREPUR Lejringspuder – HEMI-UNDERARMSPUDE

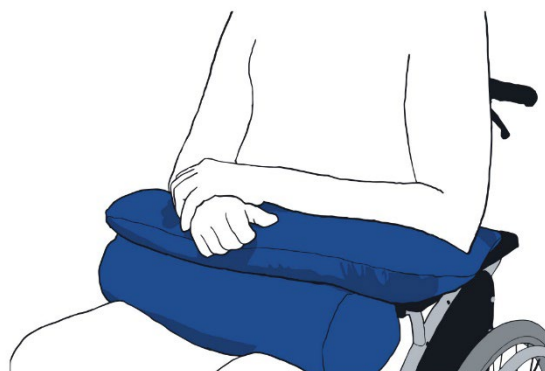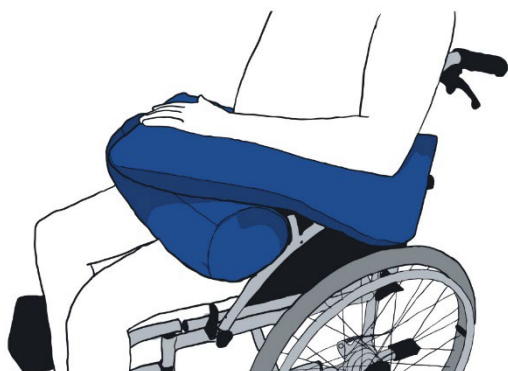

Varenavn	Varenr.	Str.	Mål (LxBxH)	Vægt	HMI-nr.
CAREPUR Hemi-underarmspude, ORANGE	P43785	S	45 x 30 x 20 cm 30 x Ø13 cm	0,54 kg	136589
CAREPUR Hemi-underarmspude, BLÅ	P43786	M	58 x 36 x 20 cm 48 x Ø16 cm	0,77 kg	136592



[CarePartner WebShop](#)

[Brugervejledning](#)