



R82<sup>®</sup>

# R82 Heron

Enkelt design med mange funktionaliteter

# R82 Heron

Bag det rene og enkle design gemmer der sig mange funktioner, der forbedrer både brugerens og hjælperens oplevelse. Sædet er ergonomisk korrekt, hvilket vil sige, at det kan vippes og ryggen kan lænes tilbage uden ulempe for brugeren. Det gennemtænkte design yder komfort til brugeren, da det anatomiske omdrejningspunkt ved hoften bevares under tilbagelæning.

Heron fås i en hydraulisk og en elektrisk version. De har begge samme funktioner med hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, tilt in space og rygvinkling. Ønskes ekstra fokus på optimale arbejdsstillinger og ergonomisk arbejdsmiljø, anbefaler vi den elektriske version.



Heron er vist med tilbehør



35 - 49 cm




40 / 45 cm



55 - 62 cm



max. 100 / 130 kg

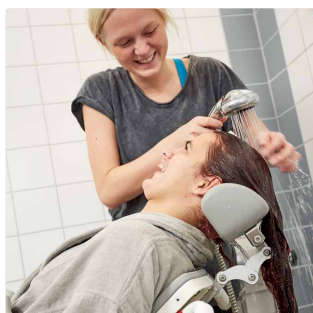


Nem indstilling med elstyring letter bl.a. forflytning til og fra stolen og sikrer optimale arbejdsforhold for hjælperen i flere situationer.



Tilt in space og rygvinkling giver optimale muligheder for god positionering. Sædet kan vinkles -5-25° og ryggen fra 80-120°.




Heron kan bruges til teenagere og voksne. Tilpas stolen ved at indstille ryghøjde og evt. tilbehør – og Heron passer perfekt.

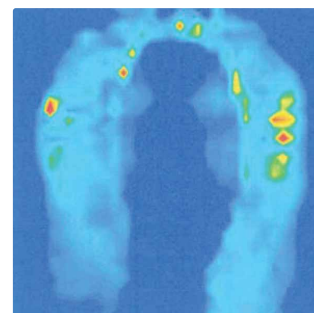

Ved designet af sædet, er der anvendt trykmålinger for at sikre et minimalt tryk og for at forbedre siddekomforten for brugeren.

# Mål og bestilling

Heron fås kun i én størrelse og egner sig til teenagere og unge i overgangen til voksenalderen. Du kan ændre ryghøjden og tilføje et par enkle tilbehørsdele for at ændre sædebredde og sædedybde – det er let at få Heron til at passe perfekt!

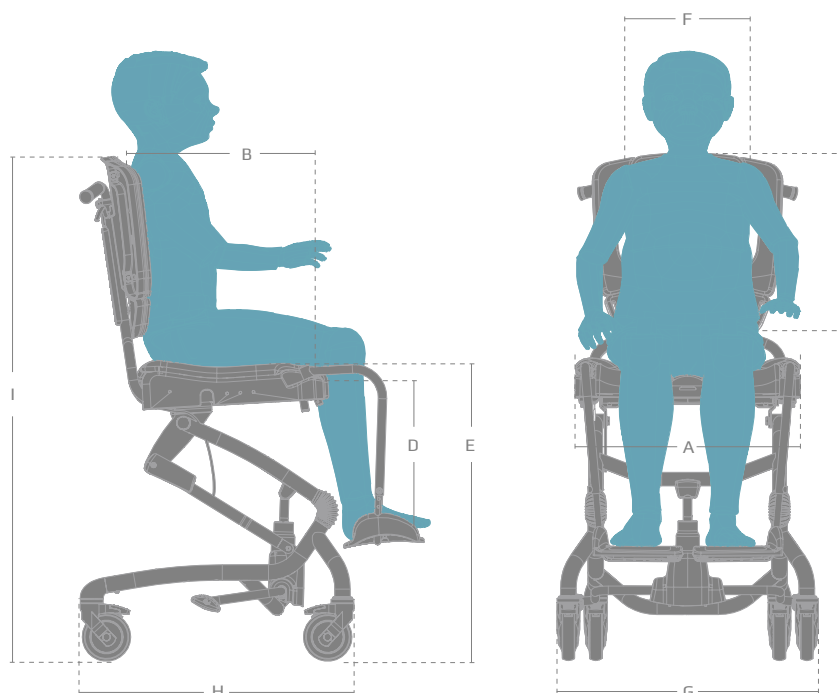

## Mål

	Heron med hydraulik	Heron med el
Sædebredde (A)	55 cm	55 cm
Sædebredde med hoftestøtter (tilbehør)	35 - 49 cm	35 - 49 cm
Sædedybde (B)	45 cm	45 cm
Sædedybde med reduktionssæt (tilbehør)	40 cm	40 cm
Ryghøjde (C)	55,5 - 62,5 cm	55,5 - 62,5 cm
Læglængde (D)	40 - 56 cm	40 - 56 cm
Sædehøjde over gulvet (E)	51 - 78 cm	56 - 78 cm
Rygbredde (F)	29 cm	29 cm
Bredde, stel (G)	67 cm	67 cm
Længde, stel (H)	71 cm	71 cm
Højde, stel med sæde (I)	108 - 135 cm	113 - 135 cm
Sædevinkling (selvstændig vippefunktion)	-5° -> 25°	-5° -> 25°
Rygvinkling	80° -> 120°	80° -> 120°
Vægt, uden armlæn	28 kg	31 kg
Maks. belastning	100 kg	130 kg

## Bestilling

Varenr.	31880505-01	31880505-01ELK
HMI-nr.	84617	105563
OBS!	Leveres uden polstring	Leveres uden polstring, ladekit og kabel

# Perfekte arbejdsforhold



Manuelle løft og skæve eller ubekvemme arbejdsstillinger er højrisiko-aktiviteter for hjælpere<sup>1</sup>. Vi anbefaler derfor at anvende en lift til forflytning af brugere til og fra Heron.

En af Herons fremragende funktioner er den hydraulisk eller elektrisk drevne højdejustering og den selvstændige vippefunktion, som gør, at du kan justere stolen til den helt rigtige position og dermed reducere den tid, du befinder dig i en skæv eller ubekvem stilling.


I familieboliger, hvor det er svært at få plads til en loftsskinne eller en mobil lift i badeværelset,

placeres brugeren simpelthen i stolen, flyttes til badeværelset og køres op i en højde, der er bekvem for brusebadning. Når brugeren skal bruge håndvasken eller toiletet, køres stolen ned igen. Det betyder, at behovet for at forflytte brugeren i badeværelsesområdet, eller i det hele taget at finde plads til en lift i badeværelset, forsvinder.

Med Heron udføres al personlig hygiejne med samme stykke udstyr, hvilket minimerer det nødvendige antal forflytninger.

Til forflytning af brugere til og fra Heron anbefaler vi produkter fra Molift.

1. Occup Environ Med doi:10.1136/oemed-2015-103314. Physical workload and risk of long-term sickness absence in the general working population and among blue-collar workers: prospective cohort study with register follow-up

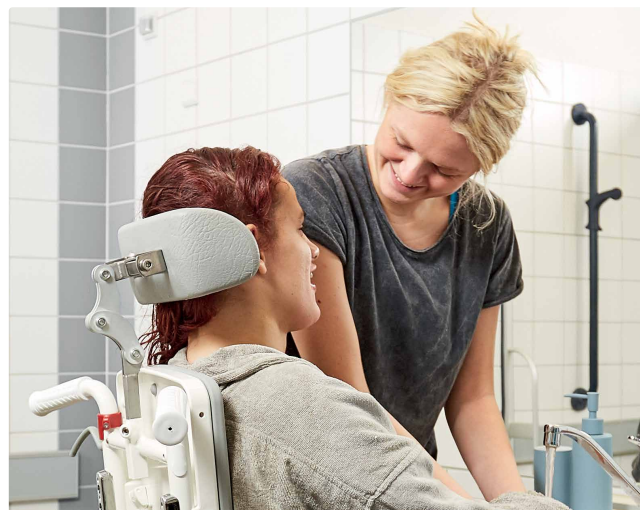

# Tilbehør

Hvis du gerne vil have ekstra komfort og funktionalitet på din Heron, har vi et omfattende sortiment af tilbehør, der dækker dine ønsker og behov.

Når der er sørget for den nødvendige støtte til overkroppen, hovedet og armene, sidder brugeren ekstra behageligt i stolen. Alt tilbehør leveres altid komplet med installationshardware, så montering går let.

Opgrader din Heron ved at tilføje alle mulige smarte funktioner med det rigtige tilbehør.



## Tjekliste!

- Hovedstøtte
- Sidestøtter
- Skulderstøtter
- Veste og seler
- Armlæn
- Bord
- Hoftestøtter
- Abduktionsklods
- Potte
- Sædedybdereduktionssæt
- Fodstøtter
- Lægstøtte
- Hælstop
- Polstring til fodstøtter
- Ladekit og kabel



### Hovedstøtte

For at støtte og korrigere hovedets stilling. F.eks. nødvendig ved bagudklipping. Se separat brochure for yderligere information om tilbehør.

- Hovedstøtte 03, Pur med kort rustfri turtlestang ..... 319903145-00
- Hovedstøtte 05, Pur med kort rustfri turtlestang ..... 319905145-00
- Hovedstøtte 06, Pur med kort rustfri turtlestang ..... 319906145-00



### Polstring til skulderstøtte

For ekstra komfort

Mål: B:10 x H:36 cm

Polstring..... 31880507-04



### Skulderstøtte

Skaber støtte og stabilitet til truncus og skulderåg.

Mål: B:10 x H:36 cm  
(Ryg bredde, top = 48 cm)

Skulderstøtte ..... 31880508-01



### Sædereduktion

Reducerer sædedybden 5 cm


Sædereduktion..... 31880508-06

## Tilbehør



**Sidestøtte, swing-away**  
Sikrer præcis positionering af truncus.

For yderligere info se brochuren  
R82 Tilbehør.

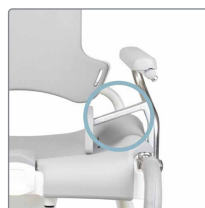

**Afstandskit for hoftestøtte**  
Dette afstandskit indeholder et udvalg af afstandsstykker og bolte. Således er det muligt at yde hoftestøtte og reducere sædebredden i intervallet 35-49 cm 1 cm ad gangen.

Afstandskit hoftestøtte ..... 31880508-02LB



**Faste sidestøtter**  
Sidestøtterne er højde- og vinkeljusterbare, og man kan ved at benytte dem opnå en afstand på helt ned til 20 cm og op til 30 cm mellem sidestøtterne. Kan ikke anvendes i kombination med kit for reduktion af sæde-edybde (31880508-06).

Faste sidestøtter (type 5)  
15 x 15 cm (par) .....31880508-09




**Polstring**  
For øget komfort

Komplet sæt ..... 31880507-01  
Ryg (Bestillingsvare) ..... 31101204  
Sæde (Bestillingsvare) ..... 31117005



**Armlæn**  
Armlænen kan hjælpe bruger ved forflytning og give ekstra støtte til positioneringen.  
Mål: B:5 x L:37 x H:25 cm  
(H = højde over sæde)

Armlæn ..... 31880508-03

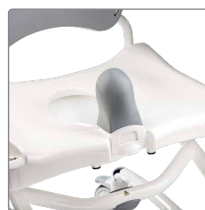

**Urinfanger, høj**  
Ud over at fungere som urinfanger, sikrer den også god positionering af benene og hjælper med at styre adduktion.

Mål: B:8 x H:13½ cm

Urinfanger høj ..... 31880508-05



**Bord**  
Bordet kan bruges til at sikre en mere naturlig udgangsstilling for toiletbesøg, især hvis brugeren har nedsat truncus og hovedkontrol.

Mål: B:44 x D:19 cm

Bord (Bestillingsvare) ..... 31880508-04



**Urinfanger, lav**  
Monteres på samme måde som urinfangeren på 13 cm.

Urinfanger, lav ..... 31880508-07



**Hoftestøtter**  
Giver støtte til bækkenet og sikrer korrekt sædebredde.  
Mål: B:21 x H:10 cm  
Sæde bredde = 35 - 49 cm

Hoftestøtter ..... 31880508-02



**Potte, uden holder**  
Potten gør det muligt at benytte Heron uden et toilet.

Mål: B:20 x D:34 x H:12½ cm


Potte, uden holder ..... 31880130

## Tilbehør



**Låg til bækken/potte**  
Lågene købes separat og passer på de eksisterende bækkener.

Låg til bækken/potte.....31880130-L

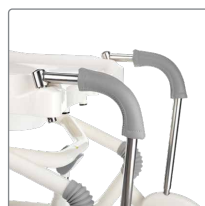

**Polstring til fodstøttestænger**  
For at sikre god komfort til brugeren med kraftig abduktion, så der ikke opstår skader og tryk.

Polstring til fodstøttestænger...31880506-12



**Veste & seler**  
Til at sikre god støtte og korrekt positionering.

For yderligere info se [www.etac.dk](http://www.etac.dk)



**Lægstøtte**  
Støtte til underben.

Mål: H: 10 cm (strophøjde)

Lægstøtte (Bestillingsvare).....31880509-01



**Fodstøtte, lige/snæver vinkel**  
Til støtte og positionering af ben.  
Underbenslængde = 36 - 46 cm

Fodstøtte, lige/snæver vinkel.....31880506-01



**Hælstropper**  
Til korrekt placering af fødderne

Mål: H: 4 cm (strophøjde)  
(5 cm over fodplade)

Hælstropper.....31880509-02



**Fodstøtte med åben vinkel**  
Til støtte af ben.  
Underbenslængde: 36 - 46 cm

Fodstøtte med åben vinkel.....31880506-02



**Ladekit og ladekabel**

Ladekit.....31880510-01  
Ladekabel.....31880510-EU



**100 mm hjul**  
Kit med 4 stk.

100 mm hjul.....31880510-100



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

**Etac A/S**

+45 79 68 58 33

[info@etac.dk](mailto:info@etac.dk)

[www.etac.dk](http://www.etac.dk)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities