



Produktark

DUAL NAKKESTØTTE

Nakkestøtte med flere indstillingsmuligheder.

Dual Nakkestøtte til kørestol er udviklet til komplet støtte af hovedet. Nakkestøttens seks fingre er foret med gelpuder for maksimal komfort.

Fingrene støtter tre forskellige niveauer på hovedet og kan afhjælpe uhensigtsmæssig lateral bøjning og rotation.



- Formbare gelpuder på indersiden for høj komfort
- Flere størrelser
- Høj genbrugsværdi, da nakkestøtten kan gentilpasses til ny borger
- Sikker og stabil positionering
- Let at montere
- Kompatibel med de fleste standard kørestole



Scan koden og se produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Dual nakkestøtte. Det indeholder også visse specifikationer for Dual nakkestøtte.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Dual nakkestøtte

Dual Nakkestøtte til kørestol er udviklet til komplet støtte af hovedet.

Nakkestøttens seks fingre er foret med gelpuder for maksimal komfort. Fingrene støtter tre forskellige niveauer på hovedet og kan afhjælpe uhensigtsmæssig lateral bøjning og rotation.

Nakkestøttens design muliggør luftcirkulation, da den ikke slutter tæt, men i stedet tillader luft mellem de seks fingre. Fingrene er nemme at positionere.

Pandebånd

Et diskret, smalt pandebånd giver støtte foran. Fix lock (klemmespænde) holder pandebåndet på plads. Nakkestøtten kan også bruges uden pandebåndet.

Rengøring og vedligeholdelse

Dual Nakkestøtte er let at holde rent. Nakkestøtten rengøres med en klud med sæbe og vand.

Lad nakkestøtten lufttørre efter vask.

Opbevaring og transport

Når Dual nakkestøtte ikke er i brug, bør den opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys ved temperaturer mellem 0°C til +45°C og ved en relativ luftfugtighed på 20 - 75%.

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Dual nakkestøtte.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Montering

Dual Nakkestøtte er let at montere på forskellige typer af kørestole og er nem at frigøre ved behov for småjusteringer.

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller på 7025 2522 for at høre mere om montering af Dual Nakkestøtte.

Størrelser

Dual Nakkestøtte findes i tre størrelser: Small, large og pædiatrisk (barn).

Tilpasning og specialløsninger

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller på 7025 2522 for at høre mere om bestilling og indstilling af Dual Nakkestøtte.

Kontakt os også gerne omkring specialløsninger i forhold til Dual Nakkestøtte og Kamille eller Kelvin Komfortkørestol.

Desinfektion

Dual nakkestøtte og puder kan desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport

Dual nakkestøtte alene er egnet til land- og/eller lufttransport.

Når Dual nakkestøtte er påmonteret en kørestol, afhænger egnetheden til transport af den pågældende kørestol.

Specifikationer

Vægt nakkestøtte	400-800 gr.
Nakkestøtte skelet	Aluminium
Nakkestøtte polstring	Blødt og slidstærkt nylon/lycra strikstof
Indhold gelpuder	Blød silikonegel
Højde	12 - 15 cm
Bredde	34 - 52 cm
Kompatibel med Kamille og Kelvin Komfortkørestol	Ja
Genanvendelig	Ja
Rengøring	Rengør med en klud med vand og sæbe. Lufttørres efterfølgende.
Desinficerbar	Ja
Produktets forventede levetid	3 år
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	



Bestilling og tilbehør

Model	Centimeter	Varenummer
Omkreds på panden		
Large	56 - 61	0311-999-020
Small	46 - 56	0311-999-021
Barn (pædiatrisk)	36 - 46	0311-999-022
1/2 omkreds bag ørerne		
Large	20 - 30	
Small	15 - 18	
Pædiatrisk (barn)	13 - 15	
Indvendig afstand langs toppen af støtten		
Large	36	
Small	30	
Pædiatrisk (barn)	23	
Indvendig afstand langs midterstøtten		
Large	20	
Small	18	
Pædiatrisk (barn)	13	
Højde på nakkestøtte		
Large	15	
Small	13	
Pædiatrisk (barn)	12	
Tilbehør		
Dual arm		0311-999-023
Axion Rotationsarm, 60 grader		0311-999-030
Axion Rotationsarm, 90 grader		0311-999-031