

Trådløs Bluetooth høreforstærker Amplicall iBT10



Brugervejledning

Se venligst hjemmesiden: www.geemarc.com for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, du skal være opmærksom på.

Æskens indhold:

- 1 x Brugervejledning
 - 1 x iBT10 Bluetooth TM-enhed
 - 1 x Øre-headset med gummipuder
 - 1 x 3.7V Li-ion genopladeligt batteri
 - 1 x USB-type C / USB A-kabel til genopladning
 - 1 x Magnetisk halssløjfe (iBT10 LOOP-mulighed)
 - 1 x Lanyard og bælteclips 1 Brugervejledning
-


Side	TRIN 1: MONTER OG OPLAD BATTERIET
7 -9	Montering af batteriet
	TRIN 2: TILSLUT ØRETELEFONHEADSETTET ELLER HALSSLYNGEN
9	Halsteleslynge og Øretelefon-headset (ikke-høreapparatbrugere)
	TRIN 3: PARRING AF IBT10
11-13	Sådan parres iBT10 med din smartphone, Smart TV og en enhed, der ikke har en skærm/menu og til to enheder
	TRIN 4: LYT TIL LYD / TV FRA EN PARRET ENHED
16-17	Justering af lydstyrke og Tonejustering
	BRUG MED Halsteleslynge
18	Mikrofon
	FORETAGELSE/MODTAGELSE AF OPKALD
19	Foretag opkald og modtag opkald via iBT10
20	Modtagelse af opkald, mens du afspiller musik / lytter til musik
21	Deaktivering af tekniske specifikationer for iBT10 og ECO MODE
22	Fejlsøgning, batterisikkerhed og bortskaffelse af elektronik
23	Garanti
24	Genanvendelsesdetektiver

INTRODUKTION

Geemarc iBT10 Bluetooth forstærker med headset.

Denne brugervejledning er til iBT10 med øretelefoner og iBT10 LOOP til brug med høreapparater, der har en T-indstilling (Telespole). iBT10 / iBT10 LOOP kan parres med andre enheder, der har Bluetooth TM, herunder smartphones, smart-tv'er, tablets og computere.


iBT10 er genopladelig og leveres med et Type C USB-opladerkabel. For optimal anvendelse af din iBT10 skal du følge anvisningerne i denne brugervejledning. Gem brugervejledningen til fremtidig reference.



Advarsel: For brugere med pacemaker 

Hvis du har en pacemaker, anbefaler vi, at du taler med din læge eller kvalificerede sundhedsrådgiver, før du bruger dette produkt.

Bemærk: Det er vigtigt, at du læser instruktionerne nedenfor for at udnytte din iBT10 til deres fulde potentiale.

Kontrol, tilslutninger og indikatorer (LED'er).

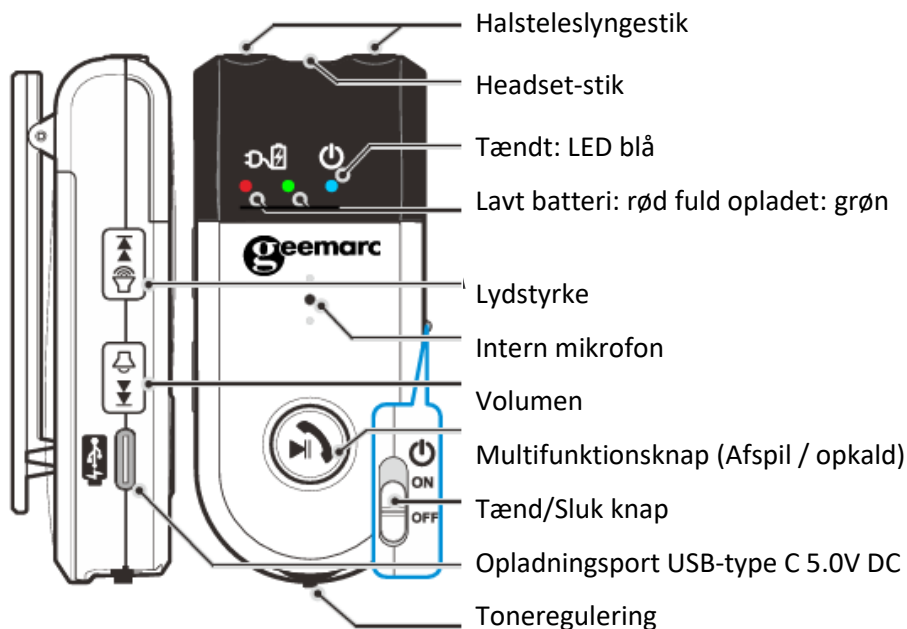

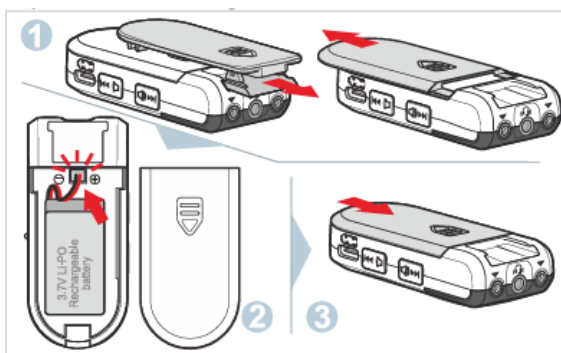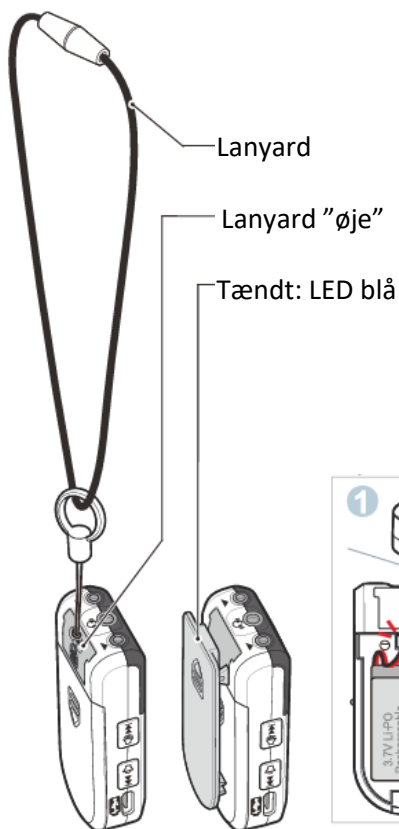

TRIN 1: MONTER OG OPLAD BATTERIET IBT10


VIGTIGT: Før du monterer batteriet, skal du sørge for, at ON/OFF-kontakten står på OFF. Tag bælteclipsen af, og skub batteridækslet op.

Leveres med et genopladeligt lithiumbatteri. (Brug kun et originalt batteri)
Oplades i 7 timer før første gangs brug.

BEMÆRK: Brug ikke andre typer genopladeligt batteri sammen med dette produkt. Tilslut forsigtigt den korte sorte (-) og røde (+) ledning fra batteriet til stikket inde i batterirummet (markeret - og +). Sæt batteridækslet på igen.

Opladning af batteri

Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB Type -C -stikket på siden af iBT10. Tilslut den anden ende af kablet til en godkendt standard USB 5V -netadapтер (medfølger ikke).

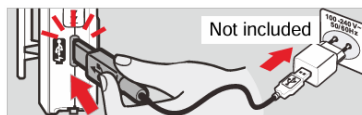

Sæt USB-adapteren i en stikkontakt.

Opladningsindikator-LED' en på iBT10 viser RØD.

Det betyder, at batteriet oplades.



Fortsæt opladningen, indtil opladningsindikatoren på iBT10 viser GRØNT, der betyder, at batteriet er fuldt opladet. Tag USB-opladerkablet ud af iBT10.

BEMÆRK: Vi anbefaler, at du fjerner USB-adapteren fra stikkontakten.

Lavt batteri

Når batteriet er lavt hører du 5 hørbare 'bip' gennem øretelefonerne/teleslynge. For at undgå at reducere batteriets levetid skal iBT10 oplades hurtigt muligt.

TRIN 2: TILSLUT ØRE/hovedtelefonheadset eller halsteleslynge

Øre-/hovedtelefonheadset (ikke-høreapparatbrugere)

Sæt i 3,5 mm jackstikket øverst i midten på iBT10.





Halsteleslyngen sættes i de to stik

Halsteleslyngen er til brug med høreapparater, der har en T-indstilling (Teleslynge).

Tag halslyngen over hoved, "som en halskæde".

Vælg Teleslyngeprogram på høreapparaterne.

Justere evt. lydstyrken på iBT10 og/eller på dine høreapparat for at opnå et optimalt lydniveau.

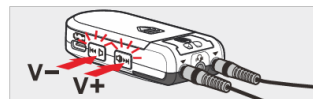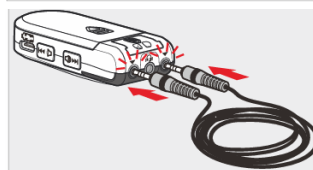

BEMÆRK: Ikke alle høreapparater har en

T-indstilling, eller den er muligvis ikke aktiveret.

Kontakt din audiolog/hørspecialist for yderligere vejledning. Tilslut ikke øre-/hovedtelefon headset og halsteleslynge til iBT10 på samme tid.



TRIN 3: PARRING AF iBT10

For at bruge iBT10 skal den parres med din Bluetooth TM-enhed, såsom din smartphone, smart-tv, computer eller tablet.

iBT10 kan oprette forbindelse til to enheder, der har Bluetooth TM version 5.1 – se afsnittet om Brug af iBT10 med to enheder.

Hvordan parrer du iBT10 med din smartphone?

1. Sæt ON/OFF-kontakten på siden af iBT10 i positionen ON (blå LED blinker til og fra).

2. Tryk på knappen PLAY / CALL, og hold den nede, indtil den RØDE og BLÅ LED blinker.

3. Gå til Indstillinger på din smartphone. Forbindelser Bluetooth og start søgning.
4. Se iBT10 anført under 'tilgængelige enheder' - klik / vælg iBT10 for at parre. Hvis du skal indtaste en PIN-kode, skal du bruge **0000**.
5. iBT10 skal nu vises i 'parrede enheder' på din smartphone.
BEMÆRK: Den nøjagtige procedure kan variere afhængigt af smartphone-mærke og model.
6. Den BLÅ LED vil være tændt. iBT10 er nu parret med smartphonen til opkald og medielyd.

BEMÆRK: For at parre iBT10 med en anden enhed skal du gentage pkt. 1-5 procedure fra (1.) og se enhedens manual til Bluetooth-parring. Sørg for, at du er uden for rækkevidde af andre enheder, der allerede er parret med iBT10, eller sluk for de andre enheders Bluetooth-forbindelse.

Sådan parres iBT10 med et smart-tv

Mange Smart-tv'er har Bluetooth TM.

1. Sæt ON/OFF-kontakten på iBT10 i positionen ON (blå LED blinker til og fra).
2. Tryk på PLAY/CALL, og hold den nede, indtil den RØDE og BLÅ LED blinker.
3. Tryk på MENU-knappen på TV-fjernbetjeningen, og gå i Tv'ets indstillinger.
4. I indstillingsmenuen skal du kigge efter 'Bluetooth-fjernbetjening og tilbehør' eller lignende menuliste. Følg vejledningen på skærmen for at parre med iBT10. Den nøjagtige procedure ovenfor kan variere afhængigt af dit tv's mærke og model. Se Tv'ets brugervejledningen for yderligere vejledning.

Sådan parres iBT10 med en enhed uden display / menu

BEMÆRK: Kontroller, at enheden accepterer 0000 PIN-koder. Disse oplysninger skal angives i brugervejledningen til enheden.

1. Sæt ON/OFF-kontakten på siden af iBT10 til **ON** (blå LED blinker).
2. Tryk på PLAY/CALL, og hold den nede, indtil den RØDE og BLÅ LED blinker.
3. Aktivér søgning på den Bluetooth TM-enhed, som iBT10 skal parres med.
4. Når blå LED er tændt, er iBT10 klar til parring med din Bluetooth TM-enhed.

Brug af iBT10 med to enheder

Det er muligt at parre iBT10 med to enheder og nemt skifte mellem dem.

Par først iBT10 med første enhed A (f.eks. en smartphone se beskrivelse ovenfor). Sluk for Bluetooth-funktionen på første enhed A.

Par nu iBT10 med en den anden enhed – enhed B (for eksempel et smart-tv som beskrevet ovenfor). Tænd herefter Bluetooth-funktionen på enhed A igen.

Kontroller, at begge enheder er parret og tilsluttet iBT10. Afspil lyde fra både enhed A og B. - iBT10 afspiller lyden fra enhed B. Tryk to gange på knappen PLAY/CALL for at afspille lyden fra enhed A, tryk to gange på PLAY/CALL igen for at skifte tilbage til ENHED B.



BEMÆRK:


1. Både enhed A og enhed B skal afspille lyde for at skifte mellem enhederne.
2. iBT10 behandler telefonopkald som en prioritet. For eksempel, hvis enhed A er en smartphone, og enhed B er et smart-tv, og du lytter til smart-tv'et, skifter iBT10 automatisk til enhed A, når der er et telefonopkald. Når opkaldet er afsluttet, vender iBT10 automatisk tilbage til enhed B.

TRIN 4: LYT TIL LYD / TV FRA EN PARRET enhed



Når du har parret iBT10 med din smartphone / smart-tv / eller en anden enhed, kan du lytte til lyd/tv. Tilslut øretelefon-headset i 3,5 mm jackstikket øverst på iBT10 eller sæt halsteleslyngen i de to mindre 2,5 mm jackstik på hver side af hovedtelefonstikket.


Justere evt. lydstyrke og tone – se afsnittet om lydstyrke og tonejustering.

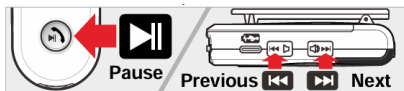
Med nogle enheder, såsom en smartphone, kan du sætte lydsporet på pause ved hjælp af knappen PLAY/CALL og springe til næste lydspor ved hjælp af lydstyrkekontrollerne  /  på iBT10 (denne mulighed findes ikke i alle filformater, platforme og enheder).







Sæt forrige på pause ved siden af PAUSE lydsporet. Tryk på knappen PLAY/ALL på iBT10. For at genoptage afspilningen af lyden skal du trykke på knappen PLAY/CALL igen.

For at springe til næste lydspor eller gå til det forrige spor skal du trykke og holde VOLUME-knapperne  /  på siden af iBT10 nede.

Tryk på knappen  og hold den nede for at springe til næste lydspor.

Tryk på knappen  og hold den nede for at gå til det foregående spor.

BEMÆRK: Du kan også justere enhedens lydstyrke ved hjælp af VOLUME-knapperne  /  (Lydstyrkejustering).

Du kan justere lydniveauet fra hovedtlf./halsteleslynggeudgangen, mens du lytter til lyden, ved at trykke på knapperne til justering af lydstyrken på siden af iBT10. Tryk på knappen  for at øge lydstyrken. Tryk på knappen  for at sænke lydstyrken.

BEMÆRK: Der høres et hørbart bip under lydstyrkejustering. En enkelt høj tone under lydstyrkejustering betyder, at lydstyrken er maksimal. En enkelt tone med lavere tonehøjde under justering af lydstyrken betyder, at lydstyrken er på et minimum.

Anbefalinger:

Indstil lydstyrken til et niveau, der er behageligt at høre. Hvis lydniveauet er for højt i længere tid, kan det beskadige din hørelse.

Tonejustering

Du kan justere tonen, mens du lytter, ved at skubbe tappen i bunden af iBT10.



Du kan øge diskanttonerne (højfrekvente) eller bastonerne (lavfrekvente).

Skub tappen til venstre for at øge diskanten (formindsk bassen).

Skub tappen til højre for at minimere diskanten (øge basen).

Tryk på håndtaget for at indstille tonen til standardindstillingen (mellemtone).

BEMÆRK: Under tonejustering høres en dobbelt hørbar 'bip' tone ved maksimale diskant- og basindstillinger.

Der høres en enkelt biptone ved standardindstillingen (mellemtone).

Brug af iBT10 med halsteleslynge

Lyt til musik / tv, foretag eller modtag telefonopkald.

Har du parret iBT10 med dine smartenheder, kan du modtage lyden direkte i dine høreapparater.

- Skift program til T-tilstand (teleslynge).
- Indsæt halsteleslyngen i de to stik, øverst på iBT10 og tag den rundt om halsen.
- Nu kan du lytte til musikken fra din smartenhed.

Du er klar til at tale gennem din iBT10, hvis den er parret med din smartphone.

- Knapper og kontroller er de samme som vi beskrev ovenfor.

Mikrofon iBT10 er indbygget, og giver dig mulighed for at foretage / modtage opkald fra din mobiltelefon, når du bruger halsslyngesystem.



BEMÆRK: Stikkene på halsteleslynge frigøres, hvis enheden bliver viklet ind i kablerne for at undgå skader på nakken. Hvis dette sker, skal du sætte stikket i stikket igen for at genoptage normal drift.

Foretag eller modtag opkald med iBT10

Med iBT10 parret til din smartphone er det muligt at foretage og modtage opkald (via headset eller halsteleslynge).

BEMÆRK: iBT10 har en indbygget mikrofon, der giver dig mulighed for at tale med din opkalder. Hvordan foretager man et opkald via iBT10? Sæt ON/OFF-kontakten på siden af iBT10 i positionen ON. Vælg din telefonkontakt, eller ring til telefonnummeret på din smartphone, og start derefter opkaldet. Du kan starte opkaldet med din iBT10 automatisk. Du skal muligvis justere lydstyrken på iBT10 for at høre opkaldet bedre. Modtagelse af et opkald Sæt ON / OFF-kontakten på siden af iBT10 til ON-position Når du modtager et opkald, blinker de røde og blå lysdioder, og ringetonen eller melodien fra smartphonen høres gennem ørestykkets headset / halssløjfe. Tryk på knappen CALL / PLAY [] for at besvare opkaldet.

Garanti 2 år.

Geemarc produkter er produceret og testet i henhold til gældende regler og af nøje udvalgte materialer og med de nyeste udviklede teknologier der sikrer problemfri funktion og en lang levetid. Garantien er 2 år, gælder ikke for de genopladelige batterier eller strøm-forsyninger til produkterne. Skader forårsaget som følge af forkert håndtering, drift, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation, er force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke omfattet af betingelser for garanti. I tilfælde af reklamation, forbeholder vi os ret til at reparere eller udskifte defekte dele eller give en erstatningsenhed. Indsend dit Geemarc udstyr sammen med købsfaktura.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup
Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk