


Visit telefonsender

BE1431

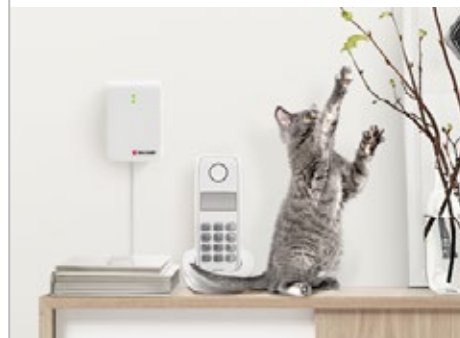

 Bellman & Symfon®



Funktioner

Virker til alle fastnet telefoner

Flere forbindelser
Tre separate indgange til udløsere

Tilpasset notifikation
Vælg en for hver udløser

Batteri, der holder længe
Op til 10 års batteritid

Sikker radioforbindelse
Op til 250 m rækkevidde

Hold kontakten med dem, du holder af

Telefonsenderen fra Bellman & Symfon er en del af Visit-systemet til det intelligente hjem, der hjælper dig med at bevare overblikket over dit hjem.

Den kan bruges til at registrere din fastnettelefon.

Sådan virker det

Når telefonsenderen bliver aktiveret, sender den et signal til din Visit-modtager, der giver dig besked med lyd, blink eller vibrationer (afhængigt af modtageren).

Den er udstyret med tre udløsere, der ud over registrering af telefonopkald kan bruges til:

- Et kontaktmåtte-tilbehør
- Et magnetisk kontakt-tilbehør
- En eksisterende dørklokke mv.

Telefonsenderen giver dig mulighed for at vælge en individuel alarm for hver udløser, og den bruger en robust radioforbindelse, der dækker hele dit hjem. Den er meget nem at sætte op, kræver nærmest ingen vedligeholdelse og fungerer i årevis på standardbatterier.

Tekniske specifikationer




Størrelse og vægt

- Højde: **100 mm**
Bredde: **65 mm**
Dybde: **27 mm**
Vægt: **120 g (inkl. batterier)**



Knapper og stik

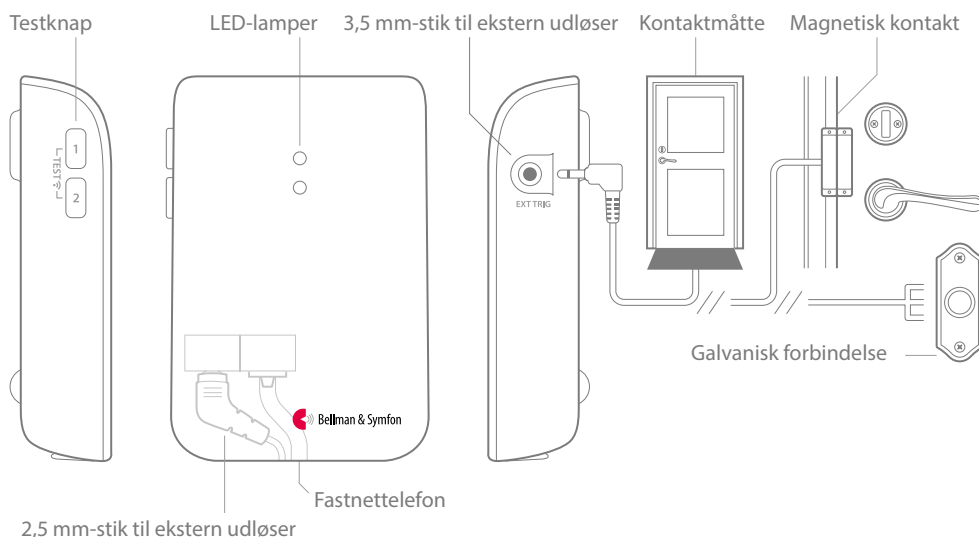

Indgange/udgange

- RJ11-indgang til analogt telefonnet
- 3,5 mm ekstern udløser-indgang til andet tilbehør

Aktivering

- Testknapperne og fastnettelefonen
- Kontaktmatte eller magnetisk kontakt-tilbehør
- En dørklokke eller lign. forbundet til ekstern udløser-indgangen

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz afhængigt af område
- Rækkevidde: 50-250 m, afhængig af radiofrekvens og bygningens karakteristika

Strøm og batteri

- Strømforsyning
Batteristrøm 2 stk. AA-batteri, 1,5 V, litium eller alkaline
- Strømforgbrug
Aktiv < 70 mA, standby < 15 µA
- Driftstid
Alkaline ca. 5 år, litium ca. 10 år

Antal radionøgler

- 64 som standard. Op til 256 med valgfri software.

Vedligeholdelse og rengøring

- Vedligeholdelsesfri. Aftørres med en tør klud.
- Anvend ikke husholdningsrengøringsmidler, spraydåser, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller skuremidler.
- Kan ikke genbruges.

Miljøkrav

- Kun til indendørs brug.
- Temperatur: 0 til 35 °C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Æsken indeholder

- Visit-telefonsender BE1431
- 2 stk. AA-alkalinebatterier, 1,5 V
- Velcro til vægmontering
- Vådserviet med sprit
- Skruer og rawlplug
- Brugervejledning



Tilbehør

Følgende fås som tilbehør:

- Magnetisk kontakt BE9251
- Kontaktmatte BE9026
- Ekstern udløser-kabel BE9253 (3,5-mm stik)

© 2021 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1431_001DAS003_DK

bellman.com