


Contrelle® Activgard


Giver dig mulighed for at håndtere stressinkontinens. Hovedsagen til stressinkontinens er svag bækkenbundsmuskulatur, ofte forårsaget af fødsler eller forandringer i forbindelse med overgangsalderen. Når bækkenbundsmuskulaturen svækkes, synker blæren ned og vinklen på blærehalsen ændres. Dette bevirker, at musklerne i bækkenbunden ikke længere er under fuld kontrol i forbindelse med belastninger.

Unikt design og funktion

Contrelle® Activgard

Materialet er blødt formstøbt poly-uretanskum. Contrelle® Activgard bøjes sammen inden indføring, og elasticiteten vil få den til at rette sig ud i vagina. Dette giver en blød og fjedrende effekt, som understøtter blæren samtidig med, at den smidigt følger kroppens bevægelser.

Den ydre overflade af Contrelle® Activgard er specielt designet til at presse mod blærehals og endetarm. Det er derfor vigtigt, at den placeres korrekt, som vist på tegningen

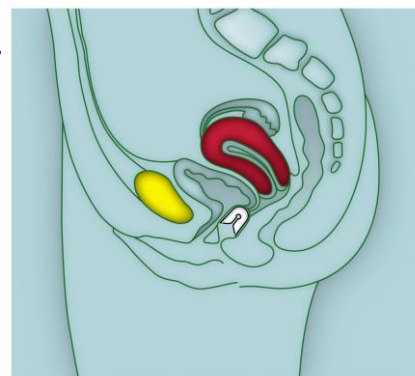

Let at bruge

Contrelle® Activgard indføres som en tampon, og kan hverken ses eller føles. Den gennemvædes med vand inden indføring, hvilket hindrer, at Contrelle® Activgard absorberer fugtighed fra slimhinderne i vagina. Contrelle® Activgard er et ukompliceret hjælpemiddel, der angriber problemet i stedet for symptomerne.

Kombinationen af bækkenbundstræning og Contrelle® Activgard, hjælper brugeren til at opnå en korrekt vinkel på blærehalsen og dermed kontrol over vandladningen.



Blød og fjedrende elasticitet.
Følger kroppens bevægelser.

Mange fordele

Contrelle® Activgard er et ukompliceret og effektivt hjælpemiddel til kvinder med stressinkontinens.

Et normalt liv igen

Ved at give kvinder kontrollen over blære og vandladning tilbage, tillader Contrelle® Activgard kvinder at leve normalt igen. Kvinder skal ikke længere leve med den usikkerhed, som pludselig ufrivillig vandladning kan give og behøver ikke være nervøse for at skulle skifte bind eller bekymre sig om lugtgener. Kvinder kan leve præcist samme liv, som inden de blev inkontinente.

Usynlig og diskret

Contrelle® Activgard placeres i skeden og er lige så usynlig og diskret som en menstruationstampon. Den kan anvendes i op til 16 timer pr. døgn.

Contrelle® Activgard er et engangsprodukt og skal ikke genbruges.

Normale toilet besøg

Det er ikke nødvendigt at fjerne Contrelle® Activgard ved toiletbesøg. Contrelle® Activgard trykker ikke på urinrøret, men understøtter blærehalsen således, at den naturlige kontrol genoptages.

Anvendelse

Contrelle® Activgard kan anvendes i op til 16 timer pr. døgn. Den skal fjernes før samleje og kun anvendes under graviditet efter samråd med læge. Ved menstruation bør Contrelle® Activgard skiftes hver 4-6 time. Den kan anvendes samtidig med, at der anvendes bind. Tampon og Contrelle® Activgard kan ikke anvendes samtidigt.



Tre størrelser

Contrelle® Activgard findes i 3 størrelser og brugeren må eksperimentere sig frem til, hvilken størrelse, der er bedst. I begyndelsen vil nogle kvinder opleve en let irritation indtil de bliver vant til at anvende produktet. Der kan sammenlignes med tilvænning af kontaktlinser.

Bækkenbundstræning

Contrelle® Activgard er ingen erstatning for bækkenbundstræning, men vil forstærke træningen og er et supplement i de tilfælde, hvor bækkenbundstræningen ikke giver den optimale effekt.

TSS

Toxic Shock Syndrome er meget sjældent. Bland de få kendte tilfælde var halvdelen kvinder, der anvendte tampon. I de fleste tilfælde drejede det sig om yngre kvinder, som anvendte tamponer med stor absorberingsevne. Contrelle® Activgard har ingen absorberingsevne ved korrekt anvendelse i form af gennemvædning med vand før brug.

Ingen ændringer i PH eller bakterie forhold

Ved undersøgelser i Danmark er ingen ændringer i Ph værdier eller bakterieflora påvist. Øget frekvens af vaginitis, blærebetændelse eller slimhindeirritation kunne heller ikke påvises. Lidt glidecreme kan gøre indføringen af Contrelle® Activgard lidt lettere, og ældre brugere kan have fordel af lokal hormonbehandling.

Kort brugsvejledning

Contrelle® Activgard er lige så let at anvende som en almindelig tampon.

- Contrelle® Activgard gennemvædes med rindende koldt vand.
- Contrelle® Activgard lægges omkring applikatoren, ved at placere snoren omkring den nederste ende af applikatoren og lade toppen af applikatoren hvile i Activgard fordybningen.
- Applikator og Contrelle® Activgard føres ind i vagina indtil rillerne på applikatoren.
- Fjern snoren fra applikator og træk applikatoren ud. Rengør applikator, så den er klar til brug igen.
- Contrelle® Activgard fjernes ved let træk i snoren.



Contrelle® Activgard skal gennemvædes med vand inden indføring.

Størrelse 1 Ref. 76.1001 30 stk. pr. pakke

Størrelse 2 Ref. 76.1002 30 stk. pr. pakke

Størrelse 3 Ref. 76.1003 30 stk. pr. pakke

Hver pakke indeholder en applikator

Eventuelle Spørgsmål

Kontakt Region Sjælland + Region Hovedstaden

Anne Ringsholm
Produktspecialist/Sygeplejerske
Tlf.: 4912 1186
Mobil 2926 3323
E-mail : ar@codandeha.dk

Region Syd-danmark + Region Midtjylland

Tina Hansen
Produktspecialist/Sygeplejerske
Tlf.: 4912 1187
Mobil 2326 5702
E-mail : tih@codandeha.dk

Region Nordjylland + Region Midtjylland

Lisette Søgaard
Produktspecialist/Farmakonom
Tlf.: 4912 1189
Mobil 3052 6466
E-mail : ls@codandeha.dk

Contrelle ® Activgard forhandler liste

Contrelle Activgard kan **bestilles** på **apoteket** og hos nedennævnte forhandlere:

Abena A/S

Egelund A 35
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 31 05 00
abena@abena.dk
www.abena.dk

Homecare ApS

Viadukt Alle 16
2900 Hellerup
Tlf.: 48 14 19 39
info@homecare.dk
www.homecare.dk

Danpleje OneMed Denmark A/S

P.O.Pedersensvej 16
8200 Århus N
Tlf.: 86 10 91 09
danpleje@onemed.com
www.danplejeonemed.dk

Mediq Danmark

Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby
Tlf.: 36 37 91 00
info@mediqdanmark.dk
www.mediqdanmark.dk

Firma Kristine Hardam A/S

Måbjerg Skolevej 48
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 32 33
post@hardam.dk
www.hardam.dk

Props and Pearl

Nikolajs Plads 23
1067 København K
Tlf.: 35 25 14 40
info@propsandpearls.com
www.propsandpearls.dk

Design Care

Vestergade 32, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf.: 28 80 17 33
KVM@DESIGN-CARE.dk
www.design-care.dk

Svaneklinik

Lyngby Hovedgade 27-29, 2.sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 01 10
kontakt@svaneklinik.dk
www.svaneklinik.dk