

Optima - med fokus på omsorg



Alum Bergen™

- **Total længdekompensering**
Sikrer brugeren optimal sidestilling, ligesom cher undgås
- **Sæde/ryg med benstøttefunktion og tilt (hjelperbetjent)**
Ryg og benstøtter justeres mod vandret og sædet kipper bagover.
Der opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres.
- **Stropryg, hvis vinkel kan justeres trinløst af hjælper**
Sikrer optimal tilpasning til brugers ryg
- **Mulighed for ekstra moduler og tilbehør**



Med Optima har vi udviklet en enkel og funktionel komfortkørestol, der lever op til tidens krav om siddekomfort og løsninger, der har fokus på brugere og hjælpere. Stolen er blevet til gennem mange års opsamlet know-how i tilpasning af kørestole til mennesker med et meget stort behov for god siddekomfort. Optima er helt igennem et kvalitetsprodukt hvad angår valg af materialer, stolens fleksibilitet og muligheder.

Optima er udstyret med to funktioner i sædeenheden:

1. Sæde/ryg, benstøttefunktion og tilt, hvor ryg og benstøtter justeres mod vandret og sædet kipper bagover.

Der opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres af en hjælper.

2. Tiltfunktion, hvor sædeenheden kan tilte dels bagover dels forover. Tilt forover giver en optimal arbejdsituation for bruger, ligesom det letter ind- og udstigningen af kørestolen.

I hele sædeenheden er der længdekompensering.

1



Greb

til centralbremse sidder så det let kan betjenes af bruger.

Til personalets brug, kan der monteres en fodbremse bag på kørestolen(tilbehør).

2



Ryggen

har stropper som let kan indstilles til brugerens ryg.

3



Funktionerne

betjenes af hjælper via håndtag. Håndtagene bruges til tilt og sæde/ryg/benstøttefunktionen

4



2 delte lægstøtter

Er til stor fordel for personalet.

Brugerens ben skal ikke løftes over lægstøtten når benstøtten skal tages af/svinges ud til siden. Ved at trække i udløserhåndtaget (pil1) vipper lægstøtten tilbage (pil2) og man kan nu løfte foden fri fra fodpladen. Herefter kan **benstøtterne** ved at trække i udløserhåndtaget (pil3) tages af/svinges ud til siden.

5



Drivhjul

kan i stelsiden balanceres fremad eller bagud.

Optima - med fokus på omsorg




| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Stel: | Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet. |
| Sædeenhed: | Justerbar i dybde og vinkel. |
| Sæde/ryg/ benstøt- tefunktion og tilt: | Regulerbar via håndtag på kørebøjle. |
| Plansæde: | Træ med gummigjorder. Betræk i skai. |
| Sædepude: | Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj. |
| Ryg: | Justerbar i vinkel, opbygget med gjorder. |
| Rygpolstring: | Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende. |
| Kørebøjle: | Stålrør med PV-skum. |
| Armlæn: | Polstrede, højde/ vinkeljustering. Opklappelige. |
| Benstøtter: | Svingbare, aftagelige, højdejusterbare. |
| Lægstøtter: | Polstrede, justerbare i højde, dybde, bredde. |
| Fodplader: | 2- delte. Stål med rillegummi, justerbare i vinkel og højde. |
| Drivhjul: | 22" højtryksdæk m/ plastdrivringe. |
| Svinghjul: | 7" punkterfrie. |
| Bremser: | Centralbremse, brugerbetjent. |
| Antitip: | Justerbare i højde. |
| Autobespænding: | 4. punkt |
| Stof: | Microfiber, flammehæmmende. |
| Værktøjspose. | |
| Brugsvejledning. | |

Målskema

·Målt i mm hvis ikke andet er angivet
·Tolerance på ±10 mm og ±1°

| | | Small | Medium | Large | X-Large |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| A | Sædebredde | 400 | 450 | 500 | 550* |
| B | Sædehøjde excl. pude | 22" hjul ~ 480 | | | |
| C | Sædedybde | 3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj | | | |
| D | Ryghøjde ekskl. pude | 630 | | | |
| E | Armlæns højde fra plansæde | 245 ▶ 350 /indst. med 7,5 mm interval | | | |
| F | Bredde mellem armlæn | 430 | 480 | 530 | 580 |
| G | Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr. | 335 ▶ 470/indst. m. 7.5 mm interval | | | |
| H | Kørehåndtagshøjde | 22" hjul ~ 900 ▶ 1020 /trinløs | | | |
| I | Total højde /klar til brug | 22" hjul ~ 970 | | | |
| J | Total bredde /klar til brug | 620 | 670 | 720 | 770 |
| K | Total længde ekskl./inkl. benstøtter | 22" hjul ~1040/1350 | | | |
| L | Rygvinkel | Målt for samtlige indstillingsmuligheder og uden brug af tiltfunktionen. Se iøvrigt særskilt oversigtsskema. | | | |
| M | Sædevinkel | Min: +4° ▶ +37°/trinløs | | Max: +22° ▶ +59° trinløs | |
| N | Benstøttevinkel | 117° ▶ 160° /trinløs | | | |
| P | Fodpladevinkel | +90° ▶ +120° / m. værktøj | | | |
| Transportvægt/u. løsdele | | 33 kg | 34,5 kg | 36 kg | 37,5 kg |

* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

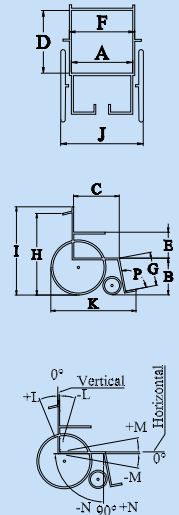

Producent & forhandler:

Comfort-Gruppen A/S
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup
Tlf. +45 70 23 50 10
Fax +45 70 23 50 12
E-mail: info@comfort-gruppen.dk
www.comfort-gruppen.dk

HMI NUMRE

| | |
|--------------|-------|
| Small 40cm | 25705 |
| Medium 45cm | 25704 |
| Large 50cm | 25706 |
| X-Large 55cm | 41071 |



Illum Bergen™

We are not a wheelchair company - we are a mobility provider