

Basic Rest

- med brugerbetjent hvile- og vandretfunktion



Alum Bergen™

- **Ryg, sæde og benstøtter kan gå helt til vandret**
Funktionen er trinløs og elektrisk betjent af bruger ved brug af en knap
- **Utallige muligheder for at regulere siddestillingen**
Ideel til personer uden / med ringe siddefunktion, og til træning af siddestilling
- **I sædeenheden er der fuld længdekompensering**
Støtten i ryg/sæde altid vil være korrekt
- **Mulighed for ekstra moduler og tilbehør**

Basic Rest


- med brugerbetjent hvile- og vandretfunktion



Basic Rest's elfunktion ; sæde/ryg/benstøttestfunktion, betjenes af bruger eller hjælper via håndbetjeningen. Håndbetjeningen er flytbar og der kan monteres forskellige typer af holdere for håndbetjening. Ryggen har aftageligt betræk, aftagelige/udskiftelige rygvulster og rygskum således, at man på stedet hos brugeren, er istand til at korrigere støtten i ryglænet. På ryggen er der monteret en lang højdejusterbar kørebøjle, der giver et godt greb for hjælpere under transport af kørestolen. Sædet består af et plansæde, med indbygget aflastning af sædeknogler og haleben. Sædepuden er aftagelig og udskiftelig, hvis der ønskes en anden kvalitet/type. Som standard følger benstøtterne sædet og ryggens vinkling med hensyn til position. Der er indbygget længdekompensering i benstøtten. Længdekompenseringen indstilles individuelt til den enkelte bruger. Lægstøtterne er polstrede og kan ligesom fodpladerne indstilles til brugeren.

Basic Rest

- med brugerbetjent hvile- og vandretfunktion

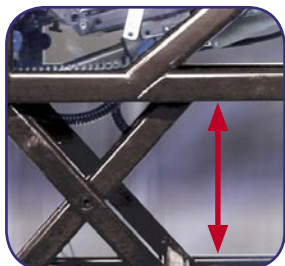

Basic Rest er modulopbygget således, at man kan tage dele af/bygge på, afhængigt af behovet.

Her vises **højdeløft** som kan bringe brugeren op i samme højde som en seng. Det er en lettelse i en forflytningsituation.

1



Rygvulster

Leveres med eller uden rygvulster, i forskellige størrelser/udformninger. Kan også leveres som højde-/dybde-justerbare (tilbehør).

2



Siddestillingen

ændres elektrisk af bruger eller hjælper ved brug af håndbetjeningen. Håndbetjeningen er flytbar og der kan monteres forskellige typer af holdere for håndbetjening.

3



Benstøtter

kan svinges ud til siden ved at trække i udløserhåndtaget (**pil 1**) og derefter tages af .

Polstrede lægstøtter

er justerbare i vinkel, højde og dybde

4



Drivhjul

kan i stelsiden indstilles i to højder og balanceres fremad eller bagud.

Basic Rest - med brugerbetjent hvile- og vandretfunktion




Stel:	Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet.
Sædeenhed:	Justerbar i dybde og vinkel.
Sæde/ryg/ benstøttefunktion:	Regulerbar via håndbetjening.
Plansæde:	Træ med gummigjorder. Betræk i skai.
Sædepude:	Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
Ryg:	Justerbar i vinkel
Rygpolstring:	Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende.
Rygvulster:	Granulat og koldskum, brandhæmmende.
Kørebøjle:	Stålrør med PV-skum.
Armlæn:	Polstrede, højde/ vinkeljustering. Opklappelige og forskydelige
Benstøtter:	Svingbare, aftagelige, højdejusterbare.
Lægstøtter:	Polstrede, justerbare i højde, dybde, bredde.
Fodplader:	Slagfast plast, justerbare i vinkel og højde.
Drivhjul:	22" punkterfrie m/ plastdrivringe.
Svinghjul:	8" punkterfrie.
Bremser:	Justerbare, let betjenelige.
Antitip:	Justerbare i højde.
Stof:	Microfiber, flammehæmmende.
Håndbetjening:	(HB 41) for regulering af sæde/ryg/benstøtte
Lader:	Mascot 8714
Værktøjspose.	
Brugsvejledning.	

Målskema

- Målt i mm hvis ikke andet er angivet
- Tolerance på ±10 mm og ±1°

		Small	Medium	Large	X-Large
A	Sædebredde	400	450	500	550*
B	Sædehøjde excl. pude	22" hjul ~ 450			
C	Sædedybde	3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj			
D	Ryghøjde ekskl. pude	840			
E	Armlæns højde fra plansæde	230 ▶ 350 /indst. med 7,5 mm interval			
F	Bredde mellem armlæn	400	450	500	550
G	Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr.	22" hjul 370 ▶ 505/indst. m. 7.5 mm interval			
H	Kørehåndtagshøjde	22" hjul ~ 920 ▶ 1060 /trinløs			
I	Total højde /klar til brug	22" hjul ~ 1270			
J	Total bredde /klar til brug	620	670	720	770
K	Total længde ekskl./inkl. benstøtter	22" hjul 820/1020			
L	Rygvinkel	Målt ved standardindstilling for sæde-/rygfunktion. Se iøvrigt særskilt oversigtsskema.			
M	Sædevinkel	Min. i aktiv: +8° Max. i hvile: +90°			
N	Benstøttevinkel	Min. i aktiv: +2° Max. i hvile: +6°			
P	Fodpladevinkel	120° ▶ 180° /trinløs +90° ▶ +120° / m. værktøj			

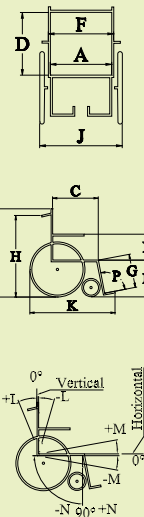

* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

Producent & forhandler:

Comfort-Gruppen A/S
 Broholmvej 9
 DK-5463 Harndrup
 Tlf. +45 70 23 50 10
 Fax +45 70 23 50 12
 E-mail: info@comfort-gruppen.dk
 www.comfort-gruppen.dk

HMI NUMRE	
Small 40cm	28889
Medium 45cm	28890
Large 50cm	28891
X-Large 55cm	41070



We are not a wheelchair company - we are a mobility provider