

Quickguide

City 3 - Customized



Quickguide City 3 - Customized

Funktioner

1. Styr
2. Kaptajnsæde, med høj, foldbar ryg
3. Flipbare armlæn
4. Aftagelig kurv
5. Håndtag til justering af vinkling på styr
6. Håndtag til at ændre sædeposition og for afmontering af sæde
7. Luftfyldte dæk
8. Antitip hjul
9. Forlygte

RÅD OM SIKKERHED

- Dette produkt er beregnet til at kunne støtte og hjælpe dig. For din egen sikkerheds skyld beder vi dig derfor læse brugervejledningen, før du tager scooteren i brug. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din leverandør.
- Medtag aldrig passagerer.
- Hvis din vægt overstiger scooterenes vægt, skal du sætte farten ned, når du drejer.
- Stå ikke på eller af scooteren, med mindre bremsen er aktiveret og scooteren er slukket.
- Sluk ikke scooteren under kørsel.
- Kør ikke på scooteren, hvor det ikke er lovligt eller sikkert at gå.
- Kør ikke over kanter, der er højere end 100 mm. Scooteren kan vælte og dermed forårsage personskader eller skader på scooteren. Skal du køre over kanter, der er højere end 50 mm, skal du holde scooteren i en 90 graders vinkel (lige på forhindringen) og ved lav hastighed. Det anbefales, at sædet sættes i oprejst position og at man udviser stor forsigtighed.
- Hold altid dine fødder på scooteren, når du kører.
- Sænk altid farten og kør forsigtigt på ujævne underlag.
- Kør ikke på scooteren uden antitip-hjul monteret.
- Kør ikke på rulletrapper med scooteren. Der kan ske alvorlige skader.
- Kør ikke scooteren på stigninger, hvorpå der er olie, vand eller is.
- Løft ikke scooteren i sædet, styret, den bageste del af karrosseriet eller i nogen af de aftagelige dele. Det kan forårsage personskade eller skade på scooteren.
- Fjern nøglen fra tændingen, før du står på eller af scooteren. Dette sikrer, at scooteren er slukket og ikke kan køre af sig selv. Generelt skal nøglen altid fjernes fra tændingen, når scooteren ikke er i brug. Dette vil forhindre uøvede eller uautoriserede personer i at køre den.
- Vær sikker på, at styret er korrekt justeret og låst for at undgå personskade eller skade på scooteren.
- Læn dig ikke op af styret og træk ikke i styret, når du står af eller på scooteren. Dette kan forårsage skader.
- Betjen ikke scooteren og tænd ikke scooteren, mens den lader.
- Tjek resterende batteritid inden kørsel.
- Sluk scooteren, når den ikke er i brug og før opladning, samt inden fjernelse og isætning af batterier, da der ellers kan ske skade på scooteren eller andre ting i nærheden.
- Brug ikke den fingerbetjente hastighedsregulering før du har tændt scooteren, da du ellers vil være nødt til at slukke og starte scooteren igen, før den kan betjenes.

Quickguide City 3 - Customized

Kom i gang med at køre på din el-scooter

Kom godt i gang

- Vælg et plant område med masser af plads.
- Sæt dig på scooteren, enten ved at løfte armlænet og glide ind på sædet eller ved at dreje sædet udad og efterfølgende dreje sædet tilbage, så det er lige ud for styret.
- Juster styret og sædet som tidligere anvist.

Begynd at køre

- Vær sikker på, at du sidder godt.
- Drej nøglen, så den står på ON.
- Hastighedsregulering bør stå på 1 eller 2.
- Tryk den fingerbetjente knap ved din højre hånd ned, og scooteren vil langsomt bevæge sig fremad. Jo mere du trykker, jo hurtigere kører scooteren. Dog når den kun op på det maksimale hastighedsniveau, du selv har valgt.
- Slip knappen, og scooteren vil stoppe langsomt, og den magnetiske bremse bliver aktiveret.

Generel kørsel

Vær særligt opmærksom på at sænke farten ved retningsskifte, når du kører på en tre-hjulet el-scooter. Ved kørsel på rampe eller forcering af kantsten bør hastigheden nedsættes kraftigt for at sikre, at der ikke sker utilsigtede situationer. Kørsel med op til 15 km/t anbefales kun ved lige ud kørsel på plant terræn. City 3 er udstyret med en særdeles momentstærk motor, som sikrer, at der er stor trækraft ved lav hastighed. Ligeledes er el-scooteren udstyret med "Easy start" funktion der sikrer en blød opstart.

At styre

Det er let at styre scooteren. Du skal sikre dig, at du har plads nok, når du skal dreje, således at hjulene ikke støder på noget undervejs. Når du skal styre igennem snævre åbninger, såsom døråbninger, eller når du skal vende, skal du vende styrets håndtag mod det sted, du vil hen og langsomt give gas. Scooteren drejer meget skarpt, men kører stadig fuldstændigt stabilt, så længe farten ikke er for høj.

At bakke

Før du bakker, skal du sikre dig, at der ikke er forhindringer i området bag dig. Indstil til lav hastighed, før du begynder at bakke. Tryk på den venstre fingerbetjente knap og styr uden om hjørner og forhindringer.

At stå af

Før du står af scooteren, skal du sikre dig, at nøglen er drejet til OFF.

FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du står af eller på scooteren og sikrer dig, at hverken styr eller fodhviler.

Quickguide City 3 - Customized

Justeringer og indstillinger

Justering af styrets vinkel (Fig. 2)

Styret kan indstilles i fem forskellige positioner. Træk forsigtigt i det store, sorte kugleformede håndtag, som er placeret på venstre side nederst på styret for at hæve eller sænke styret, så det passer bedst til dig. Når du har fundet den ønskede position, slipper du den sorte kugle igen, og styret låser automatisk.



Fig. 2

Skub eller drej sædet (Fig. 3)

Hvis du skal tættere på eller længere væk fra styret, skal du trække i det sorte håndtag, der er placeret under sædet foran til højre. Hvis du vil dreje dit sæde enten til venstre eller højre, skal du trække i det røde håndtag, der er placeret nederst på højre side af sædet.

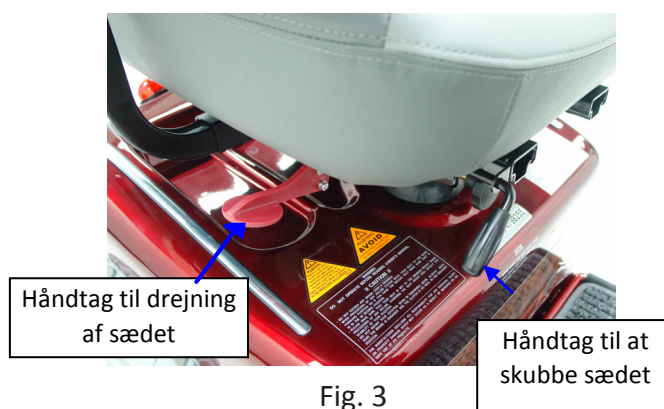


Fig. 3

Fjernelse af sædet (Fig. 3)

Fold ryglænet forover på sædet. Træk op i det røde håndtag til sædejustering og løft sædet af.

Justering af sædehøjden (Fig. 4)

Fjern sædet som beskrevet ovenfor. Løsn sædeboltten med en unbrakonøgle.

Fjern sædelåsen, som fastgør sæde-adapteren.

Løft sæde-adapteren ud af sædepinden.

Sædehøjden kan indstilles i tre forskellige positioner ved at indsætte låsepinden i det ønskede hul.

Stram boltten og sæt sædet på igen.

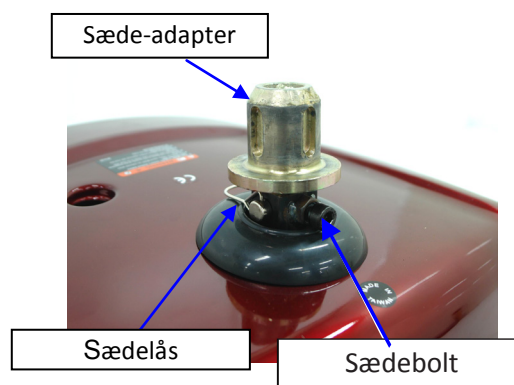


Fig. 4

Quickguide City 3 - Customized

Justering af armlæn

Bredde (Fig. 5)

Bag på sædet forefindes to fingerskruer, en på hver side. Ved at løsne disse kan armlænene justeres til den ønskede bredde, eller aftages ved transport. Brug ikke scooteren uden armlænene er monteret.



Fingerskruer til justering af bredden mellem armlænene

Fig. 5

Højde (Fig. 6)

Det lodrette, firkantede rør, som er forbundet med armlænet kan indstilles til den ønskede position ved at dreje håndtaget til justering af højden på armlænene.



Fingerskrue til justering af højden på armlænene

Fig. 6

Vinkel (Fig. 7)

Vip armlænene op, så du har adgang til den justerbare bolt og låsemøtrik. Skru låsemøtrikken af, og skru bolten i eller udad for at gøre vinklen større eller mindre. Spænd låsemøtrikken. Fra fabrikken er armlænene på din scooter sat i, så de går parallelt med bunden.


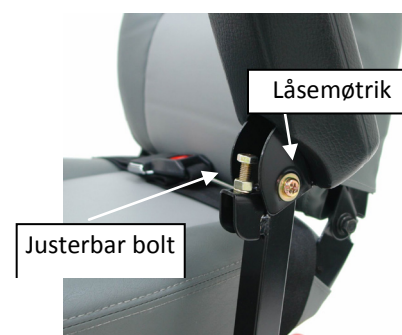



Fig. 7

Quickguide City 3 - Customized


Mærkater og advarsler

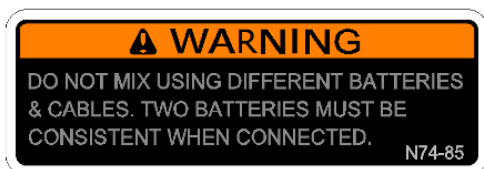

Advarselsmærkat

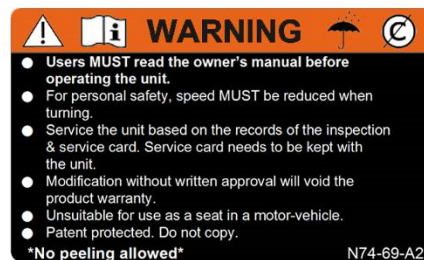




Advarselsmærkat

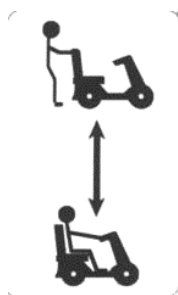

Frijuls symbol

Quickguide City 3 - Customized

Kontrolpanel

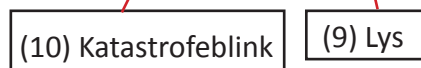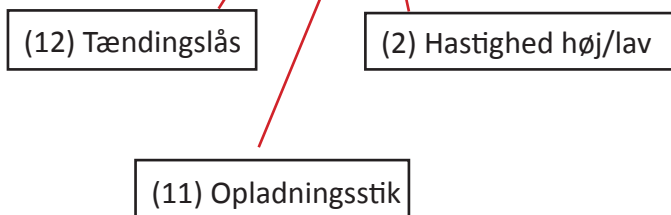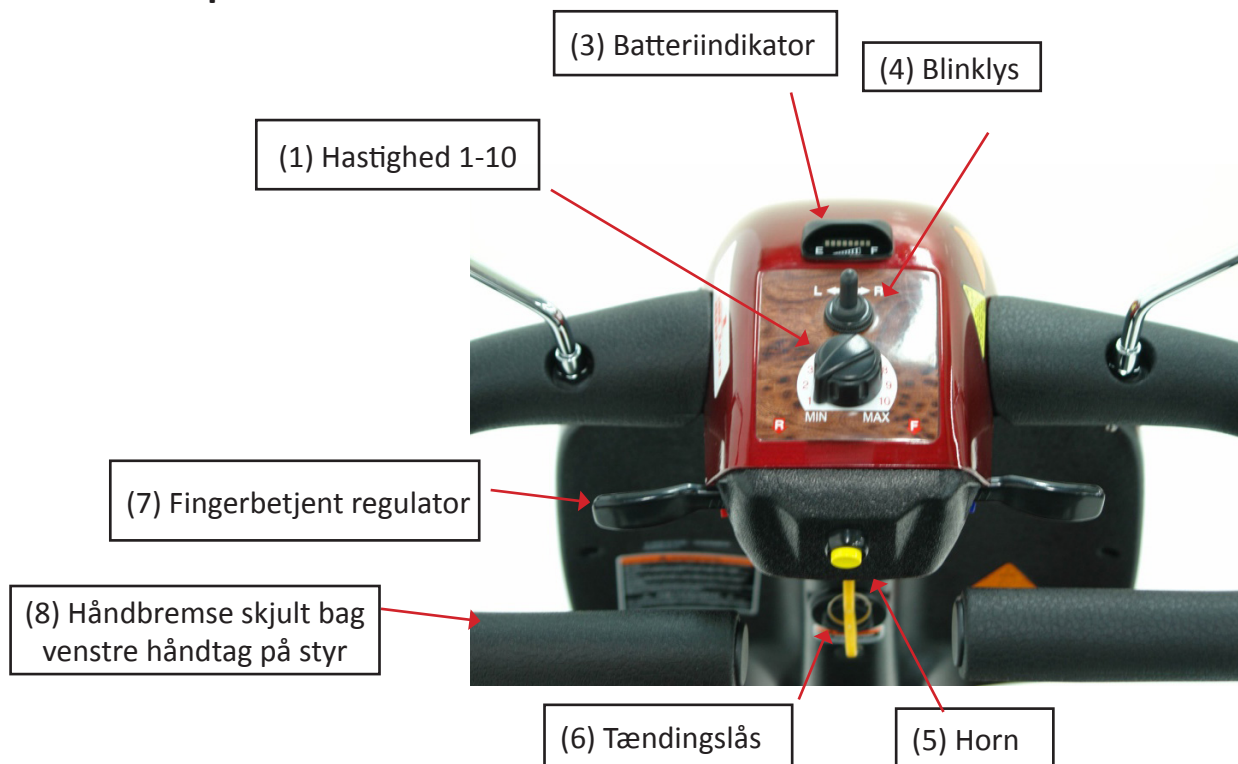

Quickguide City 3 - Customized

(1 & 2) Maksimal hastighedsregulering

Med den maksimale hastighedsregulering kan du sætte din maksimale hastighed fra 1 (minimum) til 10 (maksimum).

Drej knappen mod uret til "minimum" for at nedsætte den maksimale hastighed, og med uret mod "maximum" for at øge den maksimale hastighed. "High/Low" knappen er til ekstra hastighed. Udvis venligst ekstra forsigtighed, når scooteren står på "High".

NB: Når du skal op ad skråninger, er det nødvendigt at sætte knappen til "high". Husk, at jo højere, du sætter din maksimale hastighed, jo hurtigere kører din scooter.

(3) Batterimåler

Antallet af streger, der lyser, viser den mængde strøm, der er tilbage på dine batterier. Det reelle batteriveau vises, kun når scooteren kører.

Forsigtig – Lad ikke lysene gå helt ud, da fuld afladning af batterierne kan forårsage uoprettelig skade på batterierne.

(4) Højre og venstre blinklys

Højre og venstre blinklys: Brug blinklysene, når du skal dreje. Blinklyskontakten er placeret øverst på styret lige under din maksimale hastighedsregulering. Skub knappen til henholdsvis højre eller venstre for at aktivere blinklyset. Når du er færdig med at dreje, skubbes kontakten tilbage til midterpositionen.

(5) Horn

Den gule knap midt på styret aktiverer hornet.

(6) Tænding

Placeret på ratstammen under styrkonsollen. Isæt nøglen og drej den med uret. Batterimåleren vil bevæge sig mod højre. Du kan nu køre på din scooter.

Du slukker scooteren ved at dreje tændingsnøglen mod uret. Husk at tage nøglen med, når du forlader scooteren.

FORSIGTIG: Sluk ikke scooteren, når den er i bevægelse, idet motorbremsen da vil aktiveres pludseligt og dermed sætte dig i en farlig situation.

Du må kun slukke scooteren, mens den er i bevægelse, hvis der opstår en nødsituation. Kontinuerligt brug af den metode kan forårsage unødigt belastning på styresystemet og dermed skade den elektroniske hastighedsreguleringsenhed. Vær ekstra forsigtig på skråninger. Sid ret op på sædet, ellers bliver din scooter mindre stabil.

(7) Fingerbetjent regulator (gashåndtag)

Den fingerbetjente regulator (gashåndtag) er placeret foran håndtagene. Du styrer din fart ved kørselsretning fremad og tilbage her. Den højre fingerbetjente regulator får din scooter til at køre fremad og styrer ligeledes hastigheden i forhold til det tryk, du holder på den.

Den venstre fingerbetjente regulator får din scooter til at bakke og styrer ligeledes hastigheden i forhold til det tryk, du holder på den. Når du slipper regulatoren, vil den gå tilbage i neutral position og scooteren stopper blødt. Hvis du skubber regulatorerne fremad, sker det modsatte.

Quickguide City 3 - Customized

(Fortsat fra forrige side)

FORSIGTIG: Hvis du ikke er trænet i at køre udenfor, anbefaler vi dig, at du først øver dig på et område, der er sikkert og uden trafik, og helst med en person, der kan assistere dig.

(8) Elektromagnetisk bremse

Bremsen aktiveres automatisk, når de fingerbetjente knapper slippes. Der er en mindre forsinkelse, når scooteren decelererer. Dette gør, at scooteren stopper blødt.

(9) Lys

Den blå knap bag på styret styrer lyset.

(10) Katastrofeblink

Hvis din scooter bryder sammen eller du har brug for assistance, skal du trykke på den røde trekant, der er placeret på højre side af styret lige under regulatoren for fremadkørsel. Når du har fået assistance, slukker du katastrofeblinket ved at trykke på den røde knap igen.

Quickguide City 3 - Customized

Batterier og batteriopladning

Shoprider® scooteren er forsynet med vedligeholdelsesfrie, lukkede blybatterier. Batteriernes præstation kan påvirkes af temperatur, underlag, batteriets tilstand, batteritypen, batteriopladertypen, brugerens vægt, vindhastighed, osv. Batteri-indikatoren er kun vejledende og er mest effektiv, når scooteren kører – det korrekte niveau vises kun under kørsel.

- Når scooteren stopper, kan batteri-indikatoren vise, at den er fuldt opladet.
- En aktiv bruger kan bruge op til 30% af batterikapaciteten eller mere pr. dag.
- Inaktive brugere bruger måske kun 50% af batterikapaciteten på en uge.
- I begge tilfælde bør batteriet oplades over natten.
- Udskift altid batterierne med to identiske batterier med samme kemi, amperetimer og kapacitet. Batterierne skal udskiftes sætvis og på samme tid, og altid via Zealand Care.

Batterioplader

Den leverede batterioplader er kun egnet til din scooter og kan ikke anbefales anvendt på andre produkter. Brug kun den lader, der er leveret sammen med din scooter. Andre typer ladere kan gøre permanent skade på din scooters batterier og vil medføre, at reklamationsretten bortfalder. For al øvrig information omkring laderen og instruktioner om drift og brug, henviser vi til den brugervejledning, der ligger i den kasse, som laderen blev leveret i.

Første gang du bruger scooteren

Før du bruger din scooter første gang, skal du lade batterierne helt op (se afsnittet om opladning i manualen). Opladning kan tage op til 10 timer afhængig af lader. Når du lader batterierne fuldt op, inden du bruger scooteren første gang, vil batteriernes ydeevne højnes. I modsat fald kan det forårsage skader.

Opladning

For at oplade batterierne skal du forbinde det trebenede hanstik med det trebenede hunstik på styret. Tilslut vekselstrømsledningen i stikdåsen og den anden ende i laderen (tobenet). Se venligst beskrivelsen af batteri-indikatoren, som er baseret på ladestatus, i brugervejledningen når batterierne er fuldt opladede, skal du tage stikket ud af stikdåsen og det trebenede stik ud af ladestikket.

Quickguide City 3 - Customized

Dæktype

Din scooter leveres med luftfyldte dæk. Tjek dæktrykket regelmæssigt. Kig efter tegn på slid, revner og fremmedlegemer. Korrekt dæktryk er 30 psi baghjul og 25 psi i forhjul, dog afhængigt af brugeren.

Vær opmærksom på, at der på dækket kan være oplyst et maksimalt tryk på psi 50. Dette er dækkets maksimale tryk, men må ikke pumpes til dette tryk.

Vær opmærksom på at vedligeholde det korrekte tryk, som nævnt ovenfor, for at sikre en ensartet slitage og kørekomfort.

Fejlfinding

Hovedafbryder

Din scooter er udstyret med det nyeste inden for elektroniske styresystemer, som er programmerede til at beskytte det elektriske system fra u hensigtsmæssig overbelastning. Som en ekstra sikkerhed har scooteren en hovedafbryder. Hvis din scooter standser uden nogen indlysende grund, skal du tjekke, at hovedafbryderen ikke er slået fra. Hovedafbryderen er placeret under sædeenheden og tilgås via åbningen i coveret.

Tjekliste

Hvis din scooter ikke fungerer som den skal, bør du tjekke følgende:

- At den er tændt
- At alle stik og forbindelser sidder som de skal
- At batterierne er fuldt opladede
- At frihjulsfunktionen er deaktiveret

Hvis frihjulsfunktionen er blevet aktiveret, mens scooteren har været tændt, kan scooteren ikke køre, før tændingen har været slået fra og til igen.

Kontakt Zealand Care, hvis scooteren ikke kører, efter du har tjekket disse ting.

Kontakt

Zealand Care A/S
Jydekrogen 7, 1.th.
DK-2625 Vallensbæk

Tlf: +45 70 27 29 24
Mail: info@zealandcare.dk
Web: www.zealandcare.dk
CVR-nr: 18 99 84 75