


Viking™ M mobilift

Brugsvejledning

Dansk

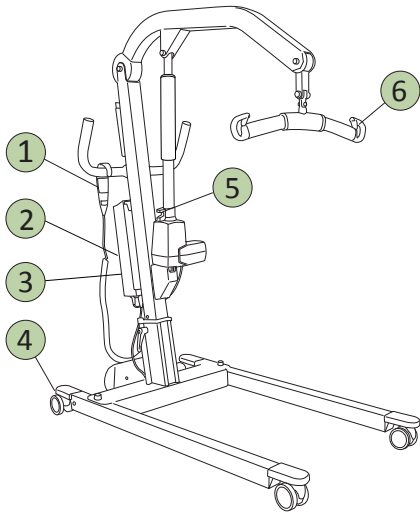

xxxxxx Rev.1 DK_XX

Viking M Varenr. 2040045

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Advarsel; denne situation kræver ekstra omsorg og opmærksomhed.


- Læs både brugsanvisningerne om lifteog løftetilbehøret, inden brug.
- Planlæg løftet omhyggeligt inden løft.
- Kontroller, at løftesejlets båndløkker er korrekt hægtet på løftebøjlsens kroge, når løftesejlets bånd er udstrakte, men inden brugeren løftes op fra underlaget.
- Personale, som anvender liften, skal være informeret om, hvordan liften skal betjenes.
- **Maks. belastning: 205 kg**

For at bibeholde maks. belastningen kræves tilbehør, der er beregnet til samme belastning eller større.

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning 7DK137107.


1 Håndbetjening

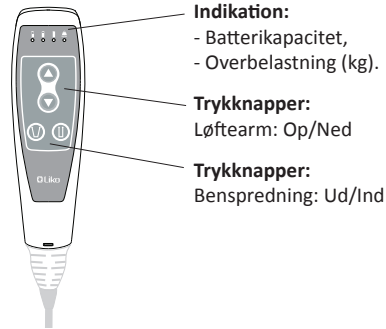

- Indikation:**
- Batterikapacitet,
- Overbelastning (kg).
- Trykknapper:**
Løftearm: Op/Ned
- Trykknapper:**
Benspredning: Ud/Ind

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.


2 Nødstop

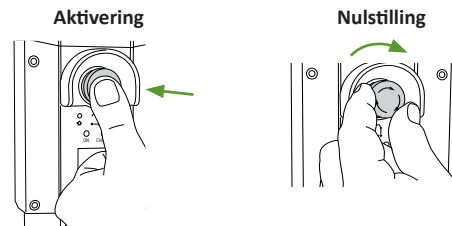

Aktivering


Nulstilling

3 Elektrisk nødsænkning/nødhævning.

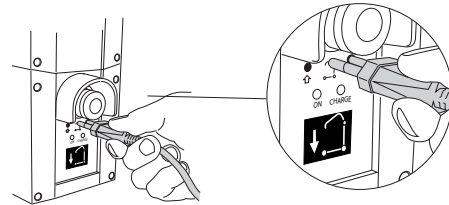

OBS! Anvend ikke skarpe genstande, eftersom dette kan skade kontrolboksen.


4 Låsning af hjul

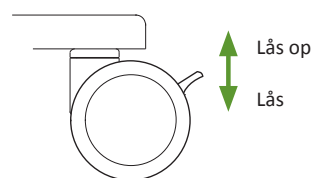


Lås op

Lås


5 Mekanisk nødsænkning

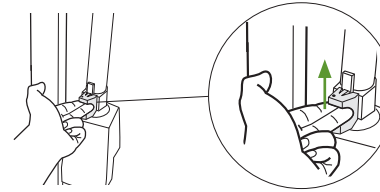

6 Afkrogningsbeskyttelse

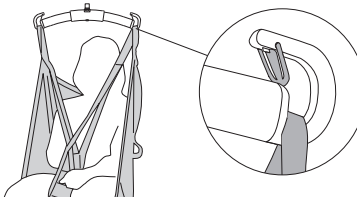


Opladning af batteri

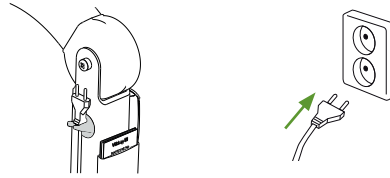

- Oplad batterierne jævnligt.
- Liften fungerer ikke under opladning.

Liftens position ved løft

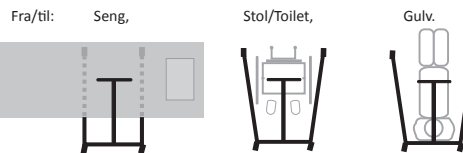

⚠ Skrå løft kan medføre vælterisiko!

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.



⚠ Løftearmen må ikke løftes manuelt!



⚠ Flyt aldrig liften ved at trække i motorstempet!

Ergonomi

- Undgå manuelle løft – lad liften gøre arbejdet.
- Planlæg løftet – arbejd roligt og metodisk.
- Skån ryggen – stå med det ene ben foran det andet og med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænkefunktioner ved løft.
- Hæv armene mindst muligt – arbejd så nær brugeren som muligt.

Rengøring

Ved behov, rengør liften ved at aftørre den med en klud, der er fugtet med varmt vand eller sprit.

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

Enkel fejlsøgning

Kontrollér, at:

- nødstopet ikke er aktiveret, se 2.
- at liftens batteri er opladet.
- kontrollér, at opladerkablet ikke sidder i en kontakt.

(C)2016. Liko R&D AB. All Rights Reserved.

Liko

www.hill-rom.com | www.liko.com

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå, Sweden

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom

7DK137505 Rev.1