

Alpha Trancell Deluxe

Denne lynvejledning er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonale og andre brugere med systemets funktionelle aspekter alene. Vejledningen træder ikke i stedet for generelle sikkerhedsadvarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anbefalinger i produktets brugervejledning, varenummer 500934DK.

Se i brugervejledningen til produktet, inden dette produkt tages i brug.

Indikationer:



- Alpha Prevent™-systemet er indikeret til forebyggelse og behandling af tryksår op til kategori 2¹. Maks. plejemodtagervægt 90 kg.
- Alpha Trancell® Deluxe-systemerne er indikeret til forebyggelse og/eller håndtering af alle kategorier¹ af tryksår, når de kombineres med et personligt tilpasset program for omfattende tryksårsbehandling.
- Alpha Trancell Deluxe- og Trancell II®-madrasserne er beregnet til plejemodtagere, der vejer op til 120 kg (264 lb).
- Alpha Trancell Deluxe-sædepuden er beregnet til plejemodtagere, der vejer mellem 40 og 90 kg (198 lb).

Kontraindikation: Systemet må ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile brud på rygsøjlen.

Forsigtig: Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befinder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig overflade, bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug.



Tænd/sluk-kontakten findes på pumpens side.

- Tryk på  for at tænde pumpen og på  for at slukke pumpen
- Pumpealarmer kan nulstilles ved at slukke for pumpen og derefter tænde den igen.
- Hvis pumpen skal isoleres fra netforsyningen, skal den slukkes, hvorefter stikket skal trækkes ud af stikkontakten.



Tændt-indikatoren lyser, når pumpen er i driftstilstand.




Vent-indikatoren lyser, når helmadrasen, topmadrasen eller sædepuden pumpes op. Indikatoren lyser, indtil systemet er pumpet helt op.



Indikatoren for lavt tryk blinker, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen eller sædepuden, og der lyder samtidig en akustisk alarm. Indikatoren slukker, når normalt tryk er retableret. Kontrollér, at proppen til hurtig tømning i hovedenden er isat korrekt, og at slangesættet er tilkoblet korrekt.




I tilfælde af strømsvigt vil indikatoren for strømsvigt begynde at blinke, og der vil lyde en akustisk alarm. Alarmens intensitet tiltager over tid. Hvis netstrømforsyningen retableres, vil den akustiske alarm stoppe, men alarmlampen vil fortsat være tændt, indtil systemet nulstilles (kun i Storbritannien).

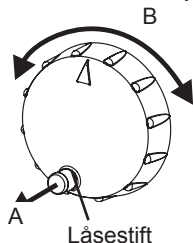

Madrassens eller sædepudens celledtryk kan ved hjælp af trykreguleringen tilpasses efter den individuelle plejemodtagers vægt. Drej trykreguleringen i urets retning for at forøge trykket og imod urets retning for at reducere trykket.

Trykreguleringen fastlåses i positionen, så den ikke bliver flyttet utilsigtet. Tilpas trykreguleringen på følgende måde:

1. Løft låsestiften (A) for at frigøre reguleringsknappen.
2. Drej reguleringsknappen (B), mens låsestiften er løftet.
3. Slip låsestiften, når trykreguleringsknappen befinder sig i den ønskede stilling, så trykreguleringsknappen bliver låst igen.

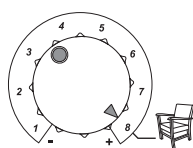

Se plejemodtagervægttabellen bag på pumpen vedr. korrekt indstilling af trykreguleringen:

- Hvis plejemodtageren sidder på madrassen, skal trykreguleringen øges med to trin.
- Hvis plejemodtageren sidder på en sædepude, skal trykreguleringen indstilles til maksimum (8) iht. figuren ved siden af.


Advarsel: Plejemodtagervægttabellen er kun tænkt som en vejledning og bør ikke erstatte klinisk vurdering.

1. NPUAP/EPUAP International Pressure Ulcer Guideline, 2014.

Installation

Topmadras

Placer topmadrassen over den normale madrasoverflade, så slangesættet kommer til at sidde tæt ved fodenden af sengen. Madrasbetrækket skal ligge øverst.

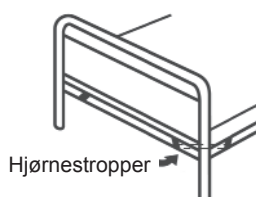

Forsigtig: Topmadrassen må ikke anvendes direkte på sengebunden.

Fastgør topmadrassen ved at stikke fastgørelsesskørterne ned under enderne af madrassen og/eller sikre hjørnestropperne under sengemadrassens hjørner.

Helmadrass

Fjern den eksisterende madras fra sengen, anbring helmadrassen på sengebunden, og sørg for, at slangesættet kommer til at sidde ved fodenden af sengen. Madrasbetrækket skal ligge øverst.

Sørg for, at madrassen er fastgjort til sengebunden ved hjælp af de medfølgende stropper.

Sådan udføres installationen af helmadrassen og topmadrassen

Sørg for, at proppen til hurtig tømning er isat i hovedenden (gælder ikke *Alpha Prevent*).

Sørg for, at mærkatet til hurtig tømning altid er synligt og tilgængeligt, og at det er fri af steder, hvor det kan komme til at sidde fast.

Hvis der er tale om en *Alpha Trancell Deluxe*-madras, skal det sikres, at transportkontrolenheden er indstillet til Normal.

Sædepude


Anbring sædepuden oven på stolesædet. Stå foran stolen med ansigtet vendt mod den, og kontrollér, at cellerne vender opad, og at slangesættet stikker ud af det forreste højre hjørne af puden.

Alpha Trancell Deluxe-sædepuden må ikke anvendes uden en underliggende skumhynde.

Anvend altid *Alpha Trancell Deluxe*-sædepuden med det beskyttende overbetræk.

Undgå hængende kabler. Sørg for, at kablet og slangesættet anbringes under stolen, så de ikke udgør en risiko.

Installation af pumpen:

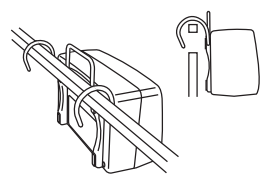

Anbring pumpen med fødderne nedad på et hvilket som helst vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af ophængsbøjlerne.

Kobl slangesættet til pumpen. Sørg for, at lufttilførselsslangerne ikke er "knækket" eller snoet.

Sørg for, at netledningen og slangesættet til madrassen/sædepuden er placeret, så de ikke kan forårsage snublefare eller medføre kvælningsrisiko, og at de er fri af bevægelige sengemekanismer og andre steder, hvor de kan komme i klemme. Sæt stikket i en egnet stikkontakt.

Sengeheste

Overhold altid den lokale praksis, OG følg brugervejledningen til produktet i forbindelse med brug af sengeheste.

® og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernen.

© Arjo 2019.

Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

Indholdet i denne publikation må ikke kopieres hverken til fulde eller delvist uden tilladelse fra Arjo.

Lynstart:

Tryk på tænd/sluk-kontakten for at tænde Tændt- og Vent-indikatorerne skal nu lyse, mens systemet pumpes op.

Det tager ca. 10-15 minutter at pumpe madrassen helt op, mens sædepuden pumpes op på 2-3 minutter. Når produktet er pumpet helt op, slukkes Vent-indikatoren.

Læg et lagen over helmadrassen/topmadrassen, og fold det løst rundt om den.



Når plejemodtageren er anbragt på madrassen/sædepuden, skal trykket i cellerne tilpasses ved hjælp af trykreguleringen. Se plejemodtagervægttabellen bag på pumpen vedr. korrekt indstilling.

Hvis plejemodtageren sidder op i sengen, skal trykreguleringen øges med to trin.

Transporttilstand

Plejemodtageren kan transporteres på *Alpha Trancell Deluxe*-madrassen og topmadrassen.

1. Drej reguleringsknappen 90 grader som vist nedenfor.
2. Fjern slangesættet fra pumpen.
3. Sluk for pumpen.

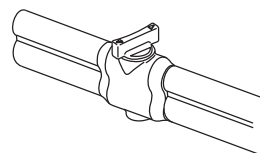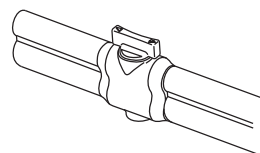

Trykket i cellerne vil blive udlignet, og plejemodtageren vil fortsat være understøttet (med stillestående madras) i op til to timer, mens plejemodtageren er i liggende stilling.


Størst muligt udbytte af transportfaciliteten opnås ved at sørge for, at madrassen og topmadrassen indstilles til transporttilstand, når alle cellerne er pumpet ens op på tværs af madrassen. Sørg for, at plejemodtageren forbliver i liggende stilling.

HURTIG TØMNING I TILFÆLDE AF HJERTESTOP

Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR):

Sådan aktiveres hurtig tømning:

Træk med et fast træk i mærkatet til hurtig tømning, som findes i hovedenden af madrassen, så luften lukkes ud af madrassen, og afbryd derefter slangesættets koblinger ved pumpen.

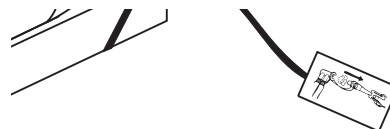

Sådan nulstilles hurtig tømning:

Sæt proppen ordentligt i, og tilslut igen luftslangerne til pumpen.