

Kvik guide til Stoleløfteren model 24000 brugervægt max. 120kg.

Stoleløfteren er udviklet til at forflytte en bruger+stol til og fra spisebord samt yde oprejsningshjælp til bruger der har svært ved at rejse sig fra stolen. Stoleløfteren kan også bruges til at køre borger fra spisestuen til deres bolig.

1.



2.



Start med at køre stoleløfterens gaffler op så de passer lige ind under stolens sæde, dette gøres ved at trykke på knappen som sidder ved det højre håndtag.
Vær opmærksom på, at den elektriske kip funktion står, så den løfter stolen nogenlunde vandret.

Kør nu stoleløfteren så langt ind under stolen at det forreste af gafflerne er fremme ved stolens forkant.

3.



Løft nu ved at trykke på knappen ved højre håndtag, i de fleste tilfælde vil 1 til 2 cm være nok, men hvis man gerne vil have fødderne helt fri af gulv køres højere op. Du kan nu køre brugeren hen til spisebordet.

4.



Efterfølgende køres fri af bord- ud på gulvet hvor der mere plads til en eventuel rollator.
Hvis bruger har svært ved at rejse sig, kan stoleløfteren hæves yderligere, sæde kan ved brug af den venstre sorte knap kippes, husk at brug bremsen.

JØHL

