

Nimbus 4 & Nimbus Professional

Denne lynvejledning er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonale og andre brugere med systemets funktionelle aspekter alene. Vejledningen træder ikke i stedet for generelle sikkerhedsadvarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anbefalinger i produktets brugervejledning (varenummer 649933DA).

Se i brugervejledningen til produktet, inden dette produkt tages i brug.

Indikationer:


- Nimbus® 4- og Nimbus® Professional-madrasserne er udformet til plejemodtagere, der vejer op til 250 kg.
- Nimbus 4- og Nimbus Professional-systemerne er velegnede til forebyggelse og/eller behandling af alle typer tryksår¹, når de kombineres med en omfattende tryksårprotokol, der er tilpasset den enkelte.


Kontraindikation: Nimbus 4- og Nimbus Professional-systemerne må ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile brud på rygsøjlen.


Forsigtig: Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befinder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig overflade, bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug.


Bemærk: Yderligere oplysninger om anbringelse af plejemodtageren på maven på Nimbus Professional-madrassen fremgår af brugsvejledningsdokumentet, afsnit 6 "Nimbus Professional-madras: Vejledning i patientplacering".





 Tryk på knappen Tænd/Standby for at sætte pumpen i driftstilstand; driftsindikatoren lyser grønt. Hvis du vil stille pumpen på Standby, skal du trykke på Tænd/Standby-knappen og holde den nede i ca. 3 sekunder; derved undgås utilsigtet aktivering. Driftsindikatoren slukker.


 Indikatoren Vent lyser, når madrassen pumpes op. Indikatoren lyser, indtil madrassen er pumpet helt op. Det kan tage op til 15 minutter.


 Under en alarmtilstand vil det trekantede Alarm-symbol blinke, og der vil lyde en akustisk alarm, samtidig med at en af følgende indikatorer lyser op: Lavt tryk, Højt tryk, Pumpefejl eller Strømsvigt.


 Indikatoren for lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen. Der lyder en akustisk alarm, medmindre lyden er annulleret ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er retableret. Sørg for, at CPR-enheden er lukket, at slangesættet er tilsluttet korrekt, og at madrassen er indstillet til Normal.


 Indikatoren for højt tryk lyser, når pumpen registrerer et højt tryk i madrassen. Der lyder en akustisk alarm, medmindre lyden er annulleret ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Hvis denne tilstand opstår, kobles lufttilførslen fra pumpen fra, indtil der igen registreres et normalt tryk. Efter 2 sekunder med normalt tryk, slukkes indikatoren, og lufttilførslen genstartes. Sørg for, at slangesættet ikke er bukket.


 Indikatoren for Pumpefejl lyser, når der registreres en intern funktionsfejl i pumpen. Ring efter en servicetekniker.

 Strøm (svigt)-alarmindikatoren lyser, når der registreres en fejl i strømforsyningen. Der lyder en akustisk alarm. Alarmen fortsætter med at lyde, indtil netstrømmen retableres, eller der trykkes på Tænd/Standby-knappen for at sætte pumpen på Standby. Hvis strømsvigtet varer i længere tid, skal der skiftes til Transport-tilstand, og slangerne skal afbrydes. Eksempler på tilstande, der udløser alarm for Strøm (svigt), er afbrydelse af elledningen og strømsvigt.

 Serviceindikatoren tændes og forbliver tændt efter et fastlagt antal driftstimer for at indikere, at pumpen kræver service. Pumpen vil fortsat fungere normalt, selv om Service-indikatoren lyser.

 Under en alarmtilstand kan den akustiske alarm slås fra: Det gøres ved at trykke på knappen Alarmdæmpning og holde den inde i 3 sekunder. Indikatoren på knappen Alarmdæmpning lyser for at vise, at den akustiske alarm er dæmpet. *Knappen Alarmdæmpning virker ikke, hvis der opstår strømsvigt.*

 Tryk på knappen Statisk, og hold den inde i 3 sekunder for at vælge Statisk-tilstand. Der lyder et akustisk signal, når der trykkes på knappen. Indikatoren i knappen Statisk lyser kun, når pumpen er i tilstanden Statisk. Tryk på knappen, og hold den inde i 3 sekunder for at vende tilbage til tilstanden Dynamisk.


 Trykket i madrassens celler kan indstilles manuelt ved hjælp af Komfort-drejeknappen for at gøre det så behageligt som muligt for plejemodtageren. Drej Komfort-drejeknappen i urets retning for at gøre madrassen mere fast og imod urets retning for at gøre den blødere.

1. NPUAP/EPUAP's internationale retningslinjer for tryksår, 2014.

Installation

Nimbus 4- og Nimbus Professional-helmadrasser (MR)

Anbring helmadrassen direkte oven på sengebunden med slangesættet og CPR-enheden i fodenden af sengen.

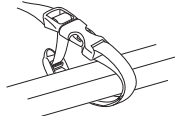

Brug de medfølgende fastgørelsesstropper til at fastgøre helmadrassen til sengebunden.

Hvis sengen har opdelt sektioner til individuel løftning af plejemodtagerens hoved og/eller knæ, skal madrassen kun fastgøres til sengebundens bevægelige dele.

Sådan færdiginstalleres madrassen


Lyn beskyttelsesbetrækket på madrassen. Sørg for at Arjo-logoet vender opad og befinder sig i fodenden af madrassen.

Kontrollér, at betjeningsselementet Transport er indstillet til Normal, og at CPR-betjeningsselementet er lukket og låst.


Sørg for, at netledningen og slangesættet er placeret, så de ikke kan forårsage fald eller udgøre anden fare og er fri af bevægelige sengemekanismer og andre steder, hvor de kan komme i klemme. Hvis der er monteret kabelkanaler langs med siden af madrassen, skal disse anvendes til at gemme netledningen.

CPR-betjeningsselementet skal altid være synligt og tilgængeligt.


Hvis pumpen skal hænge på enden af sengen, skal sengebundet fastgøres på sengerammen. Pumpen kan også anbringes under sengen, enten opretstående eller liggende på dens bagside.

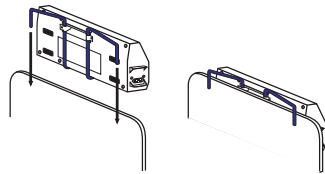

Sørg for, at slangesættet sidder korrekt fast i pumpen og madrassen.

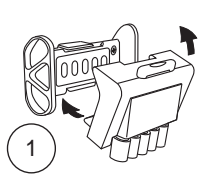

2
Sådan tilsluttes slangesættet

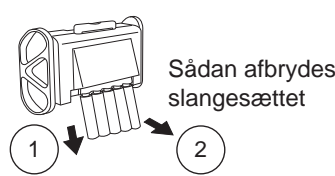

Sådan afbrydes slangesættet

Slut stikket på netledningen til bøsningen på siden af pumpen. Slut stikket i den anden ende af netledningen til en egnet stikkontakt.

SENGEHESTE

Overhold altid den lokale praksis, OG følg brugervejledningen til produktet i forbindelse med brug af sengeheste.

Lynstart

Når Nimbus-pumpen tændes ved hjælp af strømafbryderen, kører pumpen en selvtest, der varer ca. 3 sekunder. Under denne test vil alle indikatorerne lyse op.

Indikatorerne Vent og Lavt tryk fortsætter med at lyse, mens madrassen pumpes op. Det tager ca. 15 minutter at pumpe madrassen helt op.

Advarsel: Anbring ikke plejemodtageren på madrassen, før den er pumpet helt op, og driftstrykket er opnået.


Når madrassen er pumpet helt op, slukkes indikatorerne Vent og Lavt tryk. Læg et lagen over madrassen, og fold det løst rundt om den.

Så snart plejemodtageren ligger på madrassen, registrerer og indstiller pumpen automatisk trykket i cellerne for at understøtte plejemodtageren.

Transporttilstand

Hvis en plejemodtager skal transporteres på Nimbus Professional-madrassen, skal Transport-betjeningsselementet i fodenden af madrassen drejes i urets retning til Transport. Sluk for pumpen, og frakobl slangesættet. Madrassen trykafaster plejemodtageren i op til 12 timer i denne driftstilstand.

Genoptag driften ved at gentilslutte pumpen, dreje transportbetjeningsselementet tilbage på Normal og tænde.

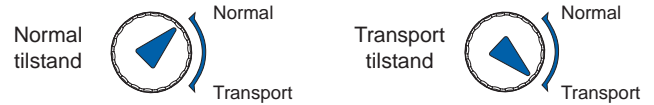

Betjeningsselementer til udluftningsventiler

Nimbus 4 har 5 celler med udluftningsventiler i fodenden.

Nimbus Professional har 19 celler, der alle er udstyret med udluftningsventiler (skulderstøttecellen har ingen udluftningsventil og kan ikke tømmes for luft).

Tøm luften ud af en celle ved at dreje udluftningsventilen 180° i urets retning, så den kommer til at pege nedad.

Se "Retningslinjer for valg af udluftningsventiler, der skal åbnes" i afsnittet "Betjening" i brugsvejledningen til produktet.

Lukket



Åbent




CPR-BETJENINGSELEMENT I TILFÆLDE AF HJERTESTOP


Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR):

Sådan aktiveres CPR-enheden:



1. Løft det røde håndtag i betjeningspanelet i fodenden af madrassen opad.

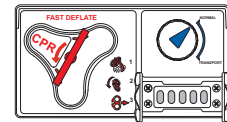

2. Drej håndtaget imod urets retning.

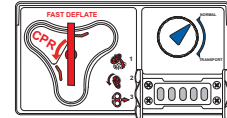

3. Træk håndtaget væk fra panelet.

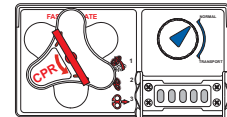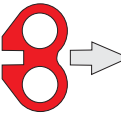

4. Den grå trekantsforsegling drejes, og luften tømmes hurtigt ud af madrassen.

Sådan nulstilles CPR-enheden:

1. Drej den grå trekantsforsegling i urets retning, og tryk den ind i styrene.
2. Drej det røde håndtag i urets retning.
3. Klap håndtaget ind, så det låses på plads.

© og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernen.

© Arjo 2019.

Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

Indholdet i denne publikation må ikke kopieres hverken til fulde eller delvist uden tilladelse fra Arjo.

