




Ekamove Quick GUIDE. Bilag C


Vigtigt.

Følgende forholdsregler skal tages før anvendelse af ekamove.:

1. **Ekamove** systemet må kun anvendes på senge med forhøjede sengeheste. Senge skal opfylde de mål/sikkerhedskrav der er oplyst i lov (norm) DIN EN 1970:200 og DIN EN 60601-2-38 MPG
2. Det **anbefales** at anvende de innovative **EKAMED/Surcon** sengehest beskyttere.
3. **Læs altid instruktions manualen til ekamove før anvendelse. Følgende information er kun en kort anvisning til brug i det daglige arbejde.**
4. Første gang ekamove anvendes skal systemet kalibreres, men kun hvis ekamove anvendes med vinkelsensorer. Se manual.
5. **Elevation af plejesengens hovedsektion må ikke overstige 20-25°** når ekamove kører sin automatiske vendingsprocedurer, da det kan medføre, at brugeren kan få overbalance og derved falder fremad/ud af sengen. Man bør, før anvendelse, vurdere om der kan opstå faresituationer for brugeren ved elevation af hovedsektionen, da det kan variere meget efter af kropsbygning, sygdomsbillede samt brugerens egen mobilitet. I forbindelse med den daglige personpleje, forplejning og anden sygdomsbehandling skal **ekamove stoppes** og cellerne udluftes (til rygleje), eller anvend ekamove's **plejefunktion**. **Hæv sengens hovedsektion 5 -10° hvis hovedet hælder bagover / nedad ved rygleje, eller anvend en god hovedpude til at understøtte hoved.!**
6. **Når ekamove anvendes til tryksårs forebyggelse/behandling skal vendingsvinklen altid være over 20° samt tidsintervaller imellem 30 og 60 min..**
7. **Find behovet for lejringspuder eller andre tiltag der er nødvendigt brugerens sikkerhed samt velbefindende. Anvend f.eks. en pude til aflastning af hæl ved hælssår.**
8. Såfremt manuelt vendelagen, f.eks. Master turner anvendes i forbindelse med personlig pleje, skal der anvendes kilepuder til støtte af hoften. Dermed reduceres muligheden for at hoften glider fra side til side under den automatiske vending. Der skal anvendes 2 stk. En pude på hver sin side af hoften.
9. Ben-sektion: Husk lejringspude imellem ben ved fodende.
10. **Husk at vælge en madras der passer til brugerens personvægt.**
11. **Lav altid en lejringsanalyse samt vurdering af borgerens helbred inden installation af ekamove.**

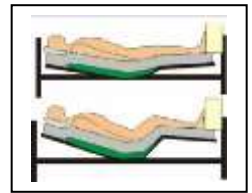


Installation af ekamove på sengen.

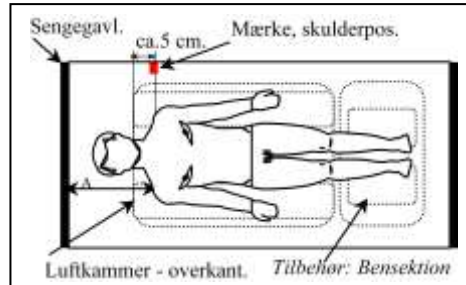

Installation af ekamove.

Gør følgende før installation af ekamove. Brugeren skal ligge i sengen. Placer et rødt mærke på sengekanten der viser brugerens overkant af skulder. Se tegning. Tag brugeren ud af sengen. Fjern den gamle madras.

Placer overkant af luftcellemadrassen til ekamove ca.5 cm over skulder (Klistermærke). Centrér luftcellemadrassen i længderetningen og bind de 4 stropper på madrassen fast til sengebunden med dobbelthavstik. Se fotos. Lig derefter den medfølgende madras på sengen.

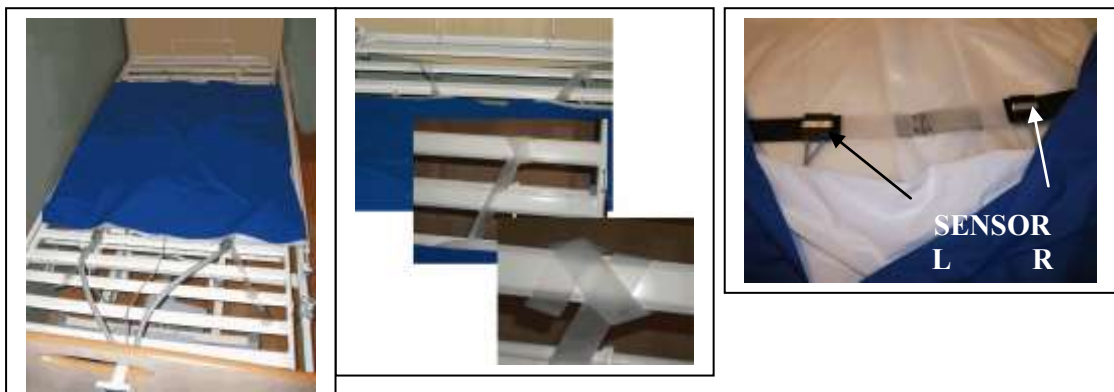

Bemærk: Sensorerne skal altid vende op ad. Placering af luftcellemadrassen i sengen er kun vejledende. Ved sengebredder mindre end 80cm og større end 110 cm skal der bestilles en speciel udgave af luftcellemadrassen der er tilpasset til de aktuelle mål.

Tilbehør: Der kan tilkøbes en **Ben-sektion**. Anvendes efter behov, men især ved forebyggelse af tryksår samt behandling, og ved høje og kraftige personer. Behovet afdækkes ved en konkret vurdering af brugeren.

Monter derefter sensor ledning samt slanger til ekamoves computer enhed. Tænd for ekamove.

Vedr. indstilling/programmering af ekamove, se manual.

Skummadrassen. (Se også skema)

Anvend kun en god skummadras. Vælg en madras der er passer til brugerens personvægt/størrelse.

Den skummadras der medfølger som standard (ekaflex-s) opfylder **EPUAP Kategori III**. Den kan anvendes til en personvægt fra 40/50kg til 120/150kg afhængig af kropsprofil. **Ved tryksår i stadie 3 (4) anbefaler vi vores ekaterapi madras.**

Vigtigt: Madrassen skal mindst være 1-2cm mindre i bredden end afstanden imellem de madrasstyr der sidder på sengebunden. På nogle senge kan madrasstyr afmonteres eller justeres i bredden. **Ved anvendelse af madrassen Ekaterapi samt "Hårde" madrasser skal vendingsvinkel altid være mindre end 25°.**

Lejring analyse.

Målgruppe. Ekamove kan som udgangspunkt anvendes til alle brugere der ikke kan vende sig selv i sengen. Brugeren skal kunne tåle at ligge på ryggen i perioden hvor ekamove anvendes..

Borgeren sygdomsbillede:

Inden installation af ekamove skal fagligt personel (Læge, Sygeplejerske, fysioterapeut) altid vurdere om der kan opstå komplikationer ved anvendelse af ekamove. Lav altid en lejringsanalyse af brugeren, når brugeren ligger på ryggen i sengen. Find behovet for lejringspuder eller andre tiltag der er nødvendigt for brugerens sikkerhed samt velbefindende.

Bemærk: Såfremt manuelt vendelagen, f.eks. **Master turner**, anvendes i forbindelse med personlig pleje, skal der anvendes kilepuder til støtte af hoften. Dermed reduceres muligheden for at hoften glider fra side til side under den automatiske vending. Der skal anvendes en pude på hver sin side af hoften.

Ved anvendelse af Ben-sektion: Placer **altid** en lille pude i mellem benene i fodenden så ben/fødderne ikke kommer til at gnide mod hinanden under vending.

Valg af lejringsparameter.

Følgende skema er kun vejledede indstillinger. Følg dagligt brugeren og indstil ekamove efter behov.

Ved "nervøse" personer samt smertepatienter startes der altid med en vinkel på 10-15° og et tidsinterval på min. 60 min. Tilpas derefter tids-/vinkel parameter over en tidsperiode 2- 8 dage, indtil det bedste parameter "set-up" er fundet. Brugeren skal **altid overvåges** af personalet for at forebygge evt. komplikationer. Ved problemer, kontakt fagligt personel eller leverandøren.

Person vægt.	Anbefalet madrastype	Problem zone	Program	Tid(min) (*)	Vinkel
10 - 40 Kg	ekasoft eller lignende	Haleben	LR	30 ~ 60	20° ~ 30°
		Trochanter venstre eller venstre krop zone	RN	30 ~ 60	20° ~ 30°
		Trochanter højre eller højre krop zone	LN	30 ~ 60	20° ~ 30°
		Kun Prophylaxes, ingen specifikke problemer	LNR	40 ~ 120	20°
40- 120Kg	ekaflex-s eller lignende	Haleben	LR	30 ~ 60	20° ~ 30°
		Trochanter venstre eller venstre krop zone	RN	30 ~ 60	20° ~ 30°
		Trochanter højre eller højre krop zone	LN	30 ~ 60	20° ~ 30°
		Kun Prophylaxes, ingen specifikke problemer	LNR	40 ~ 120	20°
40/50 - 300Kg.	ekaTerapi eller lignende	Haleben	LR	30 ~ 60	20° ~ 25°
		Trochanter venstre eller venstre krop zone	RN	30 ~ 60	20° ~ 25°
		Trochanter højre eller højre krop zone	LN	30 ~ 60	20° ~ 25°
		Kun Prophylaxes, ingen specifikke problemer	LNR	40 ~ 120	20°

(*) Anvend aldrig lejringsstider under 30min.

Ved yderlig information se vedlagte manual.