

# Quick Guide

## Mary Personløfter

---

### Håndbetjening:

**Batteri indikator** – Skal sættes til opladning når første lampe lyser.

**Benvinkling ud** – Skal køres helt ud før løft.

**Benvinkling ind** – Personliften fylder mindst.



**Service indikator** – Skal til service når lampen lyser.

#### **Arm op – Løft.**

Før og under et løft skal der sikres mod klemningsfare for bruger og hjælper. Løft aldrig brugeren højere end det er nødvendigt.

#### **Arm ned – Sænkes.**

Personløfteren er ikke et transportmiddel. Hjælperen er ansvarlig for at personløfteren ikke er defekt.

---

### Bremser:



**Hjul Bremse** - De bagerste hjul har bremsefunktion. Hjulene bremses ved at træde bremsepedalen ned. Brems altid personløfteren ved parkering.

# Quick Guide

## Mary Personløfter

### Nødstop / Nødsænkning:



#### Nødstop

Kontroller regelmæssigt at nødstopet fungerer korrekt. Løfteren må ikke bruges, hvis nødstopet ikke fungerer.

Personløfteren skal standse øjeblikkeligt ved tryk på den røde nødstop knap.

Nødstop knappen frigøres efter brug ved at vride den en kvart omgang, herefter er Personløfteren igen klar til brug.

**Nødstopet må ikke bruges til start-stopknap.**

#### Nødsænkning

Personløfteren har nød sænkning indbygget i styreboksen, over pil ned er der et hul. Heri stikkes spidsen på en blyant eller lignende redskab. Løftearmen bevæger sig langsomt nedad, når funktionen aktiveres.

#### Nødsænkning



#### Nødsænkning

Løfteren har ligeledes en mekanisk nedsænkning-funktion. Ved at trække opad i ringen på aktuator, bevæger løftearmen sig nedad, når den er belastet med brugerens vægt.

### Dagligt eftersyn af Personløfteren:

- ✓ Alle dele er på plads, ikke nogen løse dele.
- ✓ Der ikke er defekte el-dele, aktuatorer, ledninger.
- ✓ Der ikke er støj fra aktuatorer og styreboks.
- ✓ Personløfteren ikke har rust eller overfladeskader.
- ✓ Personløfteren ikke viser tegn på andre skader.
- ✓ Hjul og bremsefunktion ved hjul.

### Batteri:

- Batterierne oplades regelmæssigt.
- Opladning hver nat anbefales.
- Nødstopet må ikke være trykket ind under opladning.

*Personløfteren må ikke løfte mere end 250 kg*

*Brug godkendte løfte-sejl*

*Personløfteren må ikke bruges hvis der er mistanke om Personløfterens funktioner.*