

Denne guide gælder for Focus 14 Blue, Focus 40 Blue og Focus 80 Blue sammen med iOS enheder.

Forbindelse af Focus Blue punktdisplay

ærk venligst: 5. Generation af Focus Blue punktdisplays fungerer kun med iOS 11 og frem.

For at oprette en Bluetooth forbindelse mellem dit Focus display og en Apple iOS enhed, såsom en iPhone, skal du gøre følgende:

1. Tænd for dit Focus Blue display.
2. På din iOS enhed skal du navigere til og åbne Indstillinger efterfulgt af Bluetooth og sikre dig at Bluetooth er aktiveret.
3. Berør to gange hurtigt på skærmen på Tilbage knappen for at vende tilbage til Indstillinger, og naviger herefter ned til Generelt elementet efterfulgt af Tilgængelighed.
4. Naviger til og vælg VoiceOver for at åbne indstillingerne for VoiceOver.
5. Naviger til og vælg Braille elementet for at åbne indstillingerne for Braille. Din iOS enhed vil automatisk starte søgningen efter et nyt braille display til tilslutningen.
6. Naviger til elementet under "Vælg braille display". Elementet vil først annoncere "Søger". Når iOS enheden finder et Focus display vil navnet blive angivet her.
7. Så snart display befinder sig i listen skal du navigere til og vælge det for at påbegynde tilslutningen. Direkte på din iOS enhed skal du indskrive koden 0000 og navigere til og vælge "Dan par" knappen som er placeret i det øverste højre hjørne, for før at forbindelsen oprettes.

Så snart Focus punktdisplayet er tilsluttet kan du fremadrettet tænde for dit display inden du aktiverer din iOS enhed fra standby og de vil automatisk oprette forbindelse. Husk at sætte din iOS enhed i standby før du slukker for dit Focus Blue display for at sikre dig at de automatiske forbindelse fungerer efter hensigten næste gang du ønsker at gøre brug af displayet med din iOS enhed.

Focus Blue Kommandoer med iOS

De følgende sektioner præsenterer iOS kommandoer som kan blive udført via braille tastaturet på dit Focus Blue display samt gennem enkelte andre knapper også.

ærk venligst: Benyt **K Mellemrum, punkt 1 3** sammen med **Mellemrum** for at aktivere VoiceOver Hjælpen. Du kan herefter benytte de forskellige kommandoer på dit Focus Blue display for at lære hvordan de arbejder sammen med VoiceOver uden faktisk at udføre de enkelte kommandoer. Når du er færdig skal du benytte **B Mellemrum, punkt 1 2** sammen med **Mellemrum** for at forlade VoiceOver Hjælpen.

Navigations kommandoer

Kommando	Handling
Mellemrum med punkt 1	Flyt til forrige element
Mellemrum med punkt 4	Flyt til næste element
Mellemrum med punkt 2	Rul display venstre
Mellemrum med punkt 5	Rul display højre
Mellemrum med punkt 1 2 3	Spring til første element
Mellemrum med punkt 4 5 6	Spring til sidste element
Mellemrum med punkt 1 2 4	Finder og placerer fokus på et element i det aktuelle skærbillede som matcher den specifikke tekst (efter indskrivning af tekst som der skal søges efter, benyt Mellemrum med punkt 1 5 for at udføre søgningen)
Mellemrum med punkt 1 3 5	Rul en side til højre
Mellemrum med punkt 2 4 6	Rul en side til venstre
Mellemrum med punkt 3 4 5 6	Rul en side op eller præsenter notifikations centeret når fokus er på statuslinjen
Mellemrum med punkt 1 4 5 6	Rul en side ned eller præsenter kontrol centeret når fokus er på statuslinjen
Mellemrum med punkt 2	Springer til statuslinjen

3 4

Mellemrum med punkt 2 3	Vælg forrige rotor indstilling
Mellemrum med punkt 5 6	Vælg næste rotor indstilling
Mellemrum med punkt 3	Flytter til forrige element defineret af rotor
Mellemrum med punkt 6	Flytter til næste element defineret af rotor
Mellemrum med punkt 1 2 5	to gange hurtigt efter hinanden Aktivere App Skifter
Mellemrum med punkt 1 2 3 4 5	Skifter mellem Hurtig Navigation Til og Fra

Læsekommandoer

Kommando	Handling
Mellemrum med punkt 1 2 3 5	Læs alt med start fra valgte element
Mellemrum med punkt 2 4 5 6	Læs alt med start fra toppen
Mellemrum med punkt 1 2 3 4	Pause og Fortsæt læsning

Generelle kommandoer

Kommando	Handling
Mellemrum med punkt 1 2	Aktiverer Tilbage knap, hvis til stede
Mellemrum med punkt 1 4 5 eller Mellemrum med punkt 7	Aktiverer Slet knap
Mellemrum med punkt 1 5 eller Mellemrum med punkt 8	Aktiverer Enter knap
Mellemrum med punkt 1 2 4 5	Cirkulerer mellem Seks punkt, Otte punkt og Forkortet braille output
Mellemrum med punkt 2 3 6	Cirkulerer mellem Seks punkt, Otte punkt og Forkortet braille input
Mellemrum med punkt 1 2 5	Aktiverer Hjem knap (to gange hurtigt aktiverer App Skifter)
Mellemrum med punkt 1 3 4	Aktiverer og Deaktiverer tale
Mellemrum med punkt 2 3 4 5	Aktiverer TAB knap
Mellemrum med punkt 2 3 5 6	Vælg tekst
Mellemrum med punkt 2 3 5	Fravælg tekst
Mellemrum med punkt 3 4 5	Lydstyrke op
Mellemrum med punkt 1 2 6	Lydstyrke ned
Mellemrum med punkt 2 3 4 5 6	Output tekst stil

Kommandoer specifikt for Focus Blue

Kommando	Handling
Cursor Routing knap	Dobbelt tryk op valgte element
Cursor Routing knap over en statuscelle	Såfremt statusceller er aktiveret vil en besked der beskriver hvordan man fortolker de oplysninger blive præsenteret (brug af en cursor router knap som ikke befinder sig over statuscellen vil afvise beskeden)
Venstre NAV Vippe tast Op	Flytter til forrige element defineret af rotor
Venstre NAV Vippe tast Ned	Flytter til næste element defineret af rotor
Venstre NAV Tilstand tast	Vælg element under din finger
Højre NAV Vippe tast Op	Flyt til forrige element

Højre NAV Vippe tast Ned	Flyt til næste element
Højre NAV Tilstand tast	Vælg element under din finger
Venstre Display tast	Rul display til venstre
Højre Display tast	Rul display til højre
Venstre Vælg tast	Aktiverer Tilbage knap, hvis til stede
Højre Vælg tast	* Vote Event Kommando (Skift mellem Start / Stop)
Venstre Vippe tast Op	Rul en side op
Venstre Vippe tast Ned	Rul en side ned
Højre Vippe tast Op	Rul en side til venstre
Højre Vippe tast Ned	Rul en side til højre

*** Vote Event Kommando:**

Start og stop den aktuelle dynamiske handling. Eksempelvis: Besvarer et opkald og lægger på, starter og pauser afspilning af musik og videoer, starter og stopper stopur, starter og stopper videooptagelse, tager et billede i Kamera applikationen, starter og stopper stemmeoptagelse, genoptager VoiceMail afspilning samt stopper optagelse af egen VoiceMail besked.