
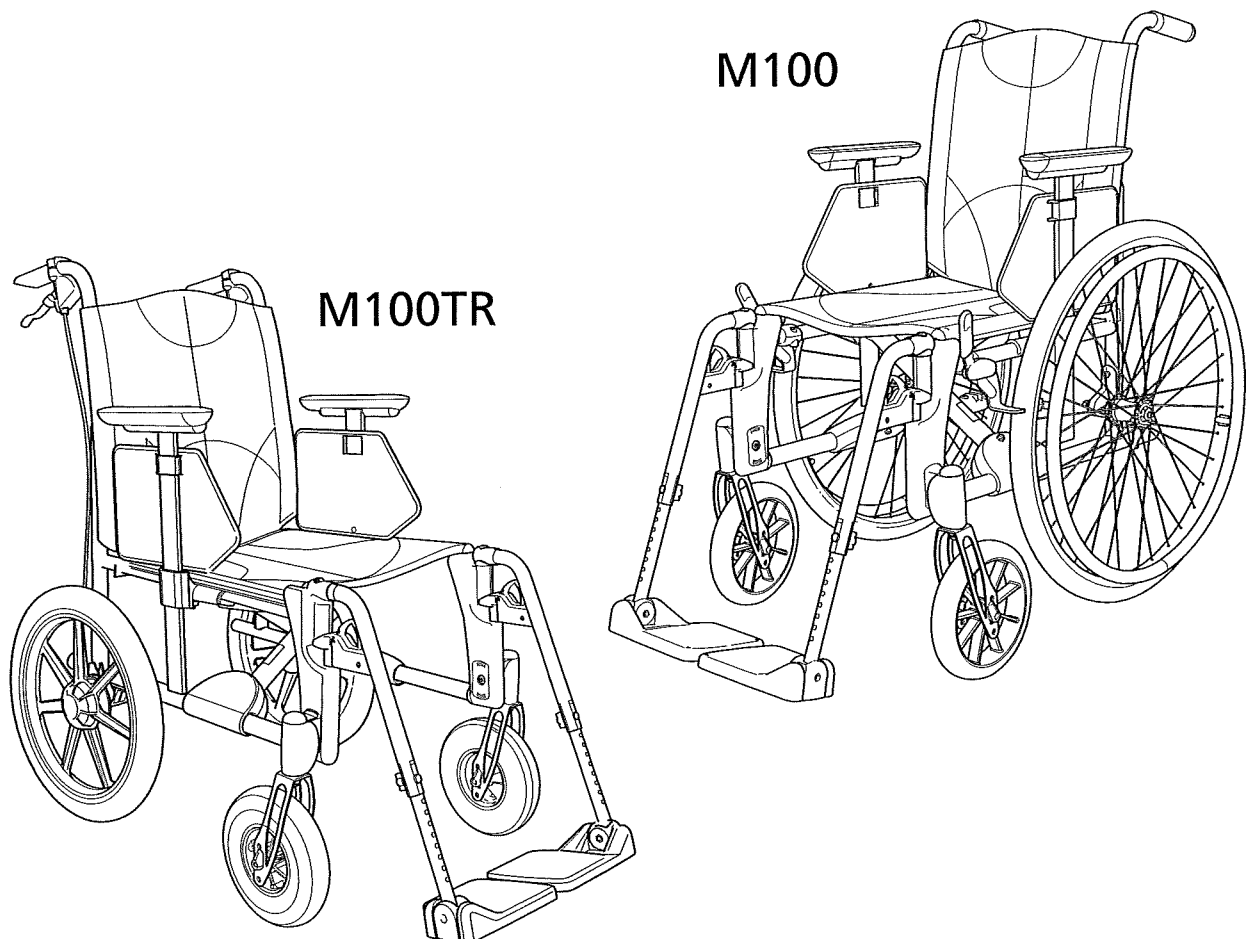



Brugermanual

74999H 2015-11-06

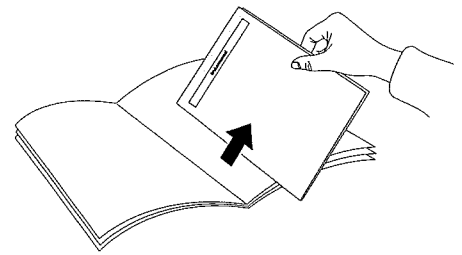


Ved justering af sædehøjde, balanceposition eller rygvinde skal tipsikringens funktion altid kontrolleres.


Symbolforklaring

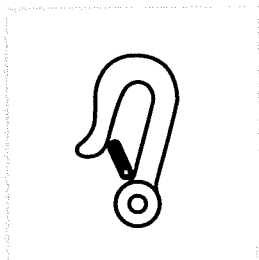

Fastspænding

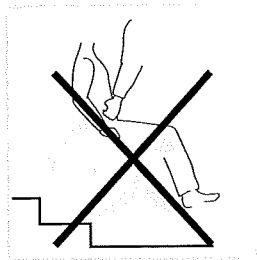

Løft ikke stolen i armlænene

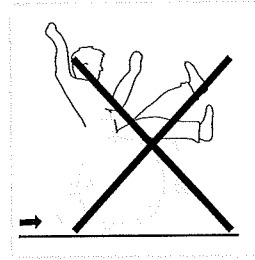

Tiprisiko: Tipsikringen skal altid være slået ned, når du kører.

Brugermanual

Transport i køretøjer

Bus

Etacs kørestole er crashtestede og godkendte i henhold til ISO 7176-19 med fastspændingsdetaljer og trepunktsbælte fra Unwin.

Etac anbefaler i nævnt rækkefølge, at:

- 1) Brugeren flytter over på et af køretøjets sæder og anvender køretøjets 3-punktssele ved transport. Kørestolen placeres derefter i bagagerummet eller fastspændes på et sikkert sted på bagsædet, så den ikke kan vælte eller rulle.
- 2) Kørestolen fastgøres fremadvendt i køretøjet i henhold til denne manual. Brugeren anvender separat 3-punktssele, som er fastgjort i køretøjet.
- 3) I henhold til direktivet 2001/85/EG, bilag VII, punkt 3.8.3, findes der særskilt markerede kørestolepladser, som tillader transport med kørestolen vendt mod færdselsretningen i køretøjer.

Anvendes denne transportmåde, skal brugeren

være aktiv under kørslen, have beredskab for hastige bevægelser samt være i stand til at bibeholde en sikker siddestilling i løbet af hele turen.

Brugeren må ikke være så bevægelsehæmmet, at han/hun ikke kan klare at holde sig selv og kørestolen fast i det håndtag, der er monteret i køretøjet, ved hastigheds- eller retningsændringer.


Ved pkt. 2 og 3 bør:

- korrekt indstillet nakkestøtte anvendes
- ryglænet være på højde med eller over brugers skuldre
- parkeringsbremsen anvendes
- tipsikringen vippes ned
- tilvalg/tilbehør, der kan afmonteres uden værktøj, skal tages af og spændes fast
- tværstang skal anvendes
- drivningene skal være monteret på drivhjulene

Fastspænding




Bespændingsanordningen må ikke trækkes igennem hjulene.

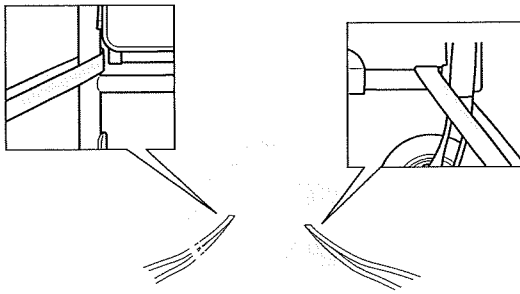


Personbil

- Kørestolen bør i første omgang placeres i bagagerummet.
- Hvis kørestolen placeres på bagsædet, skal det sikres, at den ikke kan vælte eller rulle. Fastgør den om muligt med bilens sikkerhedssele.

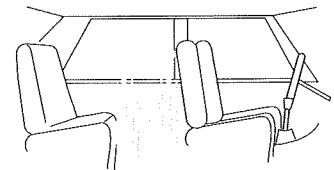


Udklappning

- Tryk det ene sæderør nedad med hele hånden oven på sædet.
- Hold ikke på sæderøret, når kørestolen klappes ud på grund af klemrisiko.
- Klap fodpladerne ned.

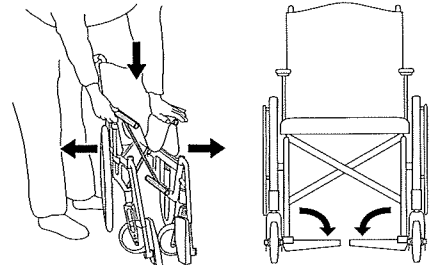

Sammenklappning

- Eventuel kørebøjle og / eller tværstang afmonteres henholdsvis hægtes af.
- Fodpladerne klappes op.
- Løft sædet op.

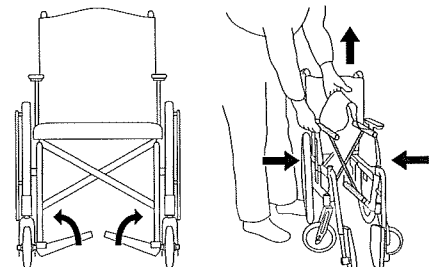


Brugermanual



Drivhjul med Quick Release


- Kontroller altid ved montering, at drivhjulet sidder rigtig. Knappen i navet skal fjedre helt ud.

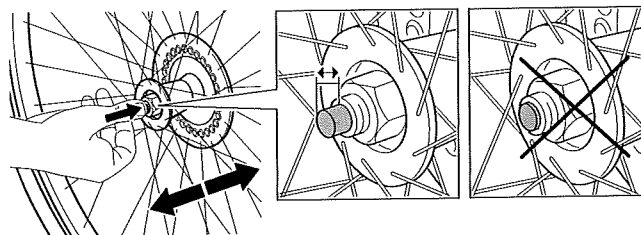

Fodplader


Juster højden, så du kan mærke, at fødderne støttes, og lårene hviler mod puden.


Til udendørs brug bør der være en afstand på 4-5 cm fra fodpladerne til underlaget.

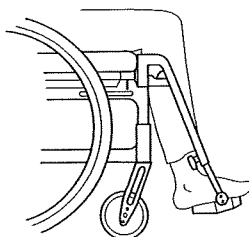

Stå aldrig på fodpladerne, tiprisiko!


Justering af vinkel

Juster fodpladernes vinkels, så fodleddene får en vinkel på 90°.  5 mm

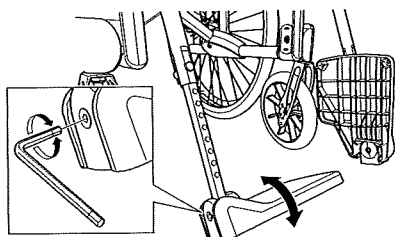

Justering af højde

Vingemøtrikken på benstøtten løsnes helt. Træk skruen ud. Indstil højden. Monter skruen og vingemøtrik. Sørg for, at vingemøtrikkerne er ordentligt spændt.

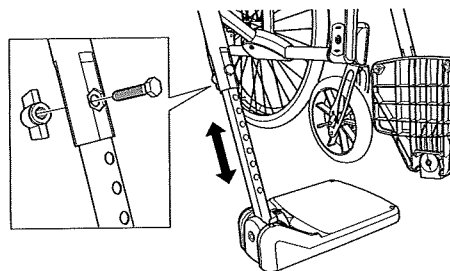


Armlæn (justering)

- Skruen på indersiden af armlænspladen løsnes.
- Flyt armlænet op eller ned til ønsket højde, og skru fast.
- Højt indstillede armlæn støtter og aflaster ryggen bedre end lavt indstillede.



3 mm

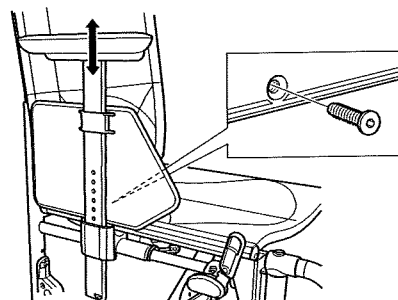


Justering af ryglæns højde og betræk i standardkonfiguration



5 mm




T20

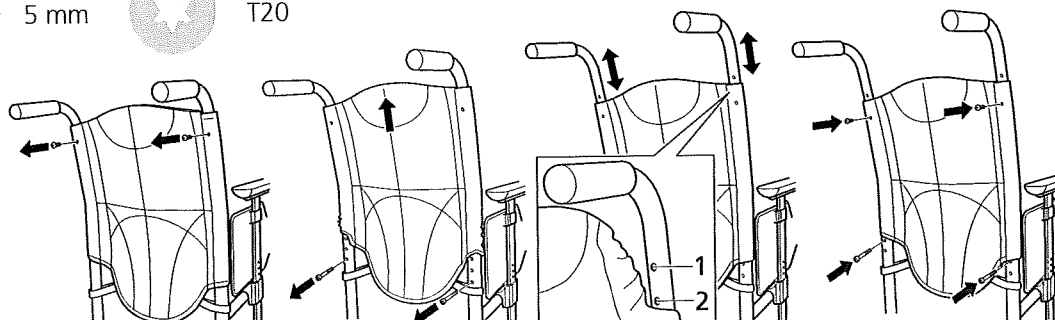


Brugermanual

M100 TR Hjælperbremse

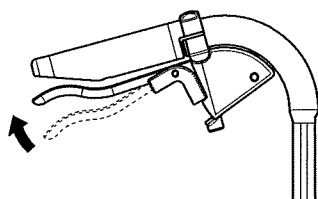

- Brems under kørsel ved at trække bremsehåndtaget opad.

M100 TR Parkeringsbremse

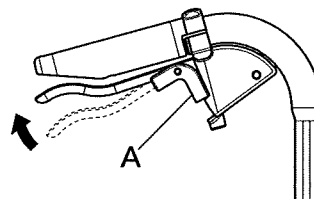

- Aktiver parkeringsbremsen ved at trække bremsehåndtaget opad og trykke knappen A ind.

Løsnes ved at trække håndtaget opad.

Drivhjul: Rengør Quick Release akslen efter behov.

Forhjul: Rengør forhjulsaksler efter behov.

Chassis: Rengør chassiset med rengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH-værdi mellem 5-9 eller med 70 % desinfektionssprit. Skyl og aftør.

Betræk: Vask, se mærkning på betrækket.


Ved mere besværlige pletter, kontakt Hjælpemiddelcentralen.

(!) Smør bevægelige dele/led med f.eks. cykelolie eller lignende efter behov.


Fejlfindingskema

Kørestolen trækker skævt	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil forgaffelbeslagenes vinkelindstilling • Kontroller, at forgaffelbeslagene er monteret i samme højde • Drivhjulbeslagene er forkert monteret • Brugeren belaster kørestolen skævt • Der er større fremdrivning i den ene side
Kørestolen er "tung" at køre	<ul style="list-style-type: none"> • Drivhjulbeslagene er forkert monteret • Rengør forhjulsakslerne for hår og snavs
Kørestolen er "tung" at dreje	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at forgafferne ikke er spændt for hårdt til • Rengør forhjulsakslerne samt forhjul for hår og snavs
Bremser dårligt	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil afstanden mellem dæk og bremse
Slør i drivhjulene	<ul style="list-style-type: none"> • Juster længden af Quick Release akslen
Drivhjulene er vanskelige at af- og påmontere	<ul style="list-style-type: none"> • Rengør og smør Quick Release akslen med f.eks. cykelolie • Juster Quick Release akslens længde
Styrehjulene "vibrerer"	<ul style="list-style-type: none"> • Forgafferne er ikke tilstrækkeligt hårdt efterspændt • Kontroller, at forgaffelbeslagene er monteret i samme højde • Indstil forgaffelbeslagenes vinkelindstilling • For meget tyngde på forhjulene - indstil kørestolens balancestilling
Kørestolen er vanskelig at klappe sammen/klappe ud	<ul style="list-style-type: none"> • Betrækket er for stramt • Rens og smør leddene i krydsene under sædet
Kørestolen føles "slap"	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at bolte og greb er spændt korrekt

Brugermanual – Køreteknik, brug

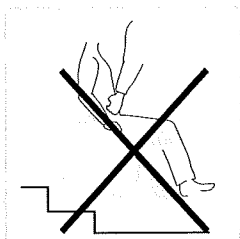






Løft ikke stolen i armlænene

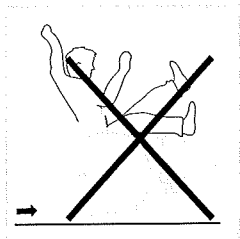

Tiprisiko: Tipsikringen skal altid være klappet ned under kørsel.







Parkering

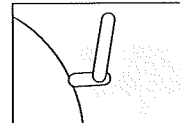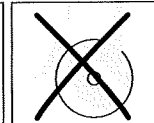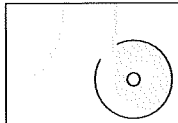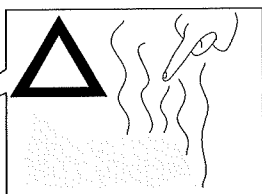
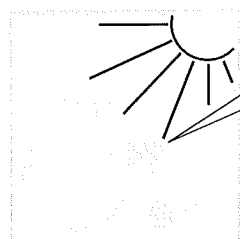


Forflytning til/fra kørestol


Stå aldrig på fodpladerne, tiprisiko!

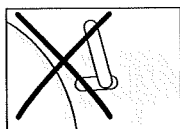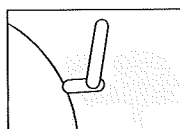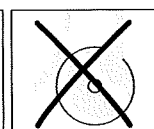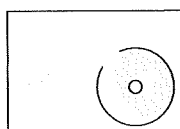


Sidelæns

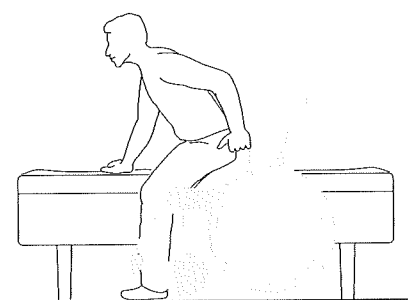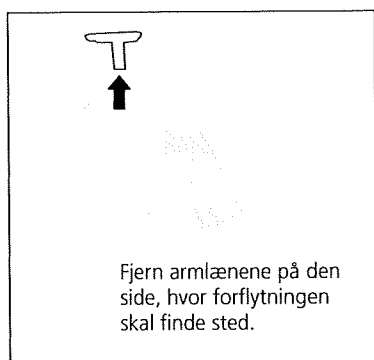

Forfra

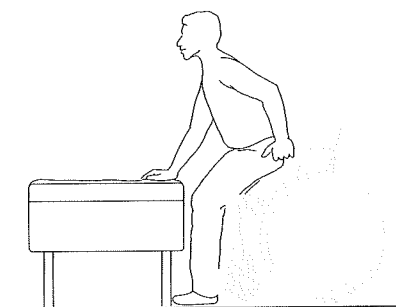


Løft af kørestol

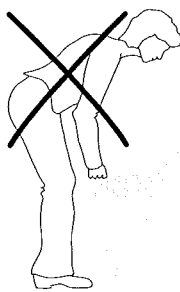

- Sørg for, at højdeindstillelige kørehåndtag er ordentligt trukket til.
- Ikke-låsbare benstøtter svinges ind under sædet, og kørestolen løftes i stellet forreste øvre del.




Brugermanual – Køreteknik, brug

 Illustrationerne viser principper for køreteknik.

Bruger, forlæns opkørsel

Denne teknik anbefales kun for erfarne kørestolsbrugere.


– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.

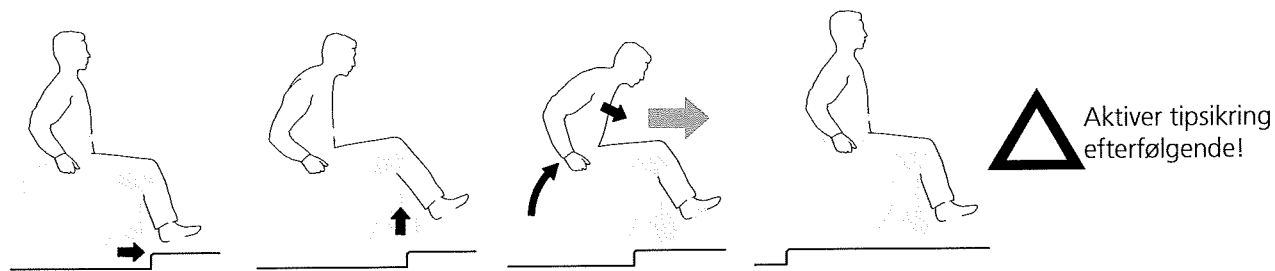

Bruger, baglæns opkørsel

Denne teknik kan kun benyttes ved en lav kant/trin, afhængig af fodpladernes indstilling.


– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.

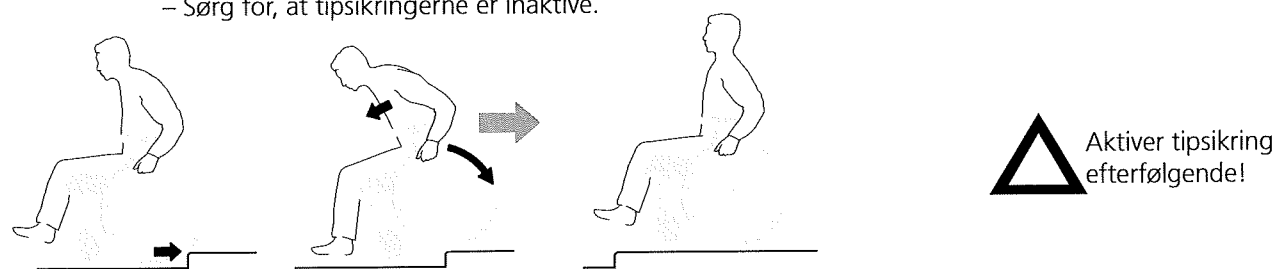

Bruger, forlæns nedkørsel

Denne teknik anbefales kun for erfarne kørestolsbrugere.


– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.

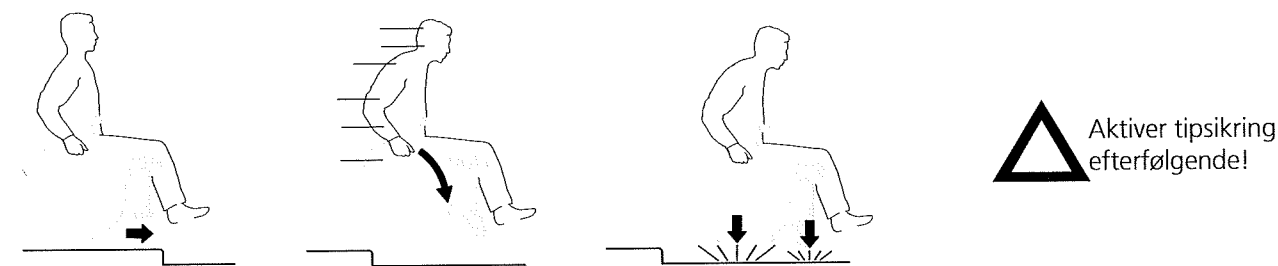

Bruger, baglæns nedkørsel

Denne teknik anbefales kun for erfarne kørestolsbrugere.


– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.

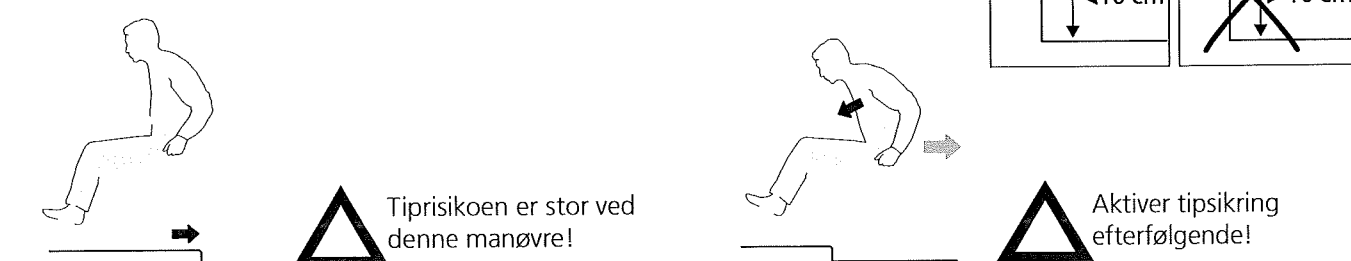

Brugermanual – Køreteknik, brug

Hjælper, forlæns opkørsel


– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.

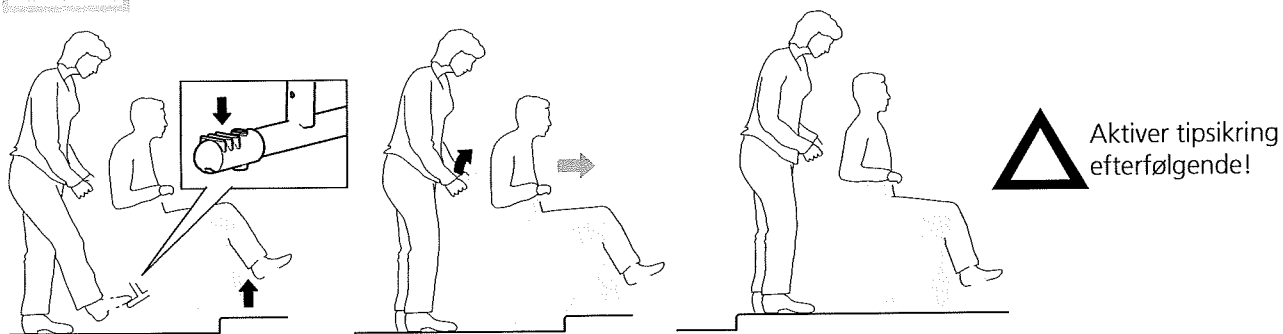

Hjælper, baglæns opkørsel

– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.


Aktiver tipsikring efterfølgende!

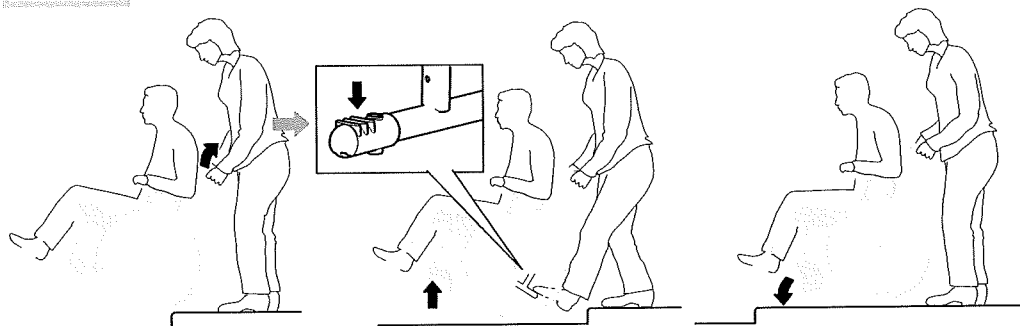

Hjælper, forlæns nedkørsel

– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.


Aktiver tipsikring efterfølgende!

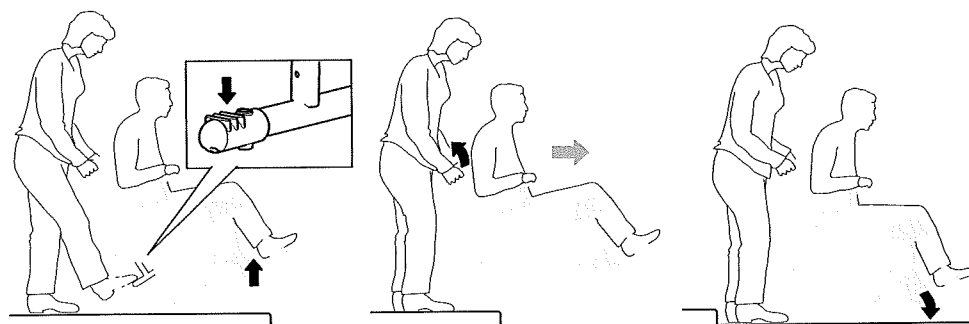

Hjælper, baglæns nedkørsel

– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive.

Aktiver tipsikring efterfølgende!

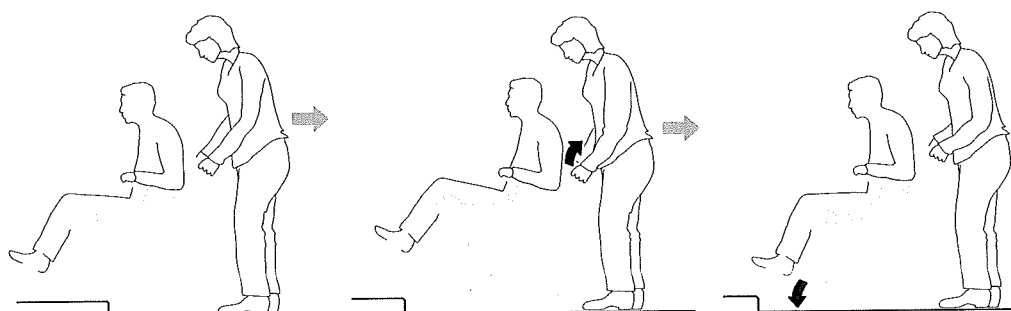


Brugermanual – Køreteknik, brug





Trapper, op

– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive. Kør aldrig på rulletrapper, heller ikke selv om der er hjælpere til stede. Sørg for, at de højdeindstillelige skubbehåndtag er spændt ordentligt fast. Vi anbefaler at man altid er to hjælpere ved denne forflytning. En der står bagved og holder i kørehåndtagene og en der står foran og holder i rammen (eller i bestøtterne hvis de er låsbare).

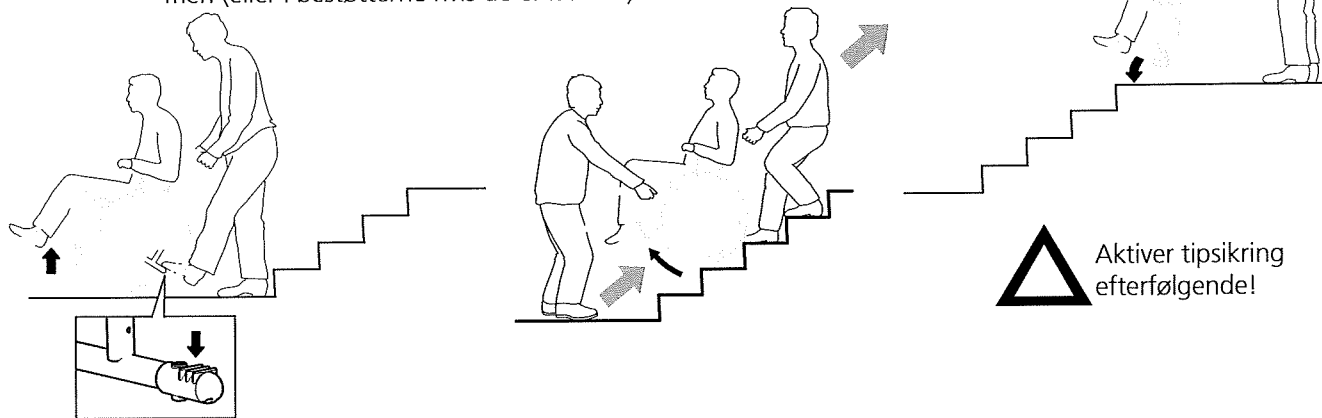

Trapper, ned

– Sørg for, at tipsikringerne er inaktive. Kør aldrig på rulletrapper, heller ikke selv om der er hjælpere til stede. Vi anbefaler at man altid er to hjælpere ved denne forflytning. En der står bagved og holder i kørehåndtagene og en der står foran og holder i rammen (eller i bestøtterne hvis de er låsbare).

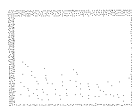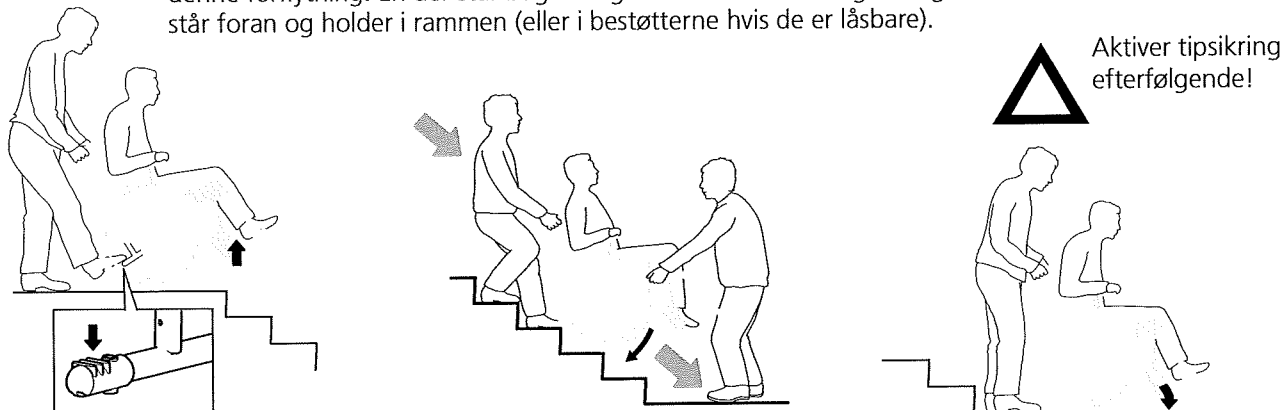

Kørsel op eller ned ad bakke

Kontroller farten ved hjælp af drivringene, ikke med bremserne.


Undgå at vende midt på en bakke. Kør altid så vinkelret på skråningen som muligt. Det er bedre at bede om hjælp end selv at tage chancer.



Aktiver tipsikring efterfølgende!

Kørsel opad:

Læn kroppen fremad for at få tyngdepunktet så langt fremad som muligt.

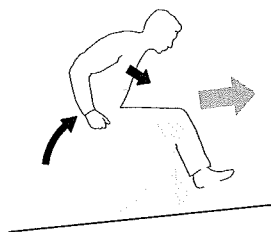

Kørsel nedad:

Læn kroppen mod ryglænet for at få tyngdepunktet så langt bagud som muligt.

