


# Quick guide

## VENDLET V5 VENDLET V5+




-knappen fungerer også som nødstop





VENDLET skal monteres og anvendes som beskrevet i manualen



### Når VENDLET V5 eller VENDLET V5+ benyttes som sengehest

1. Liggefladen skal være vandret.
2. Fjern sengeheste af plast og hæng dem på mellemstangen.
3. Dobbeltklik på  for at aktivere VENDLET systemet. Der lyder et akustisk signal og den grønne diode lyser. Når håndbetjeningen ikke har været aktiveret i 90 sekunder, slår VENDLET systemt fra igen.
4. Vending/håndtering af den sengeliggende sker ved at benytte funktionerne på håndbetjeningen.

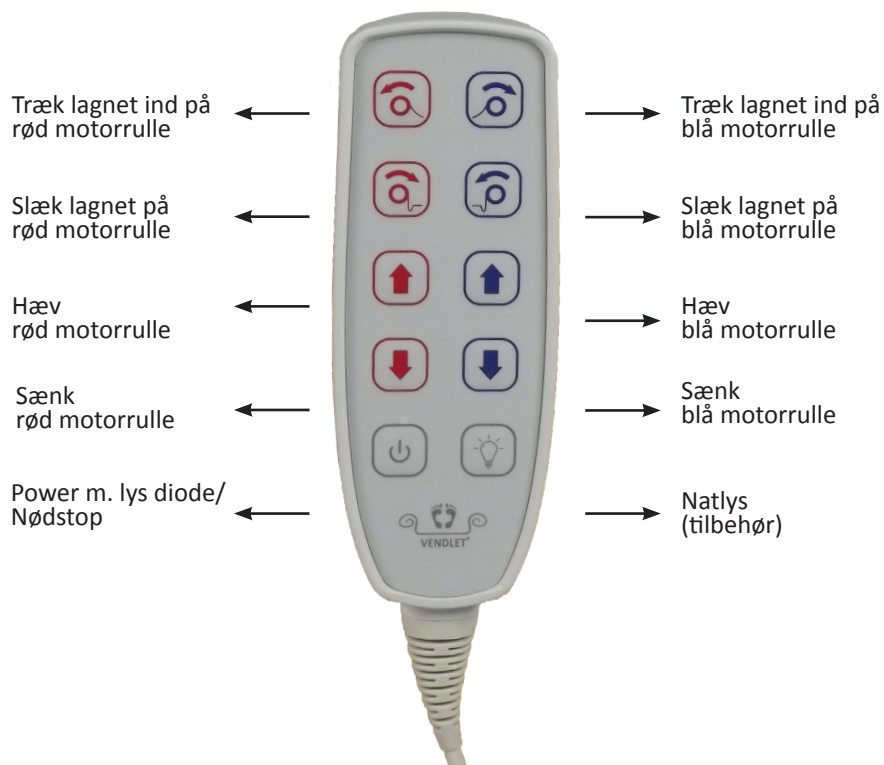

5. Efter brug - hæv motorrullerne, hvis disse har været sænket i forbindelse med plejen af den sengeliggende.
6. Monter sengeheste af plast – 2 på hver side.  Se evt. vores sengehestvejledning.

**Under forflytningen holdes fokus på den sengeliggende.**



Scan QR-koden for at se instruktionsfilm




# Quick guide


VENDLET V5  
VENDLET V5+



## Når VENDLET V5 eller VENDLET V5+ IKKE benyttes som sengehest

1. Liggefladen skal være vandret.
2. Hæv motorrullerne i begge sider.
3. Dobbeltklik på  for at aktivere VENDLET systemet. Der lyder et akustisk signal og den grønne diode lyser. Når håndbetjeningen ikke har været aktiveret i 90 sekunder, slår VENDLET systemt fra igen.
4. Vending/håndtering af den sengeliggende sker ved at benytte funktionerne på håndbetjeningen.



-knappen fungerer også som nødstop

Træk lagnet ind på rød motorrulle ←

Slæk lagnet på rød motorrulle ←

Hæv rød motorrulle ←

Sænk rød motorrulle ←

Power m. lys diode/  
Nødstop ←



→ Træk lagnet ind på blå motorrulle

→ Slæk lagnet på blå motorrulle

→ Hæv blå motorrulle

→ Sænk blå motorrulle

→ Natlys  
(tilbehør)

5. Motorrullerne skal sænkes i begge sider inden, den sengeliggende forlades.



**Under forflytningen holdes fokus på den sengeliggende.**



VENDLET skal monteres og anvendes som beskrevet i brugermanualen.



Scan QR-koden for at se instruktionsfilm