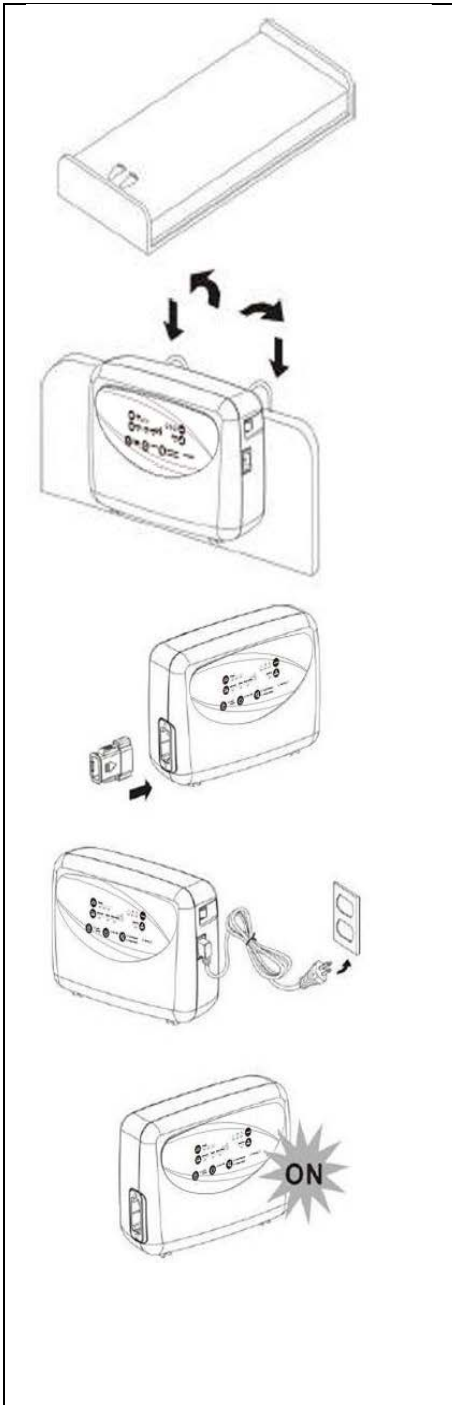



# Installationsguide

## ProCare Auto/ProCare 3 Auto




1. Placer madrassen på sengebunden. Fastgør madrassen til de *bevægelige* dele af sengebunden. Vær opmærksom på korrekt placering af fodende, (se fodtryk).

*OBS: ProCare 3 Auto. Husk skummadrassen Prima 6 i bunden.*

2. Hæng pumpen på sengegavlen (fodenden), eller placér pumpen på et fast lige underlag.
3. Sæt slangerne fra madrassen i pumpen. Når der høres et klik, er slangen korrekt fastgjort.
4. Fastgør ledningen i ophæng på siden af madrassen. Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd
5. Tænd for pumpen både på hovedafbryderen på siden af pumpen og på "power" knappen  forrest på pumpen
6. Check at CPR-ventilen på siden af madrassen, i hovedenden, er drejet om på "close".

Vent ca 20-30 minutter og madrassen er fuldt oppustet og klar til brug









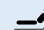

7. Tryk på AUTO knappen  - når patienten ligger på madrassen. Trykket indstilles automatisk efter patientens vægt, vælg herefter behandlingsmodus (se quickguide)








# Quickguide

## ProCare Auto/ProCare 3 Auto

 Power	Tænd/sluk for pumpen
 Lock/unlock - Låsefunktion	Når den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses når det ikke har været i brug i 3 min.
 Max Firm	Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk. Slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på Max Firm knappen igen.
 Trykindstilling	Justere trykket i madrassen baseret på patientens vægt – tryk for rejustering ved ny bruger – når der kun er ét lys er trykket indstillet
 Tuning - Komfortindstilling	“0” er det tryk systemet automatisk finder. “+” er et lidt højere tryk = mere fast madras. “-” er et lidt lavere tryk = blødere madras.
 Terapi-valg	 <b>Alternate:</b> Dynamisk funktion. Systemet vil veksle trykket i cellerne hvert 10. minut.  <b>Static:</b> Statisk funktion. Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler.  <b>Seat Inflation:</b> Siddefunktion giver borgeren yderligere støtte i den siddende stilling (eks. spise).
 Alarm	Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse.

# Alarmer

## ProCare Auto/ProCare 3 Auto

<b>Low pressure</b> Lavt tryk	Low pressure lampe lyser ud for symbolet: 	
<b>Årsag</b>	CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i madrassen.	
<b>Løsning</b>	Luk CPR-ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Check at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen. Kontakt depotet hvis problemet ikke kan løses.	
<b>Power failure</b> Strømsvigt	Power failure lampe lyser ud for symbolet: 	
<b>Årsag</b>	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen.	
<b>Løsning</b>	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sikr dig at pumpen er tændt.	
<b>Service</b> Tid til serviceeftersyn	Lampe lyser ud for  ved	 symbolet
<b>Årsag</b>	Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran.	
<b>Løsning</b>	Kontakt depotets tekniker for hjælp, eller kontakt Zibo Athene.	
<b>NØDSITUATION</b> <b>HJERTESTOP, CPR</b>		Den røde CPR-ventil findes på siden af madrassen i hovedenden.
<b>Løsning</b>	CPR-ventilen drejes så luften hurtigt tømmes af madrassen. Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme madrassen hurtigere for luft.	