

AlterG® hurtig start guide

1. Tænd for kontakten, så den står på "ON"

2. Tag et par AlterG shorts på, så lynlåsen vender fremad


3. Med cockpittet nede gå ind i AlterG'en bagfra

4. Løft cockpittet op til lige under hoftekammen

5. Bevæg låsemekanisme til højre indtil den stopper.
Løft eventuelt cockpittet lidt indtil det falder i hak.

6. Lyn lynlåsen

7. Fastgør sikkerhedsklipsen til dit tøj.

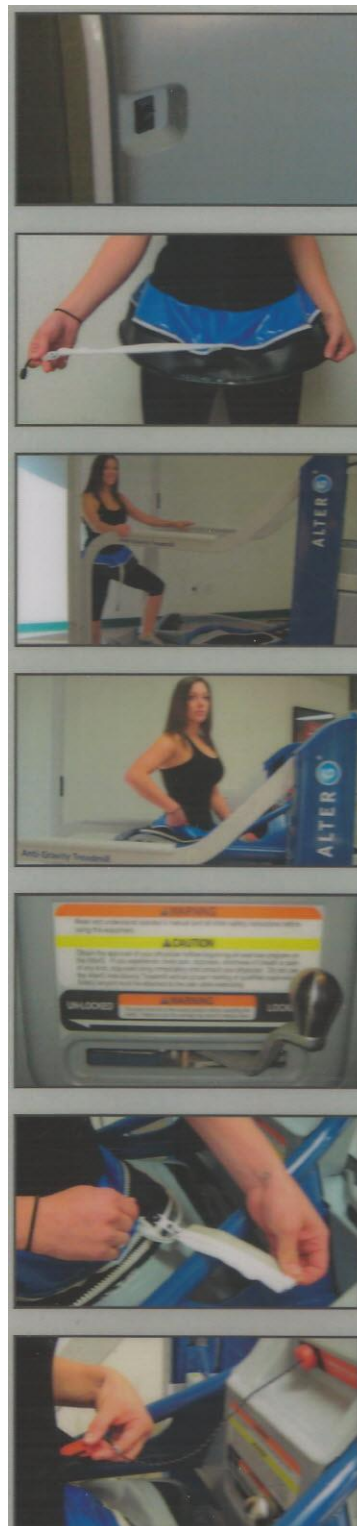

Bemærk!


1. Løbebåndet kan bevæge sig, når du stiller dig op på det. Udvis forsigtighed når du træder ind på løbebåndet.
2. Når du er færdig med at anvende AlterG, skal cockpittet løftes op til højde 10 eller højere. Dette vil bevare funktionaliteten længere

E-mail hjælp: info@fysiodema.dk

Tlf: 2041 2363

www.fysiodema.dk

AlterG® hurtig start guide

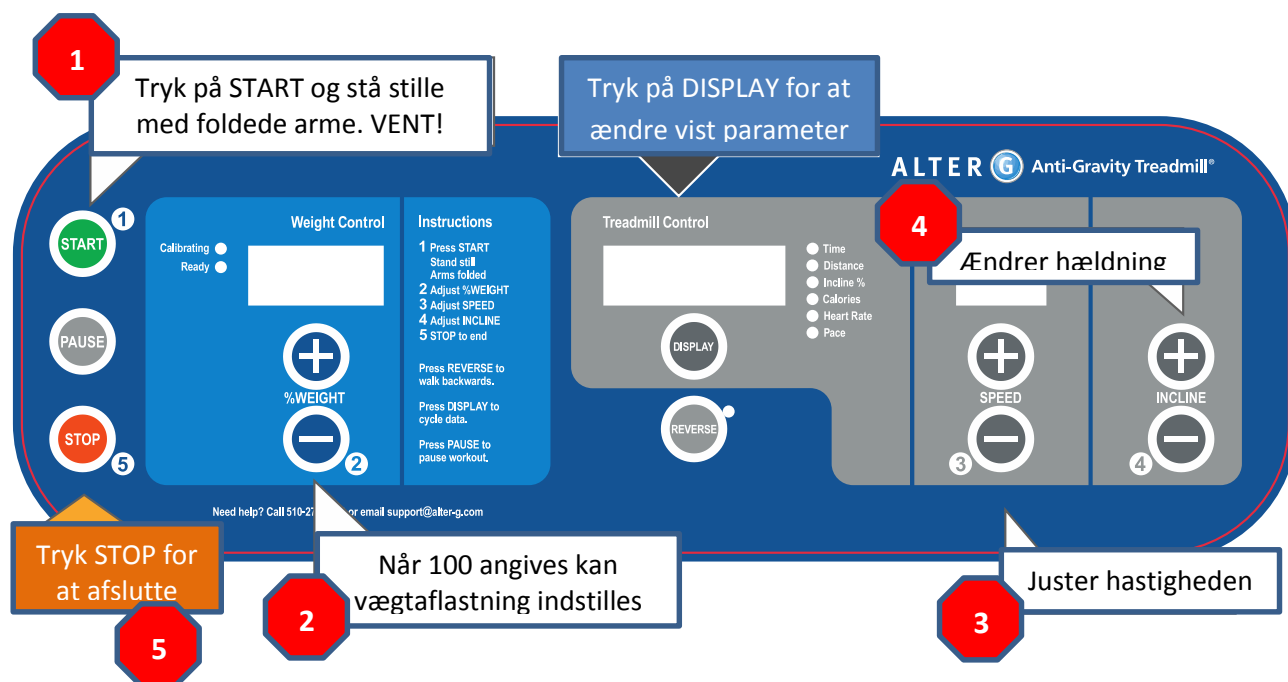

START

Tryk på **START** og stå stille med foldede arme. AlterG vil kalibrere. Når **READY** ses i skærbilledet, er AlterG aktiveret og klar til at blive anvendt.

PAUSE

Trykkes på **PAUSE** stopper løbebåndet og hældning ændres til 0%. Vægtaflastningen ændres ikke. Trykkes igen på **PAUSE** starter løbebåndet igen.

STOP

Tryk på **STOP** for at afslutte anvendelsen. Løbebåndet vil langsomt stoppe, og vægtaflastningen vil forsvinde. Hældning vil ændres til 0%.

REVERSE

Tryk på **REVERSE** og løbebåndet bevæger sig baglæns. Trykkes der mens løbebåndet bevæger sig fremad, vil det gradvis stoppe inden det begynder at bevæge sig baglæns.

DISPLAY

Tryk **DISPLAY** for at ændre parameteren, der ønskes aflæst. Holdes knappen nede i mere end 2 sekunder, vil parametrene skifte hurtigt.

E-mail hjælp: info@fysiodema.dk

Tlf: 2041 2363

www.fysiodema.dk