




Kvikguide til Enhanced Vision's Amigo HD

Opladning

Den medfølgende adapter leveres med stikben, der passer til forskellige landes stikkontakter. Sæt den danske/europæiske adapter i, som vist til højre, sæt adapteren i en stikkontakt, og sæt stikket i den frie ende af adapterens kabel i stikket på venstre side af Deres Amigo HD, som vist til venstre.

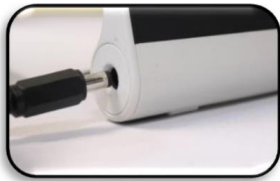

Det anbefales at lade Amigo HD **helt** op, første gang De tager apparatet i brug. Når apparatet er ladet helt op, kan det klare 3-5 timers drift før næste opladning.



Tænd og sluk

Amigo HD tændes og slukkes ved at trykke på den grønne knap nederst på apparatets højre side, og **holde den i bund** i nogle sekunder, til der høres en klokkelyd.

Skru op og ned for forstørrelsen

Forstørrelsesgraden justeres ved hjælp af de to gule knapper, mærket med minus- og plus-tegn langs apparatets højre kant.

Kontrasttilstande



Ved at trykke på den blå knap med den halvt fyldte cirkel langs apparatets venstre kant, kan De vælge mellem naturlige farver, samt en række særligt kontrastforstærkede farvetilstande, der fremhæver tekst og andre detaljer. Tryk nogle gange på denne knap, til De får et resultat, der letter Deres læsning.



Tænd og sluk for det indbyggede lys

På bagsiden af Amigo HD findes et par "læse-lamper": For at tænde og slukke for disse, skal De trykke **samtidigt** på den blå knap til valg af farve/kontrasttilstande ved apparatets venstre kant, **samt** den gule knap med plus-tegnets ved apparatets højre kant. Samme kombination bruges til at slukke lyset igen.

Støttefod

Husk at Deres Amigo HD har en udklappelig støttefod på bagsiden; denne er ideel til når De bruger apparatet til læsning eller skrivning.