


<p>(1) LYSSTYRKE (Gult hjul)</p>	<p>Drej i urets retning for at øge lysstyrken. Drej modsat urets retning for at mindske lysstyrken.</p>
<p>(2) FRYS BILLEDE (Rød knap)</p>	<p>Tryk for at fryse det aktuelle billede på skærmen. Tryk igen for at vende tilbage til live visning. Tryk og hold i cirka seks sekunder for at tilgå Gennemse tilstand.</p>
<p>(3) FORSTØRRELSE (Sort hjul)</p>	<p>Drej for at zoome ind og derved øge forstørrelsen eller zoome ud og mindske forstørrelsen.</p>
<p>(4) FIND (Orange knap)</p>	<p>Tryk og hold for at zoome ud og vise et sigtekorn på skærmen som hjælper dig med at få overblik over objektet du har placeret under kameraet. Slip for at vende tilbage til det forrige forstørrelses niveau.</p>
<p>(5) KONTRASTER (Blåt hjul)</p>	<p>Drej for at cirkulere gennem kontrasterne.</p>
<p>(A) AVANCERET (Sort knap)</p>	<p>Benyttes i kombination med andre knapper for at tilgå og udføre avancerede funktioner. Se Avancerede funktioner for yderligere information.</p>

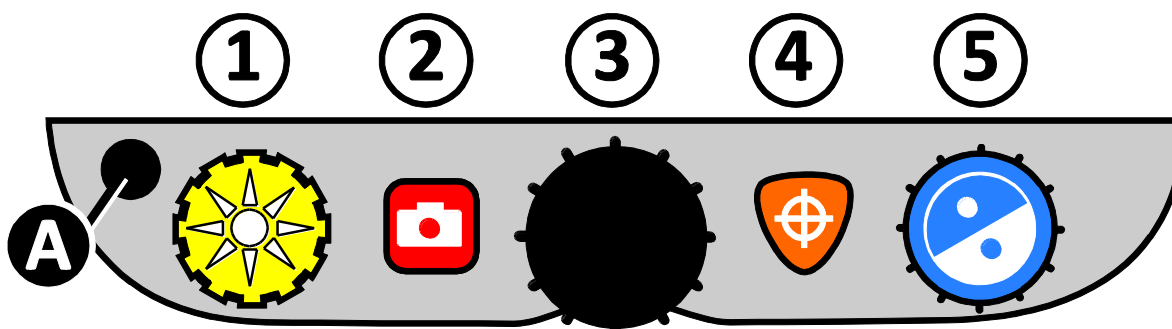

Den sorte **AVANCERET** knap (**A**) benyttes med andre knapper og hjul på kontrolpanelet i kombination for at tilgå og udføre flere avancerede funktioner.

**Tryk og hold** altid **AVANCERET** knappen (**A**) først, og tryk eller drej herefter den specifikke knap eller hjul for at udføre den ønskede operation.

For eksempel, for at nedtone eller øge LED belysningen, **tryk og hold** **AVANCERET** knappen (**A**) og herefter dreje på **LYSSTYRKE** hjulet (1).

(A + 1) LYSSTYRKE (Gult hjul)	Drej for at justere LED belysningen.
(A + 2) FRYS BILLEDE (Rød knap)	Tryk og hold for at gemme det aktuelle billede til et SD-kort. Slip når ikonet for Gemt vises på skærmen. Billeder kan kun gemmes så længe et SD-kort sidder i SD-kort porten.
(A + 3) FORSTØRRELSE (Sort hjul)	Drej for at cirkulere gennem og vise horisontale linjer, horisontale masker, vertikale linjer, vertikale masker og ingen linjer og ingen masker på skærmen.
(A + 4) FIND (Orange knap)	Tryk og hold i cirka ti sekunder for at tilgå eller forlade Konfigurations tilstand.
(A + 5) KONTRASTER (Blåt hjul)	Drej for at justere afstanden mellem linjerne eller maskerne.