


OPUS 5

GUIDE TIL MONTERING AF FODENDESKÆRM

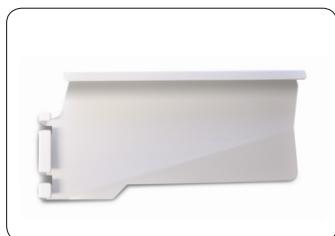

BEMÆRK!

- Vi gør opmærksom på, at fodendskærmen **IKKE** skal ses som et værn mod udstigning, men som en beskyttelse, til de patienter/borgere, der af den ene eller anden grund, er kropsligt urolige.
- Man må ikke køre med bendelen, når fodendskærmen er monteret.

STEP 1



Læg sengehestene ned i sammenklappet stilling.

STEP 2




Hægt fodendskærmens kroge omkring fodendens sengegavl, således at den peger bagud på sengen.

STEP 3



Drej nu fodendskærmen rundt, så den flugter med madrassen og skiltet "Denne side ud" vender udad.


STEP 4

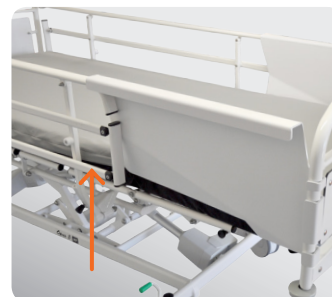

Løft sengehestene op. Fodendskærmen er nu monteret korrekt.

OPUS 5

GUIDE TIL MONTERING AF FODENDESKÆRM

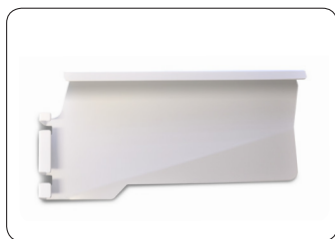

MAX BELASTNING!




Max belastning afhænger af fodendskærmens position.

A. FRITHÆNGENDE



▲▼ : Max 2 kg
◀▶ : Max 2 kg

B. MONTERET

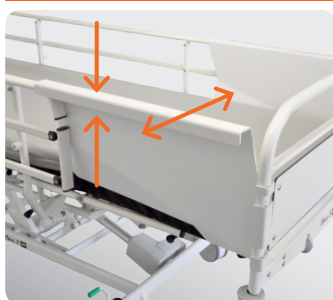

▲ : Max 2 kg
▼ : Max 40 kg
◀▶ : Max 30 kg