



VEJLEDNING I BRUG

Sådan får du strømper på

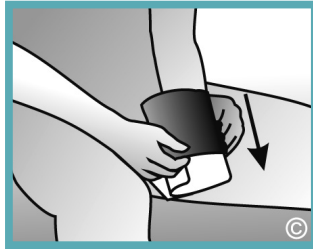


Træk strømpen ned over toppen af strømpepåtageren til den ikke kan komme længere.

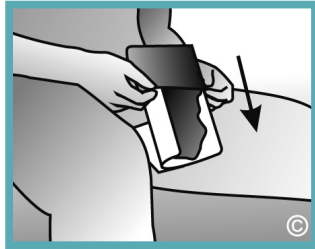

Træd igennem strømpen indtil den er helt på.


Benyt aftageren til at fiske påtageren op igen

Sådan får du strømper af

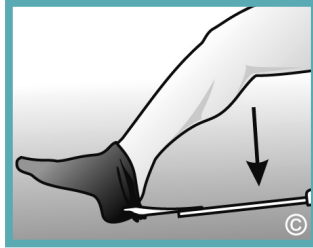


Før strømpeaftageren ned langs hælen med hånden.

Lad strømpeaftageren falde til jorden.

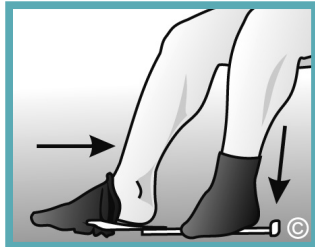

Hold aftageren med modsatte fod og træk så benet tilbage så strømpen smutter af.

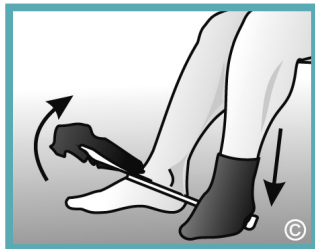

Træd på håndtaget så aftageren vipper strømpen kan dermed nås med hånden.