


# NoDec® Wizard Quick Guide



## Aktiver display

- Displayet er altid låst
- For at låse op - tryk på oplåsningsbjælken nederst på skærmen og hold den nede
- Herefter vises der en hængelås

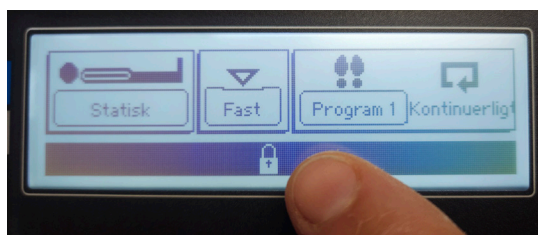

- Bliv ved med at trykke, indtil hængelåsen er helt åbnet
- Slip, og hovedmenuen kan nu tilgås



## Vælg driftfunktion

- Tryk på madrasknappen (driftfunktion)

Der kan nu vælges mellem 2 muligheder:

- Vekseltryk
- Statisk (går automatisk tilbage til vekseltryk efter 30 min.)

- Vælg den ønskede funktion og bekræft med 

Efter valget kalibreres trykket automatisk efter patientens vægt og krosstilling.




## Vælg komfort

- Tryk på komfortknappen

Der kan nu vælges mellem 3 komfortindstillinger:

- Blød (kun egnet til patienter under 60 kg.)
- Medium
- Fast

- Vælg den ønskede funktion og bekræft med 

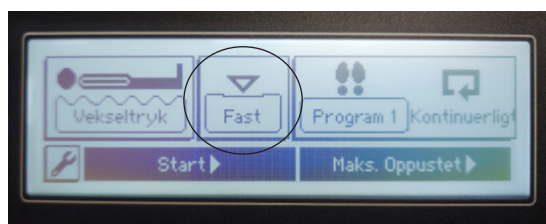


## Vælg vendeprogram

- Tryk på programknappen



Der kan nu vælges mellem de forskellige programmer ved at trykke på pilene til højre eller venstre på displayet:

- Vælg det ønskede program og bekræft med 

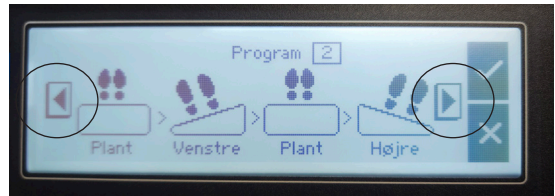

- Vælg om programmet skal køre kontinuerligt eller i 6 timer, og bekræft med 




## Maks. Oppuset (Maximum infaltion)

Ved denne trykindstilling pumpes madrassen helt op til "Extra Firm" (Ekstra fast) for at gengive fastheden af en normal madras.

- Tryk på knappen Maks. Oppustet (Max inflation)

Der kan vælges mellem to funktioner:


- Max inflation (kan bruges i f.eks. plejesituationer) - varer i 20 minutter
- Manuel vendefunktion (kan bruges hvis patienten skal vendes manuelet)

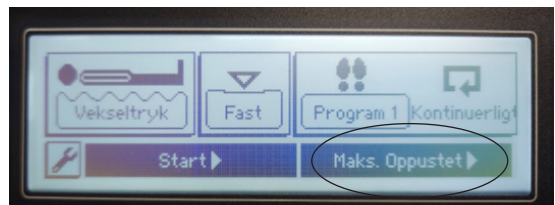

## Alarmer

- Alarmen på pumpen aktiveres, hvis pumpen f.eks. har for højt eller lavt tryk eller der er strømssvigt
- Alarmen kan pauseres (mutes) i 15 minutter
- Alarmen kan slukkes permanent, eller pumpen kan nulstilles, når årsagen til alarmen er løst, ved blot at slukke for pumpen og tænde for den igen.

Hvis det ikke løser problemer, venvises til manualen for flere muligheder for løsning ellers kontakt ZiboCare.

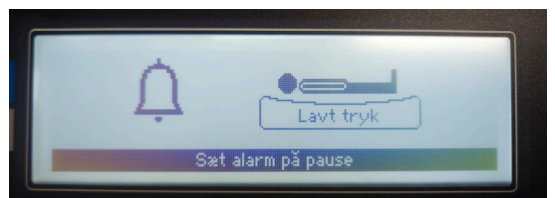

# NoDec® Wizard Quick Guide



## Programforklaring

### PROGRAM 1: Vekseltryk standard

Virker som normal dynamisk vekseltryksmadras, hvor vendefunktionen ikke er aktiveret. Madrassen er konstant plan.



plan

### PROGRAM 5: Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk på dynamisk vekseltrykfunktion og hjælper med at vende den sengeliggende konstant til højre.



højre

### PROGRAM 2: Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk dynamisk vekseltrykfunktion, samtidig med at vendefunktionen er aktiveret.



plan



venstre



plan



højre

### PROGRAM 6: Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk på dynamisk vekseltrykfunktion. Samtidig er vendefunktionen aktiv til venstre side og i plan niveau.



plan



venstre



plan



venstre

### PROGRAM 3: Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk dynamisk vekseltrykfunktion samtidig med en vendefunktion. Skifter kontinuerligt fra venstre til højre.



venstre



højre



venstre



højre

### PROGRAM 7: Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk på dynamisk vekseltrykfunktion. Samtidig er vendefunktionen aktiv til højre side og i plan niveau.



plan



højre



plan



højre

### PROGRAM 4: Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk dynamisk vekseltrykfunktion og hjælper med at vende den sengeliggende konstant til venstre.



venstre