


# Dale® holder til trakealkanyle

Med fugtafvisende Halsbånd

## Produktbeskrivelse

Holder trakealkanylen sikkert på plads. Effektive klæbefliger som hurtigt og nemt kan føres gennem hullerne i trakealkanylens flange. Todelt Halsbånd med fugtafvisende lag på indersiden.

## Anbringelse

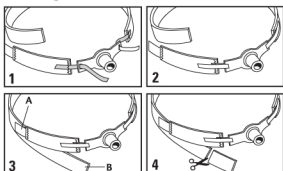

1. Før de lange, smalle klæbefliger gennem hullerne i trakealkanylens flange.
2. Buk fligene tilbage over flangen og fastgør dem til Halsbåndet.
3. Klæbefligerne på den korte del (A) af Halsbåndet fastgøres på lange del (B). Juster Halsbåndet, så det sidder godt til.
4. Klip overskydende materiale (kun B) af.

## Forsigtig

Må kun anvendes i overvågede plejemiljøer. Kontrolleres jævnligt for at undgå, at holderen utilsigtet løsnes.

Klæbefligerne må ikke klippes til.

Til brug til en enkelt patient.

Udskift holderen dagligt eller oftere efter behov.

Udskiftes efter patientvask.

Til engangsbrug.

**Må ikke vaskes.**

## Bestilling

- Nr. H84102401 **Dale® 240 Blue® holder til trakealkanyle**  
**HCPCS-kode: A7526**  
Passer de fleste patienter. Udstyret med en sektion strækmateriale for at give plads til ødem eller hosterefleks. Individuelt pakket. Sælges i æsker med 10 stk.
- Nr. H84102411 **Dale® 241 PediPrints® holder til trakealkanyle**  
**HCPCS-kode: A7526**  
Passer til hals med omkreds på maks. 46 cm (18"). Individuelt pakket. Sælges i æsker med 10 stk.
- Nr. H84102421 **Dale® 242 PediPrints® holder til trakealkanyle**  
**HCPCS-kode: A7526**  
Passer til hals med omkreds på maks. 23 cm (9"). Individuelt pakket. Sælges i æsker med 10 stk.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.



Latexfri



Dale® Medical Products, Inc.  
7 Cross Street, P.O. Box 1556  
Plainville, MA 02762-0556, USA  
TLF. USA: 1-800-343-3980  
TLF. ØVRIGE LANDE: +1-508-695-9316  
FAX: +1-508-695-6587  
www.dalemed.com



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Tyskland



Rev D PK-Trach Insert  
© Copyright 2011