


Quick guide StarLock


STEP 1: Positionering af brugeren på StarLock puden

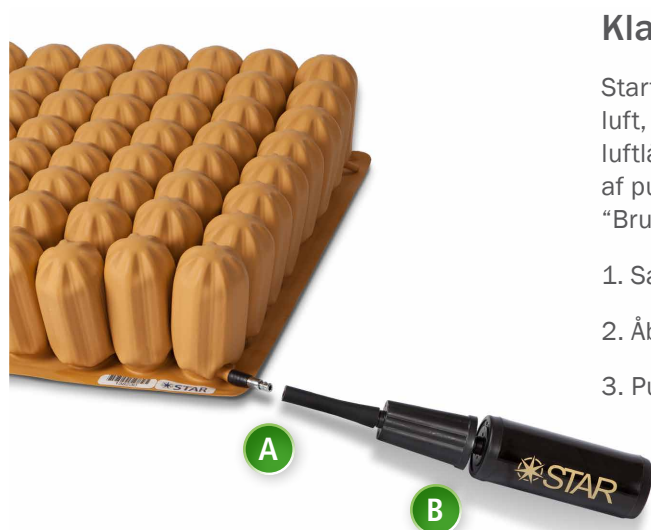

Klargør puden

Start med at sikre, at der er luft i puden. Hvis puden mangler luft, følges nedenstående vejledning. Vær opmærksom på, at luftlåsen altid skal være åben og låselommerne på bagsiden af puden er tømte, inden der fyldes luft i puden (Se afsnittet "Brug af StarLock luftlås" på næste side).

1. Sæt den sorte pumpe (B) på ventilen (A).
2. Åbn ventilen (A) ved at dreje den mod urets retning.
3. Pump puden indtil den står i en let bue.
4. Fjern pumpen (B) og lad luften sive ud i ca. 1½ minut. Når luften ikke siver længere, har puden opnået atmosfærisk tryk.
5. Luk ventilen (A) ved at dreje den i urets retning.

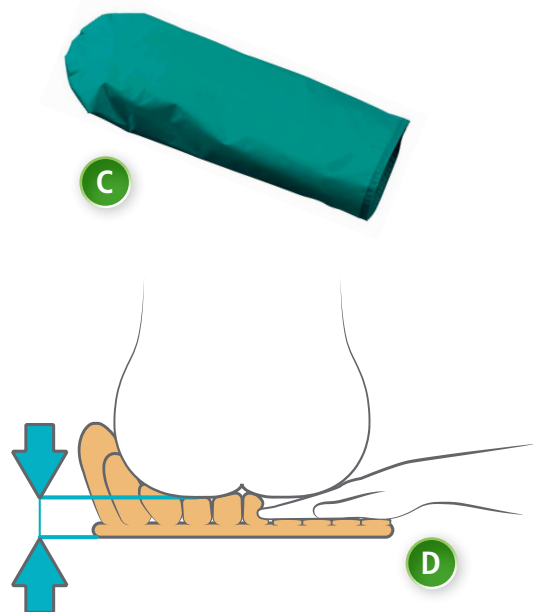

Justér luftmængden i puden

1. Placér brugeren på puden.
2. Tag en pose eller den grønne nylon-glidehandske, MultiGlide Glove* (C) på hånden, for at mindske friktion. Placér din hånd under brugeren (D). Såfremt det kan lade sig gøre, stikkes hånden ind fra siden. Find laveste knoglefremspring, dette er typisk sædekuderne. Der skal være ca. 2 cm afstand mellem pudens bund og brugerens sædekuder - Du skal lige kunne vippe med fingerspidserne. Husk at tjekke luftmængden under begge sædekuder. Såfremt det vurderes nødvendigt, justeres luftmængden.
3. Husk at lukke ventilen (A), når du er færdig.

Du er færdig med positionering og skal nu stabilisere brugeren på puden. Se næste side.

Info

Når der er asymmetri i puden, skal den laveste side altid tjekkes først. Hvis det er nødvendigt, kan der pumpes mere luft i, mens brugeren sidder på puden.

**MultiGlide Glove følger ikke med StarLock puden, men kan købes hos Etac.*


Quick guide StarLock



STEP 2: Stabilisering af brugeren på StarLock puden

Brug af StarLock luftlås


StarLock pudens unikke låsesystem skaber stabilitet. Når låsesystemet aktiveres, lukkes alle forbindelserne mellem cellerne, således luftindholdet i hver enkelt celle forbliver stabilt.

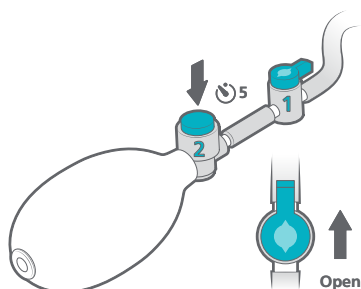


1. Kontrollér, at luftlåsen (1) "den lille hane" er drejet parallelt med slangen så håndtaget løber langs slangen (åben).

Tryk på knap (2) i 5 - 10 sekunder indtil låselommerne er tomme for luft.

Placér brugeren i den ønskede stilling, hold denne stilling i 10 sekunder.

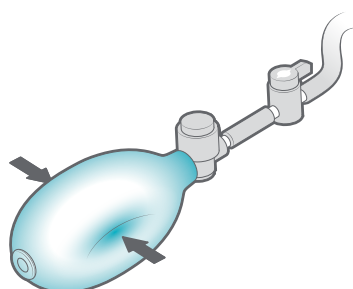

2. Klem den røde pumpebold sammen ca. 15 - 20 gange, indtil der er betydelig modstand i den.

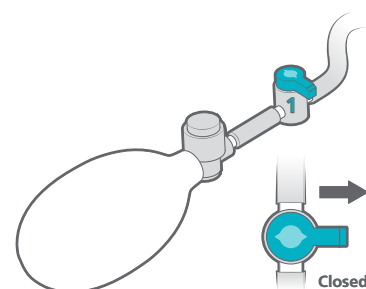



3. Drej håndtaget (1) for at låse indstillingen. Pudens låsesystem isolerer luften i cellerne individuelt, så indstillingen forbliver den samme.

Der er nu opnået stabilitet i puden.

Vedligeholdelse af luftlåsen

Lukkefunktionen (låselommerne) i bunden af puden skal tjekkes jævnligt. Dette udføres ved, at brugeren sidder på puden imens luftlåsen (1) "den lille hane" åbnes.

Der trykkes med det samme på pumpebolden, indtil der er betydelig modstand igen. Denne proces sikrer lukkefunktionen af alle felter/kamre.

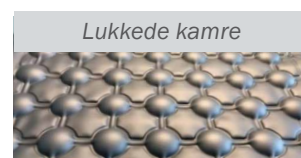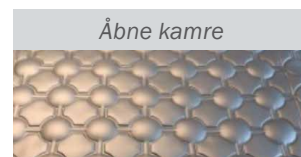

Tøm puden for luft

Puden tømmes for luft ved genjustering og ved genbrug. Åbn luftlåsen (1) og åbn ventilen (A) som vist på forrige side.

Info

Ser du en pude med facon som på fotoet, skyldes udseendet højst sandsynligt, at puden er låst i denne position, til den person, der benytter puden. Puden er altså ikke punkteret eller i stykker, men blot låst.

Har du brug for hjælp til indstilling af StarLock, kontakt venligst Etac på telefon: 79 68 58 33.

